

ReSound

Brugsanvisning

- be by ReSound - Custom

be
BY RESOUND™



Tillykke med dit nye fuldt digitale høreapparat.

Dit høreapparat vil give dig en enestående lyd kvalitet hjemme, på arbejdet og i sociale sammenhænge. Dit høreapparat er blevet tilpasset, så det passer bedst muligt til din individuelle hørenedsættelse.


For at få størst mulig gavn af dit nye høreapparat, bør du sætte dig grundigt ind i indholdet af denne vejledning.

be by ReSound™ er et varemærke fra GN ReSound A/S.

Indholdsfortegnelse	Side
Dit høreapparat	4
Tænd/Sluk funktion	5
SmartStart	5
Isætning og udtagning af apparat	6
Batteriskift	11
Batteriadvarsler	13
Daglig vedligeholdelse	14
Telefonering	18
Reparation	18
Generel sikkerhed	19
Fejlfindingsvejledning	24
Stikordsregister	28
Tekniske data	29

Delene til dit høreapparat

1. Hus
2. Lydudgang/Receiver
(under voksfilter)
3. Voksfilter
4. Batteridør
5. Mikrofonslange
6. Mikrofon
7. Mikrofonudgang

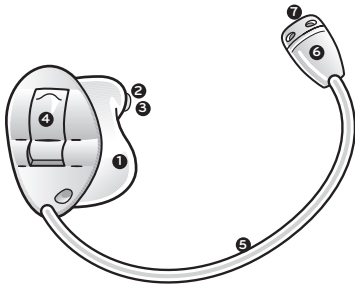

Tænd/Sluk funktion


Dit høreapparat er udstyret med en integreret tænd/sluk knap, der sidder i batteridøren.

Når batteridøren er helt lukket, er høreapparatet tændt.

For at afbryde høreapparatet, skal du åbne batteridøren.

Høreapparatet slukker, når du kan mærke et lille klik.

For at spare på batterierne bør du altid slukke for høreapparatet, når du ikke bruger det.

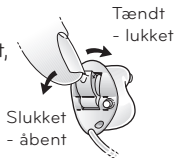

SmartStart

Din høreapparatspecialist kan have valgt at aktivere SmartStart funktionen i dit høreapparat. Hvis den er aktiveret, tænder høreapparatet først 10 sekunder efter, at batteridøren er lukket, hvilket giver dig mulighed for at sætte høreapparatet på plads uden irriterende hyl.

Hvis du hører en serie af bip med intervaller på et sekund, efter at høreapparatet er tændt, så er SmartStart aktiveret.

Sådan sættes apparatet i øret

Indsættelse:

1. Check om det apparat, som du vil sætte i øret, hører til højre eller venstre øre. Udenpå apparatet vil du kunne se enten en rød eller en blå tekst.
 - Høreapparatet med rød tekst er til højre øre. Det er let at huske **R**ød = **R**ight.
 - Høreapparatet med blå tekst er til venstre øre.

Sådan sættes apparatet i øret fortsat...

2. Kontroller at overfladen på selve apparatet føles glat, inden du sætter det i øret. Hvis overfladen føles ru, anbefaler vi, at du kontakter din høreapparat-specialist.
3. Tag fat om apparatet - i den ende hvor slangen forbindes med batteridøren - med din tommel- og pegefinger.


Bemærk at batteridøren skal pege opad.



Sådan sættes apparatet i øret fortsat...

4. Skub forsigtigt apparatet ind i øregangen. "Bagenden" af apparatet bør flugte med øregangens åbning.
5. Når apparatet sidder korrekt i øregangen lokaliseres mikrofonen og mikrofonslangen.
6. Skub forsigtigt mikrofonen ind i det skjulte område i øret, der er over indgangen til øregangen.

7. Når mikrofonen sidder, hvor den skal, skubbes mikrofonslangen på plads.

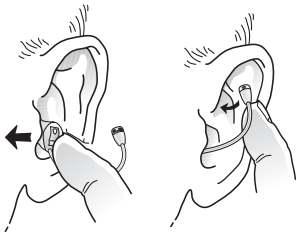

Sådan sættes apparatet i øret fortsat...

8. Denne tegning illustrerer, hvordan det skal se ud, når apparatet er korrekt placeret i øret. Det er vigtigt, at mikrofonslangen passer til dit øre. Hvis mikrofonslangen irriterer, bedes du kontakte din høreapparatspecialist, så du kan få en anden størrelse mikrofonslange.



Sådan tages apparatet ud af øret:

1. Find mikrofon og mikrofonslange i det skjulte område i øret, der ligger over åbningen til øregangen.
2. Tag fat om mikrofonslangen, og træk forsigtigt apparatet ud af øret.
3. Hver gang apparatet tages ud af øret, bør du sikre dig, at voksfiltret stadig sidder på apparatet. Hvis ikke, bør du kontakte din høreapparatspecialist med det samme.



Batteriskift

Når batterispændingen/styrken er faldet til et vist niveau, vil høreapparatet holde op med at forstærke og i stedet udsende et svagt bippende signal hvert 5. minut, indtil høreapparatet slukkes automatisk. Derfor anbefaler vi, at du altid har ekstra batterier på dig.

- Ved udskiftning af batteri skal mikrofonslangen pege opad.

- Batteridøren åbnes lettest ved hjælp af en fingernegl.
- Efter at du har fjernet det gamle batteri, sættes det nye ind, hvor "+" (flad) vendes samme vej, som "+" på batteridøren.




Yderligere batteriinformation

- Brug altid Zinc Air batterier til dit høreapparat. Dit apparat bruger batteristørrelse 10A.
- Batteriet bør indsættes med den flade side op. Den flade side er markeret med et "+", der kan ses under det gule mærkat.
- Husk at fjerne det gule mærkat, inden batteriet sættes i batteridøren. Batteridøren skal være meget let at lukke.

Brug aldrig mange kræfter på at lukke batteridøren, eftersom dette kan ødelægge høreapparatet.

- Vær opmærksom på, at svage batterier begrænser høreapparatets ydeevne. Hvis batteriet tages ud af høreapparatet, når du ikke bruger det, vil det forhindre ætsning af batterikontaktfladerne.

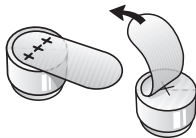

Batteriadvvarsler

Da batterier indeholder farlige komponenter, bør du såvel for din egen skyld som af hensyn til miljøet behandle dem omhyggeligt og ikke smide dem ud efter brug, men returnere dem til din batterileverandør.

- Forsøg IKKE at genoplade batterier, der ikke er fremstillet specielt til genopladning, da de kan lække eller eksplodere.
- Forsøg IKKE at slippe af med batterier ved at brænde dem.
- Tag IKKE batterierne i munden. Hvis batteriet sluges konsultér da straks en læge.
- Opbevar batterierne udenfor små børns, mentalt handicappede og dyrs rækkevidde.
- Udskift døde batterier. Efterlad dem ikke i apparatet i en længere periode, da de kan lække.

Daglig vedligeholdelse

For at undgå unødvendige reparationer, er det vigtigt, at høreapparatet holdes rent og tørt.

Høreapparatet bør tørres af med en blød klud eller en serviet hver gang, du tager det ud af øret for at fjerne snavs eller fugt.

Du bør undgå at udsætte dit høreapparat for fugt som f.eks. ved et brusebad. Har høreapparatet været udsat for fugt eller sved, bør det lægges i en lukket beholder sammen med en fugtfjerner natten over.

Konsultér din høreapparatspecialist eller vor kundeservice angående hvilken fugtfjerner, du skal anvende.

Yderligere vedligehold

Voksfilter, mikrofon og receiver bør checkes for voks. Fjern evt. voks vha. af en børste, når det er tørt. Udskift voksfilter ved behov.

Mikrofonslangen

Mikrofonen og mikrofonslangen bør tørres af med en blød og tør klud efter brug. Dette vil hjælpe med at holde åbningen åben, og lade lyden komme ind i mikrofonen.

Med tiden kan lydslangen blive stiv og misfarvet. Hvis den bliver for stiv eller misfarvet, kan du sende den til vort ServiceCenter, som vil udskifte den for dig. Du finder adressen på bagsiden.

Voksfilter

Voksfiltret sidder på receiveren på høreapparatet. Dette filter beskytter dit høreapparat mod ørevoks og fugt, der kan skade dit høreapparat.

Hvis høreapparatet har tabt styrke, og det ikke hjælper at skifte batteriet, kan voksfiltret være blokeret, og bør derfor skiftes. Din høreapparatspecialist kan fortælle dig, hvor du kan bestille nye voksfiltre og vise dig, hvordan voksfiltret skiftes.

For at skifte voksfilter:

Er dit høreapparat ikke udstyret med et voksfilter, kan ørevoks og/eller snavs samle sig i lydkanalen. Den lille slynge, du modtog sammen med høreapparatet, kan let bruges til at fjerne dette. Når du anvender slyngen, skal du være forsigtig,

så du ikke skader eller skubber til den lille slange, der sidder i lydudgangen. Hvis denne falder ud, kan det være nødvendigt at sende høreapparatet til reparation. Din høreapparatspecialist kan vise dig, hvordan du bedst anvender slyngen.

For at undgå unødvendige reparationer:


- Læg aldrig høreapparatet i vand eller andre væsker, da det kan skade høreapparatets kredsløb permanent.
- Udsæt ikke høreapparatet for hård behandling - det tåler ikke at blive tabt på gulvet eller andre hårde overflader.
- Læg ikke høreapparatet i direkte sollys eller varme, da stærk varme kan ødelægge høreapparatet eller påvirke apparatets udformning.

Telefonering

Med be by ReSound kan du bruge telefonen, som du normalt ville gøre.

Men da der er forskel på telefoner og de steder, vi taler i telefon i, kan du prøve nedenstående, hvis du oplever problemer:

- Undgå at presse røret mod øret.
- Bevæg langsomt røret til og fra øret eller rundt om øret, indtil du finder den mest optimale placering.

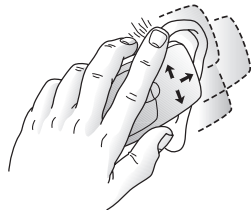

Reparation

Hvis dit høreapparat går i stykker, skal det repareres af kvalificeret høreapparatteknisk personale. Forsøg ikke selv at åbne høreapparatet, da garantien herved bortfalder.

Hvis dit høreapparat behøver service, bedes du indsende dit høreapparat til vores Servicecenter i Århus med en klar fejlbeskrivelse. Du finder adressen på bagsiden af denne brugsanvisning.

Godt at vide

- Læg ikke dit høreapparat i direkte sollys, nær en pejs eller i en varm parkeret bil.
- Tag altid dit høreapparat ud, når du bader, opholder dig i kraftig regn eller i en fugtig atmosfære som dampbad eller sauna.
- Hvis dit høreapparat skulle blive vådt eller fugtigt, skal du bruge en affugter (konsultér din høreapparatspecialist eller vor kundeservice angående hvilken fugtfjerner, der passer til dit høreapparat). Brug aldrig et varmt sted som f.eks. en ovn eller en hårtørrer til at tørre dit høreapparat. Stærk varme kan ødelægge høreapparatet eller påvirke dets udformning.
- Tag dit høreapparat ud, når du påfører ting som parfume, aftershave og hårspray, da det kan påvirke eller ødelægge kredsløbet i apparatet.

Generel sikkerhed

- Kontakt en læge, hvis du finder et fremmedlegeme i din øregang, oplever irritation af øregangen eller får kraftig produktion af ørevoks ved brug af apparatet.
- Kontakt en ørelæge inden ibrugtagning af apparatet, hvis du tidligere er blevet opereret i øregangen.
- Forskellige typer af kraftig elektromagnetisk stråling f.eks. fra CT scannere kan skade høreapparatet. Brug derfor

ikke høreapparatet under CT scanning eller lignende forhold. Andre typer af elektromagnetisk stråling (fra tyveri-alarmer, rumovervågning, radioudstyr, trådløse telefoner, mobiltelefoner et.c.) indeholder begrænset energi, og vil ikke skade høreapparatet, men kan dog periodisk påvirke lyd kvaliteten.

- Advarsel: Benyt ikke dit høreapparat i miner eller i andre eksplosive områder med mindre at disse er godkendt til at benytte høreapparat.

- Hold høreapparatet væk fra børn under tre år, da det indeholder smådele, der kan medføre kvælningfare.
- Høreapparatet bør kun bruges som foreskrevet af din høreapparat-specialist. Ukorrekt brug kan medføre permanent høretab.
- Hvis mikrofonslangen demonteres af apparatet, mens det sidder i øret, bør du omgående kontakte din høreapparatspecialist.

Fejlfindingsvejledning

SYMPTOM

ÅRSAG

MULIG LØSNING

Høreapparatet er dødt

- Ikke tændt
- Batteri er dødt
- Batteri sidder forkert
- Tilstoppet voksfilter

- Ødelagt receiver

- Ødelagt mikrofon eller mikrofonslange

- Tænd
- Skift batteri
- Vend batteri rigtigt
- Kontakt din høreapparatspecialist eller skift voksfilter, hvis du er blevet instrueret i at skifte det selv
- Kontakt din høreapparat-specialist
- Kontakt din høreapparat-specialist

Ikke klart,
forvrænget

- Svagt batteri
- Mikrofonslange sidder dårligt
- Høreapparat er skadet

- Skift batteri
- Kontakt din høreapparat-specialist
- Kontakt din høreapparat-specialist

Apparatet
hyler

- Høreapparat sidder ikke rigtigt
- Mikrofonen sidder ikke rigtigt
ved telefonering
- Høreapparatindstillingerne er
ikke optimale

- Sæt ind igen
- Sæt på plads igen
- Se afsnit om telefonering
- Kontakt din høreapparat-specialist

Fejlfindingsvejledning

SYMPTOM	ÅRSAG	MULIG LØSNING
Ikke højt nok	<ul style="list-style-type: none">• Høreapparat sidder ikke rigtigt• Mikrofonen sidder ikke rigtigt• Tilstoppet voksfilter • Høreapparatindstillingerne er ikke optimale• Meget ørevoks• Forandring i hørelsen	<ul style="list-style-type: none">• Sæt ind igen• Sæt på plads igen• Kontakt din høreapparat-specialist eller skift voksfilter, hvis du er blevet instrueret i at skifte det selv• Kontakt din høreapparat-specialist• Kontakt din ørelæge• Kontakt din høreapparat-specialist

Hvis du oplever andre problemer end dem, vi har nævnt her, eller har du yderligere spørgsmål, bedes du kontakte din høreapparatspecialist.

Stikordsregister

Batteridør	5	Tekniske data	29
Batteriskift	11,24	Telefonering	19
Fejlfindingsvejledning	24-27	Tænd/Sluk-omskifter	5
Isætning af apparat	6-9	Udtagning af apparat	10
Lav batterispændingsalarm	11	Voksfilter	16-17
Rengøring	14-17		
SmartStart	5		

Teknisk data

Maximum Output (2cc coupler/IEC 118-7)

be 9 by ReSound - Custom
/ BE910-M 109 dB SPL (typisk)

be 9 by ReSound - Custom Power
/ BE910-MP 117 dB SPL (typisk)

be 7 by ReSound - Custom
/ BE710-M 109 dB SPL (typisk)

be 7 by ReSound - Custom Power
/ BE710-MP 117 dB SPL (typisk)

Dit apparat

Du bedes få din høreapparatspecialist til at udfylde nedenstående.

Modtaget model

be 9 - Custom

be 9 - Custom Power

be 7 - Custom

be 7 - Custom Power



Dit høreapparat er et elektronisk apparat,
og må derfor ikke smides i skraldespanden.
Din høreapparatspecialist kan fortælle dig,
hvor du kan returnere dit høreapparat.

ReSound

Kundeservice

GN ReSound Danmark as
(GN ReSound as)
Lautrupbjerg 9
2750 Ballerup
Telefon: 45 75 22 22
Email: info@gnresound.dk
www.gnresound.dk

Reparation

GN ReSound Danmark as
(GN ReSound as)
Silkeborgvej 41, 1
8000 Århus C
Telefon: 45 75 22 22
Email: info@gnresound.dk
www.gnresound.dk

Producent

GN ReSound as
Lautrupbjerg 9
2750 Ballerup
Telefon: 45 75 11 11
Telefax: 45 75 11 19
www.resound.com

CE
0297

*Alle forespørgsler vedr. det EU
Medicinske Direktiv 93/94EEC
skal rettes til GN ReSound A/S.*

be
BY RESOUND™