



ReSound GN

En kort vejledning til
trådløse muligheder og
ReSound Smart 3D™ app





Indhold

Kompatibilitet: Høreapparater og mobilenheder.....4

Kom i gang med din iPhone, iPad eller iPod touch6

Par dine ReSound Smart høreapparater.....	6
Stream lyd	10
Lydrute	12
Indbygget iOS styring af dine høreapparater (tredobbelt klik).....	15

ReSound Smart 3D appen 19

Download og tilslut til din Apple- eller Android-enhed	19
Oversigt over ReSound Smart 3D app	22
Startskærm	
Programskift og volumenkontrol	24

Hurtigknapper	27
Sound Enhancer.....	28
Tinnitus Manager.....	32
Favoritter	34

Status

Forbindelse og batteristatus.....	36
-----------------------------------	----

Mit ReSound

ReSound Assist.....	38
Gode råd	48
Lær om appen	49
Find mit høreapparat.....	50

Mere

Flere muligheder med appen	51
----------------------------------	----

ReSound Smart 3D app til Apple Watch... 52

Stream lyd med din Android-telefon..... 56

Prøv flere apps fra ReSound..... 58

Kompatible ReSound Smart høreapparater

Der findes en liste over ReSound Smart høreapparater, der fungerer sammen med ReSound Smart 3D™ appen. Hvis du er i tvivl om hvilke, kan du kontakte din høreapparatspecialist.

ReSound LiNX 3D™
ReSound ENZO 3D™



Kompatible mobilenheder

Apple: ReSound Smart høreapparater understøtter Made for iPhone (MFi) funktionalitet med følgende Apple-enheder:

iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6

iPhone SE
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPad Pro (10.5-inch)
iPad Pro (12.9-inch)
iPad Pro (9.7-inch)
iPad Air 2
iPad Air

iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad mini
iPad (5. generation)
iPad (4. generation)
iPod touch (6. generation)
iPod touch (5. generation)

iOS 10 eller nyere er påkrævet. Installér altid den nyeste version af iOS for at opnå den bedste ydelse. Til Apple Watch kræves der mindst watchOS 3.

Android: ReSound Smart 3D appen understøtter nogle af de mest populære Android-enheder.

Da vi løbende gør flere mobilenheder kompatible, skal du gå ind på ReSound Smart 3D appens website for at se de opdaterede oplysninger om kompatibilitet:


www.resound.com/compatibility

Par med din iPhone, iPad eller iPod touch

Sådan parres dine ReSound Smart høreapparater med din iPhone, iPad eller iPod touch

Tjek batteri

Sæt et helt nyt batteri i dit ReSound Smart høreapparat. Hold batteridøren åben, så høreapparatet ikke tændes.



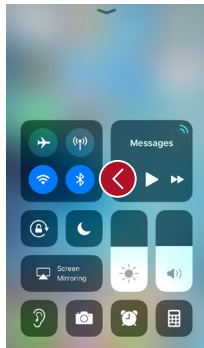


Tænd for Bluetooth



Stryg opad fra bunden af skærmen for at få vist kontrolcenteret.



Tryk på Bluetooth-ikonet.

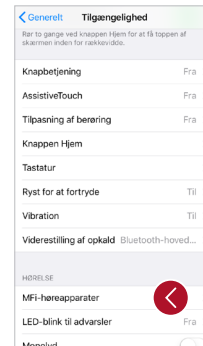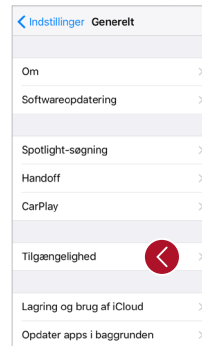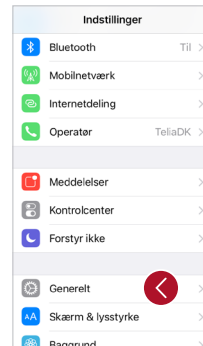

Find høreapparater

Nu da Bluetooth er aktiveret, skal du gå til **Indstillinger**, trykke på **Generelt** og derefter **Tilgængelighed**.

Luk batteridøren for at tænde høreapparatet, så din iPhone, iPad eller iPod touch kan finde det, og tryk derefter på **MFi-høreapparater**.

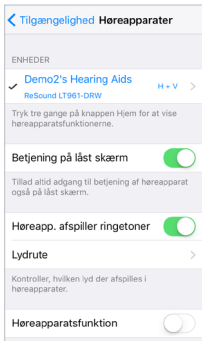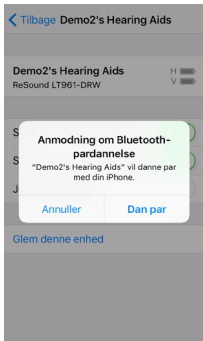

Opret forbindelse

Tryk på høreapparatets navn og modelnummer, når det vises på skærmen.

Tryk på **Dan par** i dialogboksen. Når du parrer to høreapparater samtidig, vil du modtage to separate anmodninger. Det kan tage et par sekunder, inden den anden anmodning kommer frem.

Når det er forbundet, vises navnet på høreapparatet sammen med et flueben, og farven på navnet vil ændres fra sort til blå.

Når du er forbundet, kan du tjekke forbindelsen på høreapparatsiden.

Forbinde høreapparaterne til din iPhone, iPad eller iPod touch igen

Når du slukker for høreapparaterne eller Apple-enheden, så er de ikke længere forbundne. Du genopretter forbindelsen ved at tænde for høreapparaterne. Høreapparaterne opretter derefter automatisk forbindelse til din Apple-enhed. Du kan også få bekræftet forbindelsen ved at trykke tre gange på hjem-knappen og få vist, at apparaterne er blevet registreret.

Parring med mere end én Apple-enhed

Du kan parre op til fem forskellige Apple-enheder med dine ReSound Smart høreapparater, men du kan kun have forbindelse med en enhed ad gangen.

For at skifte forbindelse fra en Apple-enhed til en anden skal du stryge opad fra bunden af Apple-enhedens skærm og slå Bluetooth fra.

Herefter kan du aktivere Bluetooth på den enhed, som du vil forbindes til.


Vent på godkendelse

Når du trykker på **Dan par** i dialogboksen, så går der lidt tid, inden dit ReSound Smart høreapparat og Apple-enheden godkender hinanden. Du kan enten sætte høreapparatet i øret og vente på en serie af 6 bip efterfulgt af en klartone eller vente mindst 120 sek. på at godkendelsen gennemføres. Du må ikke prøve at streamme lyd, før parringen er gennemført.

Stream lyd direkte til dine ReSound Smart høreapparater


Du kan streame stereolyd, som f.eks. musik, direkte fra din Apple-enhed til dine høreapparater.

Kontrolcenter

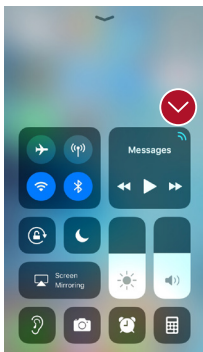


Når dine høreapparater er parret med en Apple enhed, streames lyden automatisk fra denne enhed til dine høreapparater.

For at vende tilbage til normal telefonbetjening skal du først trykke på streamingikonet i øverste højre hjørne - og herefter iPhone.

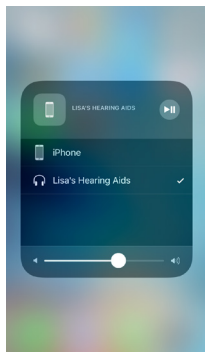

Telefon- og Facetime samtaler

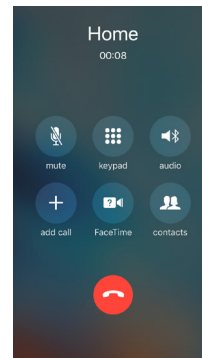


Hvis telefonen ringer, mens du streamer lyd fra din musikafspiller, kan du besvare opkaldet på vanlig vis. Systemet vil automatisk skru ned for musikken og skifte til telefonsamtalen.

Når du afbryder samtalen, fortsætter streamingen fra det sted, hvor den blev afbrudt.


i Hvis jeg besvarer et opkald gennem Apple Watch, får jeg så lyd i mine høreapparater? Hvis du får et opkald gennem dit Apple Watch, skal du scrolle ned på den digitale skive og vælge Besvar på iPhone for at få lyd i dine høreapparater. Brug mikrofonen på din iPhone til at opfange din egen stemme.

Lydrute

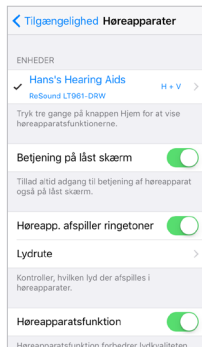

Lydrute giver dig mulighed for at bestemme, hvor de forskellige lydinputs skal sendes hen.

Gå til **Indstillinger**, tryk på **Generelt**, tryk på **Tilgængelighed**, tryk på **MFI høreapparater** og derefter **Lydrute**.

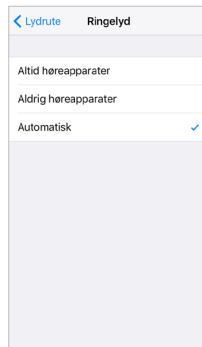

Vælg enten:
Lyd for opkald (indkommende telefonopkald) eller **Lyd for medie** (f.eks. streaming af musik).


Vælg, hvor du vil sende lyden hen f.eks. **Altid høreapparater**.

Indstilling til **Automatisk** viderestilling af lyd vil lede lyden til en ledningsforbundet lydkilde, hvis en sådan er forbundet, og den vil derefter søge efter og streame til enten standard Bluetooth-enheder (for eksempel CarPlay, A2DP Bluetooth-enheder) eller høreapparater.





Kontrol af høreapparaterne, der er indbygget i din iPhone, iPad eller iPod touch

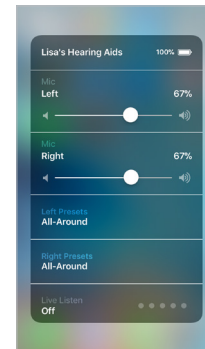

Sådan finder du de basale kontrolknapper (tredobbelt klik)

Tryk tre gange på Hjem-knappen på Apple enheden.


Du kan f.eks. justere lydstyrken i højre og venstre høreapparat uafhængigt af hinanden.

Sådan finder du de basale kontrolknapper (swipe op)

Når du stryger opad fra bunden af skærmen (swipe op), kommer kontrolcentret frem. Du kan også lave en genvej til de basale høreapparatfunktioner som volumenkontrol ved at gå ind i Indstillinger, Kontrolcenter, Tilpas betjeningspanel. Scroll ned til Høreapparater og tryk på +.




Kontrol menu (swipe op)
Genvej til hurtig justering af høreapparatet.

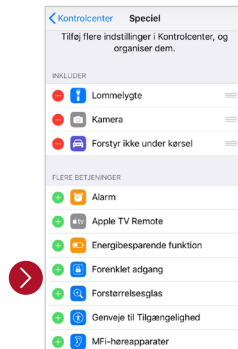

Speciel (tilpas betjeningspanel)

Sådan laver du yderligere justeringer (Indstillinger)

Du kan også få adgang til kontrolcentret for dine høreapparater i Indstillinger. Gå til **Indstillinger, Generelt, Tilgængelighed og MFi høreapparater**. Tryk derefter på **Forbundet**.

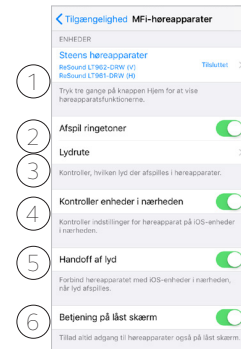

1. Navn, model og forbindelsesstatus på dit høreapparat.
2. Slå ringetoner til eller fra i dit høreapparat.
3. Styr, hvilken lyd der afspilles i dine høreapparater.
4. + 5. Brug disse, når du har parret dine høreapparater med to iOS enheder.
6. Gør det muligt for dig at have adgang til høreapparatkontrollerne, når iPhone/iPad er låst.



Smart kontrol og personlig tilpasning med ReSound Smart 3D app



Download og installer ReSound Smart 3D app

Appen kan hentes gratis i App Store eller Google Play ved at følge disse trin:

Hvis du har en iPhone, iPad eller iPod touch:

1. Gå til App Store.
2. Søg efter "ReSound Smart 3D".
3. Hvis du bruger en iPad, skal du ændre søgekriterierne i det øverste venstre hjørne til **Kun iPhone**.
4. Tryk på **Hent** og derefter **Installer** for at begynde at downloade appen.
5. Tryk på ReSound Smart 3D appen på startskærmen for at starte den.




Hvis du har en Android-enhed:

1. Gå til Play Store.
2. Søg efter "ReSound Smart 3D".
3. Tryk på **Installer** og derefter **Accepter** for at tillade, at appen får adgang til bestemte funktioner på din telefon, f.eks. Bluetooth.
4. Når installationen er gennemført, skal du trykke på **Åbn** for at starte ReSound Smart 3D appen.



Oprettelse af forbindelse

Første gang du åbner appen, vil du blive ledt gennem nogle få trin, så du kan oprette forbindelse til den. Start med at acceptere vilkårene og betingelserne og følg bagefter disse trin:

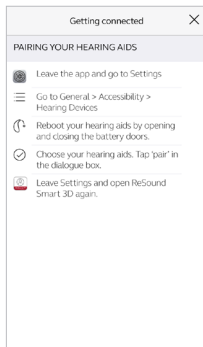

Hvis du har en Apple-enhed:

Hvis du ikke allerede har parret din Apple-enhed med dine høreapparater, skal du gå til s. 6 og følge parringsproceduren.



Hvis du har en Android-enhed:

Par din Android-enhed med høreapparaterne:

Tag høreapparaterne ud.

Genstart dem ved at åbne og lukke batteridøren.

Anbring høreapparaterne tæt på din mobilenhed.

ReSound Smart 3D appen vil guide dig gennem resten af proceduren:



Når du har parret høreapparat og Apple-/Android-enhed, vil appen bekræfte, at den har fundet høreapparaterne.

Næste trin er at etablere en sikker forbindelse mellem appen og høreapparaterne. Det gør du ved at genstarte høreapparaterne. Det er anden gang, hvis du har en Android-enhed.


Når det grønne flueben vises, er du klar til at komme i gang.



Husk altid at tillade push-meddelelser og brug af lokationsbaserede tjenester, så du hele tiden er opdateret og får fuldt udbytte af appen.


Oversigt over ReSound Smart 3D app

ReSound Smart 3D appen har fire hovedskærme, som alle kan åbnes fra den nederste navigationsmenu.

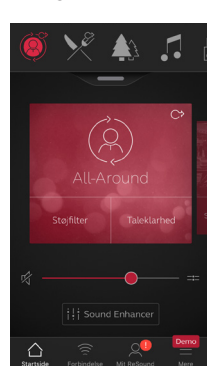


Startskærm
Startskærmen er dit kontrolcenter. Herfra har du nem adgang til styring af program og lyd.

Du kan altid vende tilbage til denne skærm ved at trykke på Hjem-ikonet i den nederste menu.

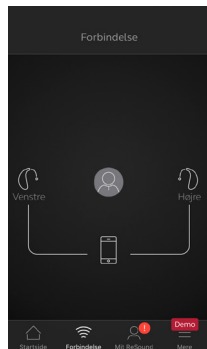

Forbindelse
På forbindelsesskærmen finder du oplysninger om forbindelsen mellem høreapparater, mobilenhed, ReSound trådløst tilbehør og Apple Watch.

Advarsler om lav batterispænding vil også blive vist her.

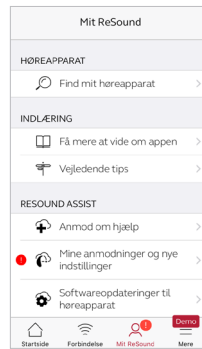

Mit ReSound
Mit ReSound er om dig og dine høreapparater.

Det er f.eks. her, du finder ReSound Assist.



Mere
I menuen Mere kan du ændre generelle app-indstillinger og finder support og juridiske oplysninger.

🏠 Programskift

I ReSound Smart 3D startskærmen får du direkte adgang til at skifte programmer og favoritter på tre nemme måder:



Øverste menu


Stryg til venstre for alle programmer og favoritter.

Programoversigt

Træk ned eller tryk på håndtaget under den øverste menu for at se alle programmer og favoritter.

Hurtigt stryg


Stryg på det røde kort for at skifte programmer. Denne visning af hvert program viser også tilgængelige hurtigknapper.

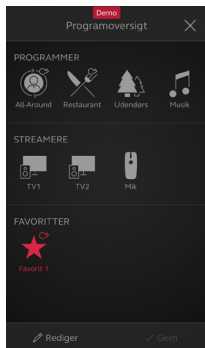

Programoversigt

Når du åbner programoversigten, kan du se alle dine programmer og favoritter. Du kan skifte og redigere programmer samt tilføje favoritter.

🏠 Høreapparatets volumenkontrol

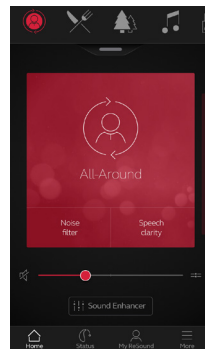


Volumenkontrol

Flyt skyderen for at indstille lydstyrken i høreapparaterne.

Mute

Hvis du trykker på Mute slås lyden i dine høreapparater omgående fra.

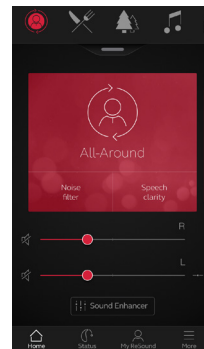


Uafhængig volumenkontrol

For at regulere volumen for højre og venstre høreapparat uafhængigt af hinanden, skal du trykke på det delte ikon til højre for volumenskyderen. Der vises skydere for hvert høreapparat.



Streamerens volumenkontrol

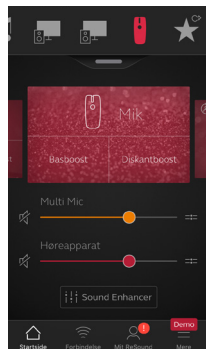


Volumenkontrol

Hvis du har en trådløs streamer tilkoblet, kan du indstille lydstyrken forskelligt i høreapparaterne ved hjælp af den orange volumenskyder.

Lydstyrke i høreapparatet

Du kan stadig justere lyden fra høreapparatets mikrofoner, uden at det påvirker den streamede lyd.

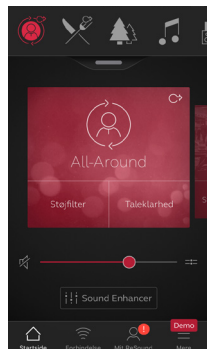

Uafhængig streamer volumenkontrol

For at regulere volumen for højre og venstre side af streamingenheden uafhængigt af hinanden skal du trykke på det delte ikon til højre for den orange skyder.




Kan jeg fjerne lyden fra alle mine enheder?

Du kan fjerne lyden fra dine høreapparat eller din streamingenhed ved at trykke på et af mute-ikonerne til venstre for volumenskyderne. For at slå lyden til igen skal du trykke på mute-ikonet igen eller trykke på det røde felt midt på skærmen.




Hurtigknapper

Hvert program har individuelle hurtigknapper. Hurtigknapperne er genveje til omgående lydforbedringer, når du har brug for dem.

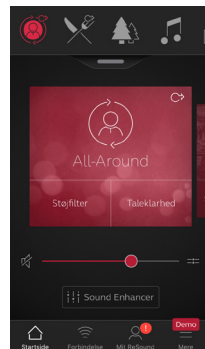

Hurtigknapperne vises i det røde felt lige under programnavnet.

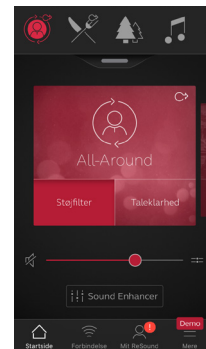

I allround-programmet kan du vælge mellem Støjfilter og Taleklarhed.


Hvis du trykker på en hurtigknap vil den være aktiveret, indtil du klikker på den igen.




Sound Enhancer: Gør din lyd personlig

Sound Enhancer lader dig finjustere bas, mellemtone, diskant, støjrreduktion, talefokus og reduktion af vindstøj.

Hvor meget du kan justere med Sound Enhancer varierer efter program, - afhængigt af din tilpasning. Støjreduktion, talefokus og reduktion af vindstøj er kun tilgængelige i ReSound LiNX 3D 9 og ReSound ENZO 9. Bas, mellemtone og diskant er tilgængelige i alle ReSound LiNX 3D og ReSound ENZO 3D høreapparater.

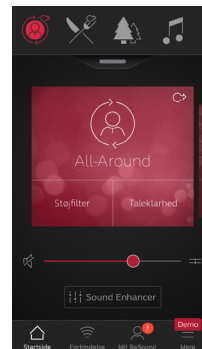

Åbn Sound Enhancer fra bunden af startskærmen.

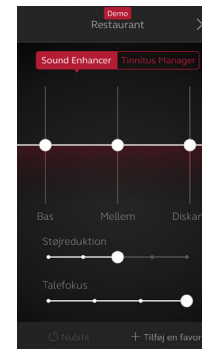


Et billede af Sound Enhancer med alle de mulige funktioner.

Flyt skyderne for at interagere med hver funktion og foretage justeringer.

Når du interagerer med en af funktionerne, vil skærmen kun fokusere på den funktion. Se næste side.

Tryk på nulstil for at vende tilbage til tilpassede indstillinger.

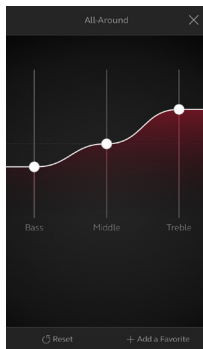

Bas, mellemtone og diskant


Forøg eller reducer bas-, mellemtone- og diskantfrekvenser.

Indstillingerne gælder også for den streamede lyd.




Sådan gemmer du dine indstillinger?

Du kan gemme de indstillinger, som du kan lide som Favoritter. Hvis du ikke gemmer dem, vil indstillingerne forblive aktive, indtil du genstarter høreapparaterne (åbner og lukker batteridøre).

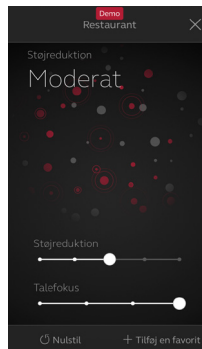


Støjreduktion

Indstil støjniveauet fra fuld bevidsthed om omgivelser til fokuseret hørelse.

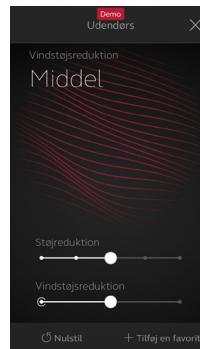

Reduktion af vindstøj

Justér og fjern vindstøj for maksimal lyttekomfort i blæsende omgivelser.

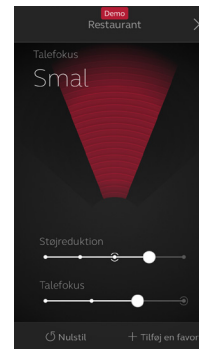

Talefokus

Vælg, hvad du vil lytte til, ved at ændre bredden på keglen.

Hvis høreapparaterne er indstillet til automatisk fokus, vil talefokus skifte til manual indstilling. Flyt skyderen helt til højre for at vende tilbage til automatisk brug.




Optimere talefokus

Når du justerer talefokus, så prøv samtidig støjreduktion for at få maksimal effekt.




Tinnitus Manager

Tinnitus Manager fås til ReSound LiNX 3D og ReSound ENZO 3D. Dens funktioner vil være tilgængelige i appen, hvis Tinnitus Sound Generator (TSG) er blevet aktiveret i et eller flere af dine programmer af din høreapparatspecialist.

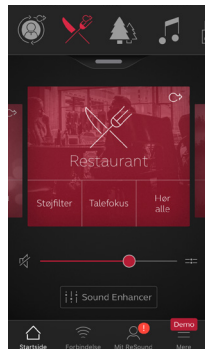

Der vises et lille ikon i øverste højre hjørne af programmet, hvis du har TSG. Hvis du går til menuen Sound Enhancer fra et af disse programmer, vil du se, at Tinnitus Manager er tilgængelig.

🏠 Du vil have adgang til følgende i appen

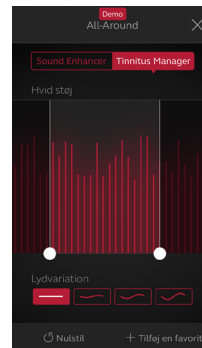

Hvis du har et program med hvid støj


Tonehøjde

Juster tonehøjden ved at flytte de to skydere til højre og venstre.

Lydvariation

Tilpas variationen af den hvide støj ved at trykke på knapperne nederst.

Tryk på nulstil for at vende tilbage til tilpassede indstillinger.

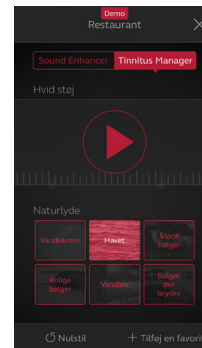

Hvis du har et program med en Nature Sound™


Vælg mellem seks naturlyde i høreapparatet.

Du kan også aktivere input af hvid støj på play-knappen og justere tonehøjde.

i Sådan kan du gemme dine indstillinger?

Du kan gemme de indstillinger, som du kan lide som Favoritter. Hvis du ikke gemmer dem, vil indstillingerne forblive aktive, indtil du genstarter høreapparaterne (åbner og lukker batteridørene).

🏠 Favoritter

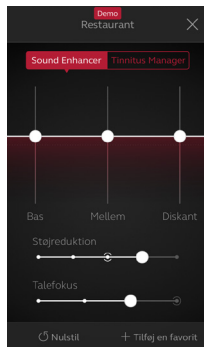


Tilføj en Favorit

Du kan gemme dine foretrukne lydindstillinger som en Favorit.

Tryk på **Tilføj en favorit** nederst i Sound Enhancer eller programoversigten.

Ændringer af lydindstillinger kan gemmes som en ny Favorit eller for at opdatere en eksisterende Favorit.

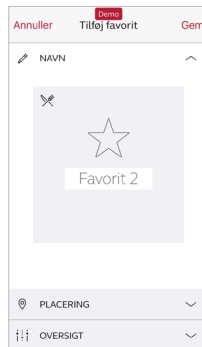


Navn

Start med at navngive din Favorit.



Sådan ser du dine Favoritter?


For at se dine Favoritter skal du trykke på **OVERSICHT** nederst på skærmen. Du kan gøre dette, når du tilføjer en Favorit, eller hvis du er i redigeringstilstand.

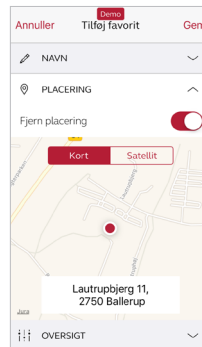

Sted

Du kan også vælge at tilføje et sted til en Favorit.

Du kan vælge, at få høreapparaterne til automatisk at skifte til Favoritten, når du kommer til det pågældende sted.

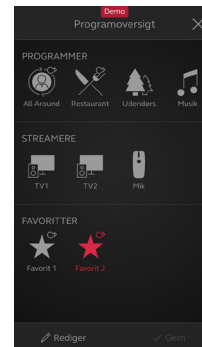

Oversigt


Når du har gemt din Favorit, vil den blive tilføjet til programmets navigationsmenuer.

For at redigere en aktiv Favorit skal du trykke på rediger nederst i programoversigten. Tryk derefter på Favoritten. Rediger navn og sted eller tryk på slet nederst på skærmen.

For at slette alle Favoritter skal du blot trykke på **Slet favoritter** nederst i programoversigten efter at have trykket på **Rediger**.

☰ Status

Forbindelse og batteristatus

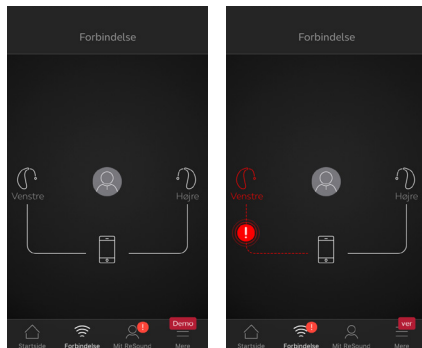

Forbindelsesstatus


Viser status på forbindelsen mellem høreapparater, streamingenhed og mobilenhed. Hvis du har et Apple Watch forbundet, vil det også blive vist.

Hvis du ser en rød linje med et udråbstegn, betyder det, at forbindelsen mangler eller er afbrudt.




Har du mistet forbindelsen?

Hvis du mister forbindelsen, kan du trykke på udråbstegnet for at få mere information om, hvordan forbindelsen kan genetableres. Det er en god ide at kontrollere, at dine høreapparater er tændte, er inden for telefonens rækkevidde og har tilstrækkelig batterispænding. Du kan også åbne og lukke batteridøren, hvis forbindelsen ikke genoprettes med det samme.

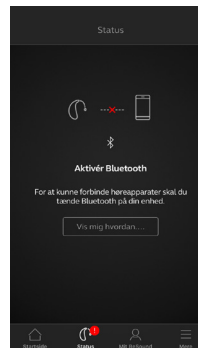

Bluetooth er slået fra

Bluetooth skal være slået til, hvis du skal bruge appen sammen med høreapparaterne. Hvis den er slået fra, så kommer der en besked i appen om, at du skal slå den til.

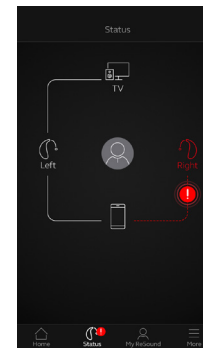

Advarsel om lav batterispænding

Hvis batteriet på et eller begge høreapparater er ved at være opbrugt, vises der et rødt batteri ved siden af høreapparatet(erne).




ReSound Assist: Finjustering af dine høreapparater, uanset hvor du er

Hvis du har brug for mere finjustering end ReSound Smart 3D appen tilbyder, kan du bruge ReSound Assist for at få mere hjælp fra din høreapparatspecialist. Med ReSound Assist kan du sende en anmodning om hjælp med dine høreapparatinstillinger til din høreapparatspecialist, og du kan modtage nye indstillinger i appen, som du selv kan installere i dine høreapparater.

Bemærk at adgang til ReSound Assist kræver følgende:

- En eller flere af dets funktioner er blevet aktiveret for dig af din høreapparatspecialist

Anmod om hjælp

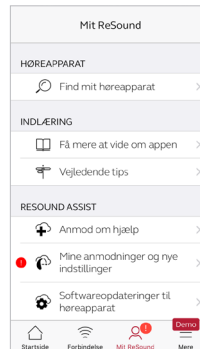


Mit ReSound

Gå til **Mit ReSound** i den nederste menu for at finde **ReSound Assist**. Tryk på **Anmod om hjælp** for at kontakte din høreapparatspecialist. Derefter skal du blot følge proceduren som vist i de følgende trin.

 Afprøv dine egne indstillinger i ReSound Smart 3D appen først. Brug kun ReSound Assist hvis du oplever tilbagevendende problemer, eller har brug for mere justering end appen kan give dig.

Trinnene vedrørende ReSound Assist i denne vejledning er eksempler fra proceduren i ReSound Smart 3D appen.

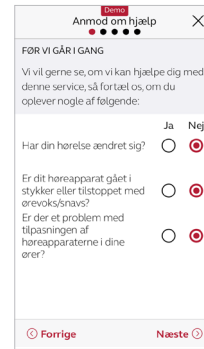

Før vi starter


Vi stiller dig nogle få spørgsmål om din hørelse og dit høreapparat, inden vi starter. Det er for at tjekke om denne tjeneste kan hjælpe dig.

Det er vigtigt, at du ikke tror, at din hørelse måske er ændret, - f.eks.

at den er blevet forværret. Hvis du kan svare "Nej" til alle spørgsmålene, så tryk på **Næste** for at fortsætte.

Definer dit problem og send anmodning

I de følgende trin skal du blot markere dine svar, så de stemmer overens med din oplevelse. Desto mere input du giver, desto bedre kan din høreapparatspecialist hjælpe dig.

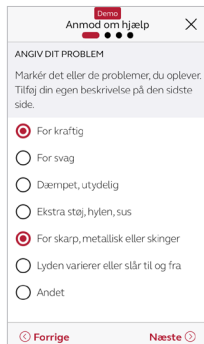

ANGIV DIT PROBLEM

Markér det eller de problemer, du oplever. Tilføj din egen beskrivelse på den sidste side.

- ☒ For kraftig
- ☐ For svag
- ☐ Dæmpet, utydelig
- ☐ Ekstra støj, hyl, sus
- ☒ For skarp, metallisk eller skinger
- ☐ Lyden varierer eller slår til og fra
- ☐ Andet

⏮ Forrige Næste ⏭



HVLKEN SIDE ER PROBLEMET PÅ?

⬅ Venstre ⬅ Begge ➡ Højre

HVLKE(T) PROGRAM(MER)

Alle programmer

- All-Around
- Restaurant
- Udendørs
- Musik
- TV1
- TV2

⏮ Forrige Næste ⏭

Udfyld oplysningerne om dig selv

I det første trin, som er vist her, kan du vælge **Andet**, hvis ingen af de tilgængelige valgmuligheder beskriver din oplevelse. Du kan tilføje en personlig meddelelse i det sidste trin.

I det andet trin skal du fortælle din høreapparatspecialist, hvor alvorligt du finder problemet, hvilket øre det er på, og i hvilke programmer du oplever det.



OVERSIGT

- For kraftig
- For skarp, metallisk eller skinger
- Hele tiden
- Irriterende
- Side: Begge
- Restaurant

OVERSKRIFT PÅ ANMODNING

For kraftig


PERSONLIG MEDDELELSE

Skriv din besked...

⏮ Forrige Send anmodning

Send anmodning

Tryk på **Send anmodning** når du er klar. Sørg for, at dine høreapparater er forbundet til appen, når du sender, da dine aktuelle høreapparatindstillinger inkluderes i anmodningen. Sørg også for, at din mobilenhed har en netværksforbindelse.

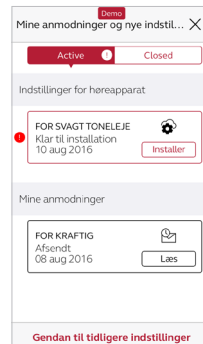

Mine anmodninger og nye indstillinger

Active Closed

Indstillinger for høreapparat

FOR SVAGT TONELEJE
Klar til installation
10 aug 2016

Installer

Mine anmodninger

FOR KRAFTIG
Afsendt
08 aug 2016

Læs

Gendan til tidligere indstillinger


Visning af anmodninger

For at se dine tidligere anmodninger og svar fra din høreapparatspecialist skal du gå til **Mit ReSound** og trykke på **Mine anmodninger og nye indstillinger**. Lister over aktive og lukkede anmodninger vil være tilgængelige. Tryk på en af dem for at se mere.



Efter at du har sendt anmodningen, vil du modtage en bekræftelse fra din høreapparatspecialist. Bekræftelsen vil fortælle dig, hvornår du kan forvente at modtage nye indstillinger eller en svarmeddelelse.


Modtag de nye høreapparatindstillinger

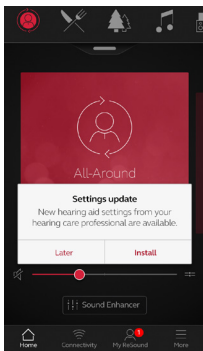

Besked

Du får besked i appen, når din høreapparatspecialist sender de nye høreapparatindstillinger. Tryk på **Installer** for at få de nye indstillinger ind i høreapparatet nu eller **Senere** for at udføre installationen, når det passer dig bedre.




Hvis du trykker på **Senere**, vil et meddelelsesbadge i **Mit ReSound** i menuen minde dig om at udføre installationen. Gå til menuen for at installere.

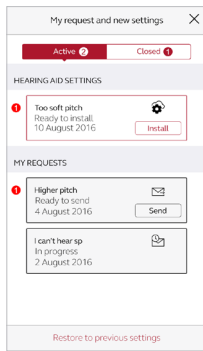

Starte installationen

Nye høreapparatindstillinger placeres som det første på skærmen. Tryk på **Installer** for at begynde. Installationen tager omkring 1 min.

Din høreapparat-specialist kan inkludere en besked til dig for at forklare, hvad der er inkluderet i de nye indstillinger.

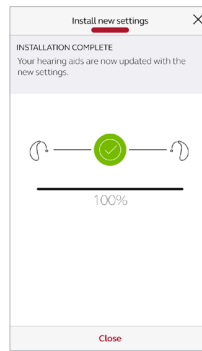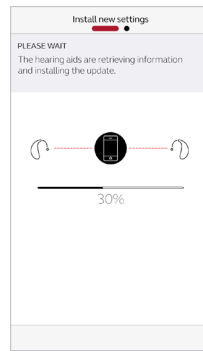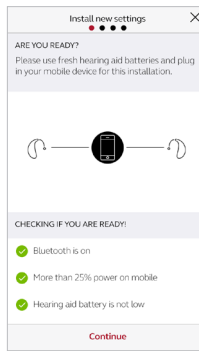

Installere de nye høreapparatindstillinger

I de følgende trin dobbelttjekker appen, at dine høreapparater og din mobilenhed er klar. Bemærk at høreapparaterne vil slukke under installationen.


Du kan følge installationens fremskridt. Det grønne flueben fortæller dig, når den er færdig. Tryk på **Luk**, og afprøv dine nye høreapparatindstillinger.



Hvis du af en eller anden grund ønsker at gendanne dine tidligere indstillinger efter at have installeret de nye, skal du gå til **Mit ReSound** og trykke på **Mine anmodninger og nye indstillinger**. Muligheden for at gendanne tidligere indstillinger er tilgængelig for nede, og du skal blot følge proceduren.

Vurder min lyd


Et par dage efter du har fået tilpasset eller finjusteret dine høreapparater, vil appen bede dig om at vurdere dine lydindstillinger. Din vurdering sendes direkte til din høreapparat. Hvis du ikke er tilfreds med dine lydindstillinger, kan din høreapparatspersonale derefter justere dem for dig.

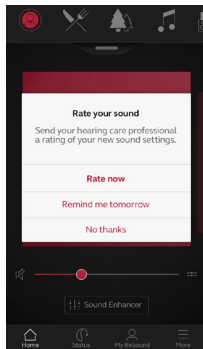

Notifikation

Du modtager en notifikation, der beder dig om at bedømme lydindstillingerne. Notifikationen kommer enten på din mobile enhed eller direkte i appen.

Hvis du trykker på ‘’; vil du modtage en ny notifikation dagen efter. Du kan også gå til Min ReSound og vurdere lyden under ‘Vurder min lyd’.

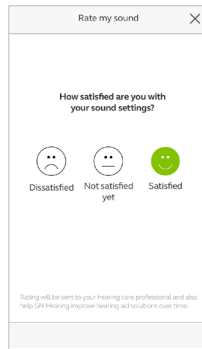


Vurdering

Vurder dine lydindstillinger med en af disse tre muligheder:

- Tilfreds
- Ikke tilfreds
- Utilfreds


Du kan kun vurdere lydindstillingerne en gang.

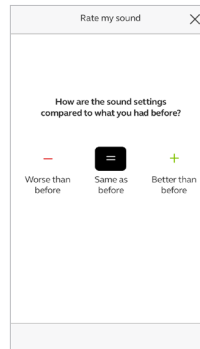

Sammenligning

Hvis dine lydindstillinger er blevet finjusteret vil appen bede dig om at sammenligne de gamle indstillinger med de nye. Er de:

- Bedre end før
- Samme som før
- Værre end før

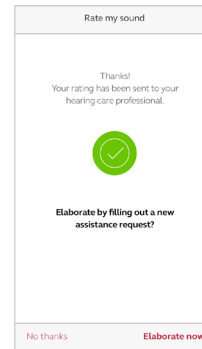

En ny forespørgsel


Hvis du har angivet ‘Utilfreds’ eller ‘Ikke tilfreds’, vil appen bede dig om at forklare hvorfor.

Forklaringen hjælper din høreapparatspecialist med at finjustere dine indstillinger.



Opdater softwaren i høreapparaterne


ReSound Assist tilbyder også at updatere softwaren i dine høreapparater. Når du opdaterer softwaren i dine høreapparater forbedres ydeevnen. Du kan opdatere softwaren direkte i ReSound Smart 3D app.

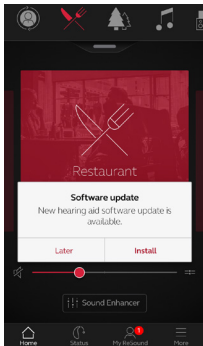

Notifikation

Når en software-opdatering er klar, modtager du en notifikation enten i din mobile enhed eller direkte i appen. Tryk på 'Installer' for at opdatere med det samme eller 'Senere', hvis det er mere bekvemt for dig.




Hvis du trykker på 'Senere', kommer der en ny notifikation i Mit ReSound, der vil minde dig om opdateringen.

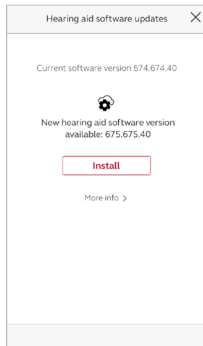

Information

Du vil se, hvilken ny softwareversion der er tilgængelig til dine høreapparater. Der vil også være en besked, der forklarer, hvad opdateringen indeholder.

Bemærk, at høreapparaterne slukker for lyden under installationen.

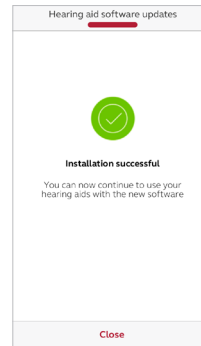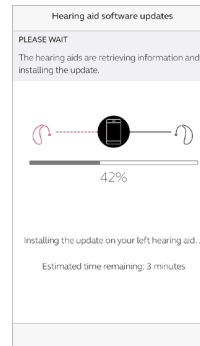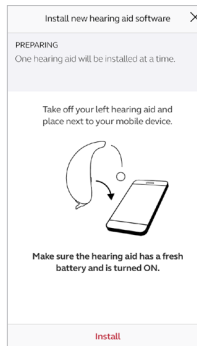

Installation af ny software

Appen leder dig gennem de forskellige installationstrin. Så hold øje med enhederne under installationen.


Du kan følge udviklingen gennem hele installationen. De grønne markeringer fortæller dig, hvornår installationen er færdig. Tryk på 'Luk', og du er færdig med installationen.



Installer den nye software, når det passer dig. Det tager ca. 5 minutter pr. høreapparat, så det er vigtigt, at du har tid. Det anbefales, at afslutte installationen, når den først er startet.

Gode råd

ReSound Smart 3D appen tilbyder gode råd for at hjælpe dig med at få en bedre høreoplevelse. De gode råd vises i appen i løbet af de første uger, du går med høreapparat og bruger appen. Du vælger selv, om du vil modtage gode råd - appen vil spørge dig.

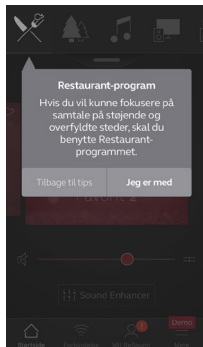

Erfaren bruger

Hvis du er en erfaren høreapparatbruger, vil du modtage gode råd om, hvordan du bruger appen.

Disse råd vil fremhæve forskellige funktioner i appen, hvis du ikke allerede har brugt dem.

Tryk på **Jeg er med**, når du har læst rådet. Tryk på **Vis ikke tips**, hvis du ikke længere vil have vist rådene.




Ny bruger

Hvis du er ny høreapparatbruger, eller du bare gerne vil vide mere, vil du modtage gode råd om brug af appen samt generel hørevejledning.

Råd om generel hørevejledning omfatter råd om, hvordan du vænner dig til at bruge høreapparater, og hvad du kan gøre for at opnå det bedste resultat.

Lær om appen

For at lære mere om hvordan appen virker, skal du gå til **Få mere at vide om appen** i menuen **Mit ReSound**. Udforsk appen og hvad du kan gøre i den afsnit for afsnit.

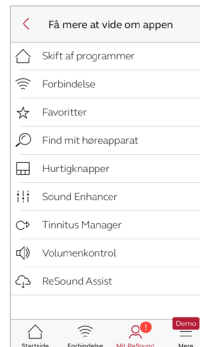

Oversigt

Den komplette liste over punkter som du kan udforske for at lære mere om appen.




Eksempel: Skift af program

Lær hvordan du skifter programmer ved at stryge på kortene på startskærmen.

Find mit høreapparat

Hvis du har mistet dine høreapparater, så gå til **Mit ReSound** og tryk på **Find mit høreapparat**. Appen kan hjælpe dig med at finde dem.

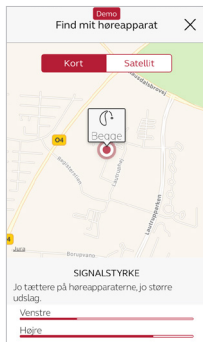

Sidste sted

Kortet vil vise, hvor høreapparaterne sidst blev set forbundet til appen. Tryk på ikonet med høreapparaterne for at se adressen og tidspunktet, hvor de sidst blev set. Du kan skifte mellem kort- og satellitvisning.

Appen skal være aktiv i baggrunden, for at denne feature kan bruges.

Søg tæt på

Hvis appen finder høreapparaterne tæt på, vil den vise dig, om du nærmer dig eller fjerner dig fra dine høreapparater. Se efter indikationen på de røde bjælker nederst på skærmen.

For at kunne bruge denne funktion skal høreapparaterne være tændte.

≡ Mere

Flere muligheder med app



Anvendelse: Brugertilpasset app

1. Demo-tilstand: vis appen uden at være forbundet til høreapparater.
2. Vejledende tip: slå til eller fra.
3. Automatisk aktivering af favoritsteder: Vælg om du vil have dine Favoritter til automatisk at skifte til de steder, du har gemt.

Generelle oplysninger

1. Om: Læs om appen og ReSound-brandet
2. Juridiske oplysninger: Se næste skærm
3. Support: Find råd og links til yderligere support



Juridiske oplysninger

1. Juridisk information om producent, nummeret på appens version osv.
2. Vilkår og betingelser for brug af appen.
3. GN Online Services: Gennemgå, giv eller tilbagetræk samtykke til databehandling.
4. Fortrolighedspolitik.



ReSound Smart 3D app til Apple Watch

Styr de mest intelligente høreapparater direkte fra dit håndled.



Du skal bruge

ReSound Smart 3D appen skal være installeret på din iPhone. Følg anvisningerne i appen, der følger med Apple Watch, på din iPhone.


Sådan får du ReSound Smart 3D appen på dit Apple Watch

Sådan får du appen på Apple Watch

- Åbn Apple Watch appen på din iPhone.
- Rul ned, indtil du ser "Smart 3D" på din liste over apps. Tryk på den.
- Tryk på **Vis app på Apple Watch**.
- Du vil se, at ReSound Smart 3D appen bliver tilgængelig på dit Apple Watch.

Menuen mere

- Når dit Apple Watch og din iPhone er parrede, er der yderligere Watch-indstillinger tilgængelige fra menuen mere.
- Funktionen Sound Enhancer skal aktiveres specifikt i denne menu for at kunne se dem på Watch.

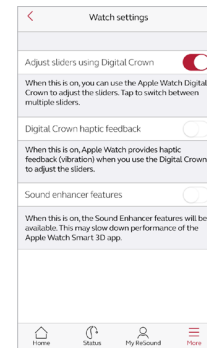

Aktivér Komplikationer

- Du kan også bruge ReSound Smart 3D appen **Komplikationer**. Disse er små kontrolikoner, som vises på hovedskærmen på Apple Watch. De vil vise dig det aktuelle program, og vil tage dig direkte til appen med et simpelt tryk.
- Du kan aktivere komplikationer ved at brugertilpasse forsiden på Apple Watch. Dette gøres ved at give et langt tryk på forsiden af Watch og vælge **Brugertilpas**.




- De små firkantede områder er Komplikationer. Vælg en komplikation og brug skyderen til at navigere til ReSound komplikationsikonet.




Du kan også bruge den digitale skive på Apple Watch til volumenjusteringer, når du er på startskærmen. I streamingprogrammer skal du trykke på streamingbjælken for at justere den med den digitale skive.

Startskærm

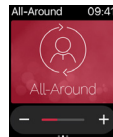

Startskærmen viser dig det aktuelle program.


Programmer og favoritter

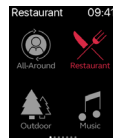

Programoversigt


Stryg til højre fra startskærmen for at se programoversigten. Tryk på et af programikonerne for at vælge et program. Rul ned for at vælge mellem høreapparatprogrammer, streamingprogrammer og dine egne favoritter. Du kan oprette nye favoritter på ReSound Smart 3D appen på din iPhone.

Volumenkontrol

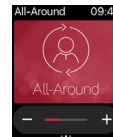

Volumenkontrol af høreapparat


Tryk på + eller - ikoner for at skrue op eller ned for lydstyrken i høreapparatet. Tryk hårdt på skærmen for at slå lyden til og fra høreapparaterne.

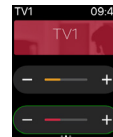

Streamer volumenkontrol

Hvis du har en trådløs streamer tilkoblet, kan du indstille lydstyrken forskelligt ved hjælp af den orange volumenskyder. Du kan også slå lyden til og fra streaming ved at trykke hårdt.

Hurtigknapper og Sound Enhancer

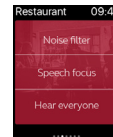


Stryg til venstre fra startskærmen for at finde hurtigknapper og Sound Enhancer. Justér alle Sound Enhancer-funktioner ved at trykke på + og - ikonerne. Tryk hårdt for at nulstille til de tilpassede indstillinger.


Komfort i støj




Talefokus

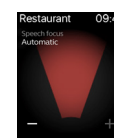

Komfort i vind

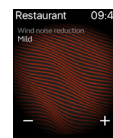

Bas og diskant

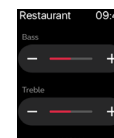



Stream lyd fra din Android-telefon

Stream fra din Android-telefon til dine ReSound Smart høreapparater med ReSound telefonclip+

Når dine Smart høreapparater er parret og forbundet med ReSound telefonclip+, kan de modtage streamet stereolyd fra din Android-telefon.

Du skal blot åbne medieafspilleren på din telefon og trykke på play. Dine høreapparater vil skifte til streamingprogrammet, og efter nogle få sekunder vil du høre lyd.

Parring af ReSound telefonclip+ med din Android-telefon


- Gå til telefonens indstillinger og sørg for at Bluetooth er slået til
- Tænd for ReSound telefonclip+, tag den sølvfarvede hætte af og find den lille blå Bluetooth parringsknap
- Tryk på knappen en gang for at aktivere Bluetooth parringstilstand. LED-indikatoren bliver blå og telefonclip+ vil være i Bluetooth parringstilstand i 2 minutter
- Efter nogle få sekunder skal du vælge **Hearing Aid Phone** fra listen over tilgængelige Bluetooth-enheder på din telefon
- Hvis du bliver bedt om en adgangskode, skal du indtaste **0000** (fire nuller) og derefter vælge **Headset**

Parring af ReSound telefonclip+ til dine høreapparater

- Åbn høreapparatets batteridør
- Tænd for ReSound telefonclip+, tag den sølvfarvede hætte af og find den lille hvide høreapparat parringsknap
- Tryk på knappen for at aktivere høreapparatets parringstilstand. LED'en vil blinke gult hver 2 sekunder og telefonclip+ vil være i parringstilstand i 20 sekunder.
- Luk batteridørene på høreapparaterne.

For yderligere oplysninger om ReSound telefonclip+ henvises til brugervejledningen, instruktionsvideoen eller et besøg på www.resound.com/wirelessconnectivity

Try more apps from ReSound

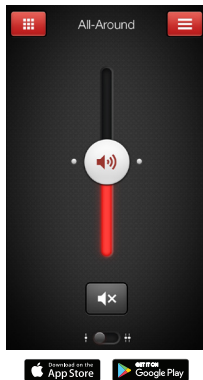

ReSound Smart™



The ReSound Smart app puts basic controls and more advanced features at your fingertips so you can personalize your hearing experience.

The ReSound Smart app* is the first hearing aid app with a direct connection between your hearing aids and the mobile phone.

resound.com/smartapp


*Dependent on local availability.

The ReSound Smart app is compatible with the following ReSound Smart Hearing aids:

- ReSound LiNX²™
- ReSound LiNX™
- ReSound LiNX TS
- ReSound ENZO²™
- ReSound ENZO™
- ReSound Up Smart™



Try more apps from ReSound

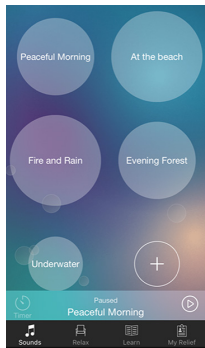

ReSound Relief™




If you suffer from tinnitus, you might like to try the ReSound Relief app*.

It combines relaxing sounds and exercises that aim to help you find relief from tinnitus.

resound.com/reliefapp

*Dependent on local availability.

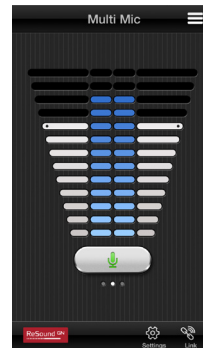

ReSound Control™



Don't forget to download the ReSound Control app* if you are using wireless ReSound hearing aids with a Phone Clip+.

The app enables you to change programs and adjust volume.

resound.com/control

*Dependent on local availability.

Se resound.com/smart3Dapp for yderligere oplysninger og en
brugsanvisning til ReSound Smart 3D™ appen.

GN Hearing Danmark A/S

Lautrupbjerg 7

2750 Ballerup

Tlf.: 45 75 22 22

www.gnhearing.dk

© 2017 GN Hearing A/S. Alle rettigheder forbeholdes. ReSound er et varemærke, der tilhører GN Hearing A/S. Apple, Apple logoet, iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, watchOS, CarPlay og AirPlay er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Android, Google Play, Google Play logoet og YouTube er varemærker, der tilhører Google Inc. Bluetooth ordmærket og logoer er registrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc.

