


# NoWax vahasuojan vaihto

- 1** Ota uusi työväline kiekosta.
- 2** Irrota vanha vahasuoja kuulokojeesta työvälineen poisto-osalla. Paina poisto-osa kuulokojeessa olevaan vanhan vahasuojan sisään.
- 3** Aseta uusi vahasuoja kuulokojeeseen.
- 4** Heitä käytetty työväline pois.

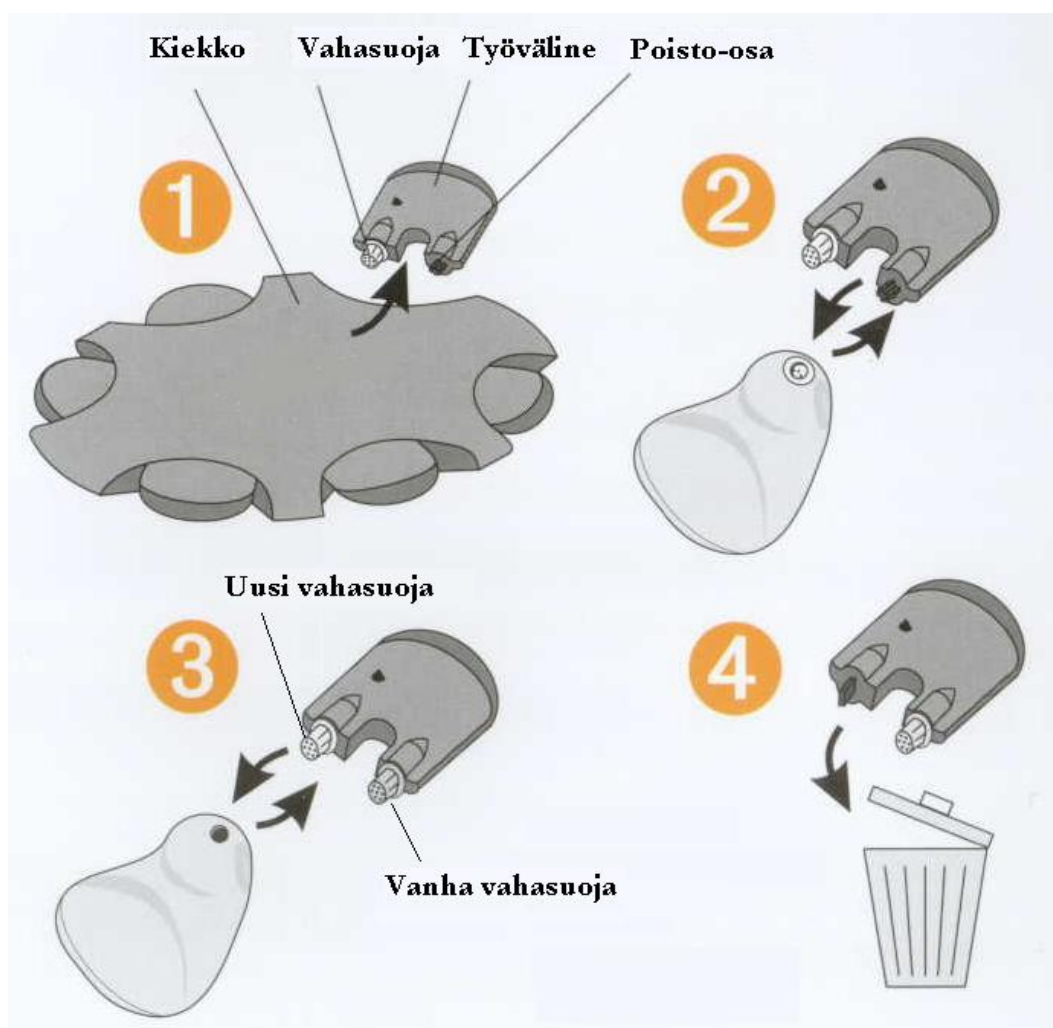

# Byte av NoWax vaxfilter

- 1** Tag ett nytt verktyg ur kassetten.
- 2** Lösgör det gamla filtret genom att trycka in lösgöringsänden på verktyget i filtret.
- 3** Tryck in det nya filtret i hörapparaten.
- 4** Släng bort det använda verktyget.

