


RESOUND VAHASUOJAN VAIHTAMINEN


VANHAN VAHASUOJAN IRROTUS:

1. Kuulokoje painetaan suodatinkieken keskellä olevaan reikään, jolloin vanha vahasuoja irtoaa kuulokojeesta. Pidä kiekko pöydän päällä koko vaihdon ajan. (Vahasuojan voi poistaa myös sormin/kynsin.)
2. Kun koje vedetään ylös suodatinkiekosta, jää vanha vahasuoja kiekon sisälle.

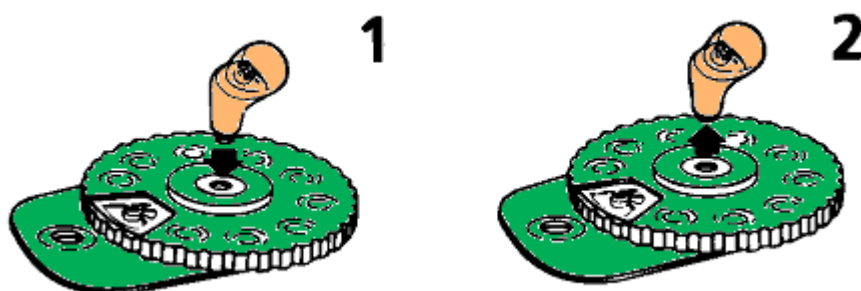

UUDEN VAIHASUOJAN KIINNITYS:


3. Kieken yläosaa kierretään, kunnes kiekon kehässä olevaan reikään ilmestyy uusi suodatin. Koje painetaan vahasuojaan kohtisuoraan alas.
4. Kun koje vedetään ylös, on uusi vahasuoja paikallaan.

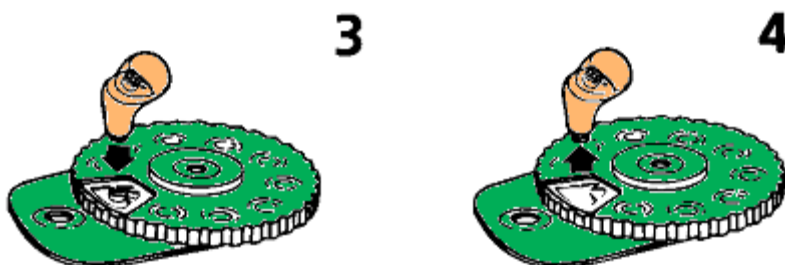

BYTE AV RESOUND VAXFILTER

SÅ HÄR AVLÄGSNAS DET GAMLA FILTRET:

1. Tryck ner hörapparaten i hålet i mitten av vaxfilterhjulet så att det gamla filtret lossnar. Håll filterhjulet på en plan yta (t.ex. en bordsskiva) för att underlätta bytet.
2. När hörapparaten lyfts upp blir det gamla filtret kvar inne i filterhjulet.

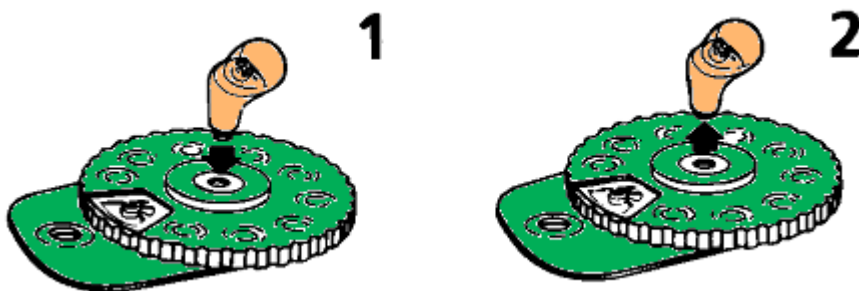

SÅ HÄR FÄSTER MAN ETT NYTT FILTER:

3. Rulla på filterhjulet tills man i öppningen kan se ett nytt filter. Tryck ner hörapparaten i filtret så rakt som möjligt.
4. När hörapparaten lyfts upp, sitter det nya filtret på plats. Vid behov kan man ännu trycka fast det med fingret för att försäkra sig om att det sitter säkert.

