




## WaxBuster- vahasuojan käyttöohje



1. Paina kuulokoje pöydällä olevaa pehmeää paperia vasten niin, että vahasuojan valkoinen osa painuu sisään.

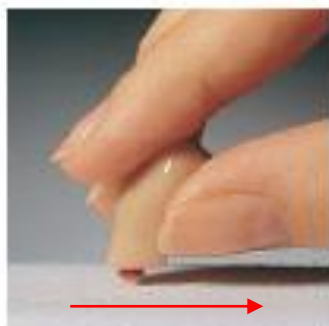

2. Vedä kojetta niin, että vahasuojan valkoinen osa pysyy kokoajan sisällä.



3. Nosta kuulokoje irti puhdistuspinnasta, jolloin vaha ym. muu lika jää puhdistuspintaan.


Vahasuoja on puhdistettu.



## WaxBuster bruksanvisning



1. Lägg ett mjukt papper på bordet och tryck hörapparaten mot det, så att den vita delen av vaxfiltret trycks in.

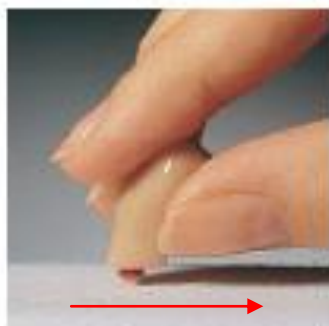

2. Dra hörapparaten längs pappret med den vita delen av vaxfiltret intryckt hela tiden.



3. Lyft upp hörapparaten varvid öronvaxet blir kvar på pappret.  
Vaxfiltret är nu rengjort.