



WIRELESS-VERBINDUNG

ReSound Micro Mic Kurzanleitung

– ERSTE SCHRITTE



resoundpro.com

ERSTE SCHRITTE

(Laden Sie das Micro Mic vor Gebrauch auf)

1. Um das Micro Mic anzuschalten, **drücken** Sie die Power-Taste **A** am vorderen Ende des Mikrofons, bis die Statusleuchte **B** grün blinkt.
2. Um Ihre Hörsysteme zu verbinden, **halten** Sie die Programmwahltaste **an Ihren Hörsystemen** gedrückt, bis sie eine Melodie hören. Prüfen Sie die Verbindung, indem Sie über das Micro Mic pusten bzw. leicht darauf tippen. Sie sollten dies in Ihren Hörsystemen hören. Falls nicht, schauen Sie nach Lösungen in unserer Fehlerbehebungsanleitung auf der Rückseite.
3. Um das Micro Mic Streamingprogramm zu verlassen, drücken Sie den Programmwahltaster an Ihren Hörsystemen und sie werden in das zuletzt genutzte Programm wechseln, welches Sie an der Anzahl der Signaltöne erkennen können.
4. Um das Micro Mic auszuschalten, halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis die Statusleuchte zunächst rot blinkt und schließlich erlischt.

B STATUSLEUCHE


- Die Statusleuchte blinkt einmal in der Sekunde, sobald das Micro Mic angeschaltet und geladen ist. Sie leuchtet orange, wenn weniger als 30 Minuten Betriebszeit bleiben.

C LAUTSTÄRKEREGELUNG

Nutzen Sie die beiden seitlichen Knöpfe um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie "+" um die Lautstärke zu erhöhen und "-" um sie zu verringern. Jede Veränderung der Lautstärke wird Ihnen über ein Aufleuchten der Stummschalt-/Lautstärke-LED **E** angezeigt.

D STUMMSCHALTEN

Um das Mikrofon stummzuschalten, drücken Sie den mittleren Knopf. Nun wird die Stummschalt-/Lautstärke-LED **E** jede Sekunde einmal orange blinken. Um das Mikrofon wieder laut zu schalten, drücken Sie selbigen nochmal.

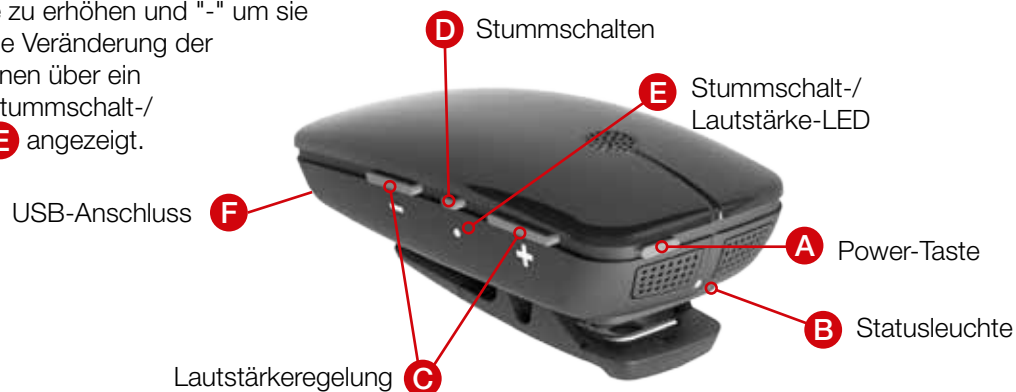

F AUFLADEN

- Stecken Sie das Aufladekabel in den microUSB-Anschluss des Micro Mics.
- Der Ladestatus kann am Leuchtmuster der Status-LED erkannt werden:



Ladestatus	Wird aufgeladen	Voll geladen
Ausgeschaltet		
Angeschaltet		

HÖRSYSTEME UND MICRO MIC VERBINDEN

(Ihr Hörakustiker wird Ihnen dabei helfen)

1. Halten Sie die Power-Taste des Micro Mics gedrückt, bis die Statusleuchte grün blinkt. Das Micro Mic ist nun eingeschaltet.
2. Sie finden den Paarungsknopf unterhalb des Paarungszeichens (📶) auf der Rückseite des Micro Mics. Falls Sie dieses nicht finden, versuchen Sie den Clip zu drehen.
3. Wenn Sie den Paarungsknopf drücken (Nutzen Sie einen Kugelschreiber o. Ä.), blinkt die Statusleuchte orange.
4. Binnen der nächsten 20 Sekunden öffnen und schließen Sie die Batteriekappen Ihrer Hörsysteme.

Eine erfolgreiche Paarung können Sie an einer abgespielten Tonfolge in Ihren Hörsystemen und an einem 2 sekündigen orangen Aufblinken der




Statusleuchte erkennen. Statusleuchte erkennen.

Hinweis: Die Hörsysteme müssen sich im Micro Mic Streamingprogramm befinden, um Signale von diesem empfangen zu können.

Das Micro Mic sendet Sprachsignale direkt in Ihre Hörsysteme. Es kann an der Kleidung des Sprechers befestigt, an ein Band gehangen oder auf dem Tisch platziert werden.

Das Sprachverstehen kann durch das Micro Mic deutlich verbessert werden, das Sie es sehr viel näher am Mund des Sprechers, als die Hörsysteme platzieren können.

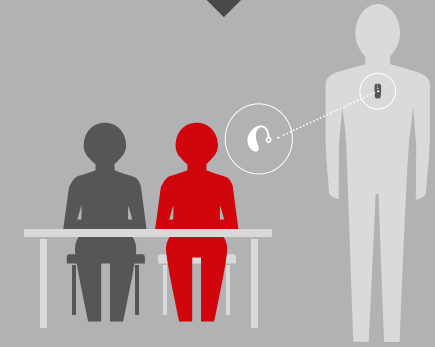

FEHLERBEHEBUNGSANLEITUNG - KEINE VERBINDUNG

1. **Überprüfen Sie die Statusleuchte.** Wenn sie nicht alle 2 Sekunden grün aufleuchtet, versuchen Sie die Power-Taste gedrückt zu halten, bis Sie ein grünes Licht sehen. Falls sie rot leuchtet und sich das Gerät abschaltet, muss es aufgeladen werden. Blinkt sie orange, sollte das Mikrofon bald aufgeladen werden.
2. **Überprüfen Sie die Stummschalt-/Lautstärke-LED,** wenn sie orange leuchtet, ist das Mikrofon stumm geschaltet und kein Signal wird an die Hörsysteme gesendet. Drücken Sie die Stummschalttaste, um die Übertragung fortzusetzen.
3. **Überprüfen Sie den Batteriestatus Ihrer Hörsysteme:** Tauschen Sie die Hörerätebatterien. Manchmal reicht die

Leistung einer Batterie für das Streamen nicht aus, obwohl sie für den normalen Hörsystemgebrauch weiterhin genutzt werden kann.

4. **Wenn mehrere Streaming-Komponenten verknüpft sind:** Wenn Sie einen Audio Beamer oder weitere Wireless-Komponenten mit Ihren Hörsystemen verknüpft haben
 - Versuchen Sie das Programm zu wechseln, bis Sie im Kanal des Micro Mics sind.
 - **Paaren Sie das Micro Mic erneut mit Ihren Hörsystemen** mit Hilfe der obigen Anleitung.

GN ReSound weltweit

ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Dänemark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com
CVR Nr. 55082715

Deutschland

GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
D-48157 Münster
Tel.: +49 251 - 20 39 6-0
Fax: +49 251 - 20 39 6-250
info@gnresound.de
www.resound.com

Österreich

GN ReSound
Hörtechnologie GmbH
Wimberggasse 14-16
A-1070 Vienna
Tel.: +43 1 524 54 000
Fax: +43 1 523 00 54
info@gnresound.at
www.resound.com

Schweiz

GN ReSound AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Tél.: +41 (0)44 722 91 11
Fax: +41 (0)44 722 91 12
info@gnresound.ch
www.resound.com

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die mitgelieferte Bedienungsanleitung.