



WIRELESS-VERBINDUNG

ReSound Multi Mic Kurzanleitung

– ERSTE SCHRITTE



resoundpro.com

B STATUSLEUCHE

- Die Statusleuchte blinkt einmal in der Sekunde, sobald das Multi Mic angeschaltet und geladen ist. Sie leuchtet orange, wenn weniger als 30 Minuten Betriebszeit bleiben

C LAUTSTÄRKEREGELUNG

Nutzen Sie die beiden seitlichen Knöpfe um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie "+" um die Lautstärke zu erhöhen und "-" um sie zu verringern. Jede Veränderung der Lautstärke wird Ihnen über ein Aufleuchten der Stummschalt-/Lautstärke-LED **E** angezeigt.

D STUMMSCHALTEN

Um das Mikrofon stummzuschalten, drücken Sie den mittleren Knopf. Nun wird die Stummschalt-/Lautstärke-LED **E** jede Sekunde einmal orange blinken. Um das Mikrofon wieder laut zu schalten, drücken Sie selbigen nochmal..



ERSTE SCHRITTE

(Laden Sie das Multi Mic vor Gebrauch auf)

- Um das Multi Mic anzuschalten, **halten** Sie die Power-Taste **A** am vorderen Ende des Mikrofons gedrückt, bis die Statusleuchte **B** grün blinkt.
- Um Ihre Hörsysteme mit dem Multi Mic zu verbinden, **halten** Sie die Programmwahltaste **an Ihren Hörsystemen** gedrückt, bis Sie eine Melodie hören. Prüfen Sie die Verbindung indem Sie über das Multi Mic pusten bzw. leicht darauf tippen. Sie sollten dies in Ihren Hörsystemen hören. Falls nicht, schauen Sie nach Lösungen in unserer Fehlerbehebungsanleitung auf der Rückseite.
- Um das Multi Mic Streamingprogramm zu verlassen, drücken Sie die Programmwahltaste an Ihren Hörsystemen. Sie werden in das zuletzt genutzte Programm schalten. Dies können Sie an der Anzahl der gespielten Signaltöne erkennen.
- Um das Multi Mic auszuschalten, **halten** Sie die Power-Taste gedrückt, bis die Statusleuchte rot blinkt und ausgeht.



- F** Stecken Sie zum Aufladen das Aufladekabel in den USB-Anschluss des Multi Mics.
- Der Ladestatus kann am Leuchtmuster der Status-LED erkannt werden:



Power-/Ladestatus	Wird aufgeladen	Voll geladen
Ausgeschaltet		
Eingeschaltet		

MODUS WECHSELN:

Modi:

- Mikrofon
- Telefonspule **T**
- Line-in
- FM

1. Drücken Sie die Modustaste auf der Rückseite des Multi Mics. Die Modustaste neben dem zugehörigen Symbol wird aufleuchten. Drücken Sie die Modustaste innerhalb der nächsten 3 Sekunden nocheinmal, dann wechselt das Mic in den nächsten Modus.

- Wenn Sie einen Mini-Klinkenstecker oder einen FM-Empfänger anschließen, wird beim Anschalten des Geräts direkt der passende Modus ausgewählt. Der Line-In- und der FM-Modus können nur ausgewählt werden, wenn ein passendes Kabel bzw. Empfänger angeschlossen ist.
- Sie können in andere Modi wechseln, auch wenn ein Klinkenstecker oder FM-Empfänger angeschlossen sind, indem Sie die Modustaste drücken.



Modi und Modusleuchte

HÖRSYSTEME UND MULTI MIC PAAREN

(Ihr Akustiker wird Ihnen dabei helfen)

1. Halten Sie die Power-Taste des Multi Mics gedrückt, bis die Statusleuchte grün blinkt. Das Multi Mic ist nun eingeschaltet.
2. Sie finden den Paarungsknopf unterhalb des Paarungszeichens (📶) auf der Rückseite des Multi Mic. Falls Sie dieses nicht finden, versuchen Sie den Clip zu drehen.
3. Wenn Sie den Paarungsknopf drücken (Nutzen Sie einen Kugelschreiber o. Ä.), blinkt die Statusleuchte orange.
4. Binnen der nächsten 20 Sekunden öffnen und schließen Sie die Batteriekappen Ihrer Hörsysteme.

Eine erfolgreiche Paarung können Sie an einer abgespielten Tonfolge in ihren Hörsystemen und an einem 2 sekündigen orangen Aufblinken der




Statusleuchte erkennen.

Hinweis: Die Hörsysteme müssen sich im Streamingprogramm befinden, um Signale über das Multi Mic empfangen zu können.

Das Multi Mic sendet Sprachsignale direkt in Ihre Hörsysteme. Es kann an der Kleidung des Sprechers befestigt, an einem Band um den Hals getragen oder auf einem Tisch platziert werden.

Da das Mikrofon näher am Mund des Sprechers positioniert werden kann, wird Sprachverstehen durch den Einsatz des Multi Mic deutlich vereinfacht.

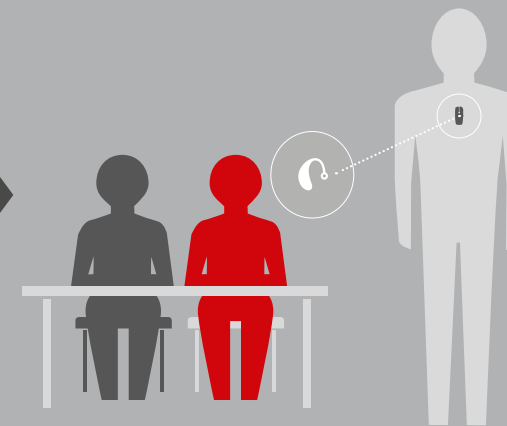

ANLEITUNG FEHLERBEHEBUNG - KONNEKTION

1. **Überprüfen der Statusleuchte.** Sie sollte alle zwei Sekunden grün blinken. Falls nicht, versuchen Sie die Powertaste gedrückt zu halten, bis Sie ein grünes Licht sehen. Wenn die Statusleuchte rot aufblinkt und erlischt, muss das Multi Mic aufgeladen werden. Blinkt sie orange, muss das Mikrofon bald geladen werden
2. **Überprüfen der Stummschalt-LED,** Wenn sie orange leuchtet, ist das Multi Mic stummgeschaltet. Drücken Sie die Stummschalttaste um wieder Audiosignale empfangen zu können.
3. **Überprüfen des Batteriestatus:** Wechseln Sie die Batterien Ihrer Hörsysteme. Manchmal ist die Batterieleistung für den normalen Hörsystemgebrauch ausreichend, jedoch nicht

für das Streaming.

4. **Wenn mehrere Streaming-Geräte verknüpft sind:** Wenn Sie einen Audio Beamer oder mehr als ein Multi Mic besitzen
 - Halten Sie den Programmwahlknopf an Ihren Hörsystemen **gedrückt**, bis Sie eine Tonfolge hören
 - Wiederholen sie diesen Schritt, bis Sie im richtigen Programm sind (Streaming-Geräte können in Kanal 1, 2 oder 3 gepaart sein)
5. **Erneute Paarung der Hörsysteme mit dem Multi Mic:** Folgen Sie der obigen Kopplungsanleitung.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, die Ihrem Multi Mic beilieg.

GN ReSound weltweit

ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Dänemark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com
CVR Nr. 55082715

Deutschland

GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
D-48157 Münster
Tel.: +49 251 - 20 39 6-0
Fax: +49 251 - 20 39 6-250
info@gnresound.de
www.resoundpro.com
www.resound.com

Österreich

GN ReSound
Hörtechnologie GmbH
Wimberggasse 14-16
A-1070 Vienna
Tel.: +43 1 524 54 000
Fax: +43 1 523 00 54
info@gnresound.at
www.resoundpro.com
www.resound.com

Schweiz

GN ReSound AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Tél.: +41 (0)44 722 91 11
Fax: +41 (0)44 722 91 12
info@gnresound.ch
www.resoundpro.com
www.resound.com