

Kurzanleitung für die ReSound Control™ App



Welche ReSound Hörsysteme unterstützen die ReSound Control App?

RESOUND HÖRSYSTEME MIT 2,4 GHZ WIRELESS-TECHNOLOGIE UNTERSTÜTZEN DIE RESOUND CONTROL APP

Smart Hearing Hörsysteme



ReSound LiNX2™



ReSound LiNX™



ReSound ENZO™



ReSound Up Smart™

Kabellose Hörsysteme



ReSound Enya™



ReSound Verso™



ReSound Alera™

****Hinweis für Hörakustiker:** Zur Verwendung der ReSound Control App mit den ReSound Hörsystemen der Modellreihe Alera verbinden Sie zuerst die Hörsystemen mit der ReSound Unite™ Fernbedienung. Dadurch wird die Steuerungsfunktion am Telefonclip+ aktiviert. Stellen Sie sicher, dass auf den ReSound Hörsystemen der Modellreihe Alera mindestens die Firmware-Version 3.2, die über die Anpass-Software Aventa bezogen werden kann, installiert ist.

Nicht kompatibel mit Enya 2/Alera 4.

RESOUND UNITE™ TELEFONCLIP+



Alle ReSound Wireless Hörsysteme benötigen einen ReSound Unite Telefonclip+ um eine Verbindung mit der ReSound Control App herzustellen.

Mit welchen mobilen Endgeräten funktioniert die ReSound Control™ App?



DIE RESOUND CONTROL™ APP IST MIT DEN FOLGENDEN MOBILLEN ENDGERÄTEN KOMPATIBEL

iPhone, iPad und iPod touch mit iOS 7 oder neuer.

Smartphone mit Android™ 2.3.5 oder neuer.

WO KANN ICH DIE RESOUND CONTROL™ APP DOWNLOADEN

Die ReSound Control App kann kostenfrei heruntergeladen werden. Rufen Sie auf Ihrem mobilen Endgerät den App Store™ oder Google Play™ auf und suchen Sie nach ReSound Control.

Tippen Sie im App Store erst auf «Laden» und dann auf «Installieren» bzw. bei Google Play auf «Installieren», um die App auf Ihr mobiles Endgerät herunterzuladen.

Aktuelle Kompatibilitätsinformationen finden Sie im App Store und bei Google Play.

Kopplung Ihrer Hörsysteme mit dem ReSound Unite™ Telefonclip+ und Ihrem mobilen Endgerät

Vor der Verwendung der ReSound Control App müssen Sie sowohl Ihr mobiles Endgerät als auch Ihre Hörsysteme mit Ihrem ReSound Unite Telefonclip+ koppeln.

WIE SIE IHR MOBILES ENDGERÄT MIT DEM RESOUND UNITE TELEFONCLIP+ KOPPELN

Entfernen Sie die silberne Kappe an Ihrem Telefonclip+ und schalten Sie ihn sowie Ihr mobiles Endgerät ein.

Rufen Sie im Hauptmenü Ihres mobilen Endgeräts die Bluetooth-Einstellungen auf und aktivieren Sie diesen Dienst.

Falls Sie sich unsicher bzgl. des Vorgehens sind, sehen Sie im Handbuch zu Ihrem Gerät nach.


Verwenden Sie die Spitze eines Stifts, um die blaue Taste auf der Rückseite Ihres Telefonclip+ einmalig für 1 Sekunde herunterzudrücken und so den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Suchen Sie auf Ihrem mobilen Endgerät nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten. Ggf. macht Ihr Gerät dies auch

automatisch.

Ihr Telefonclip+ wird auf Ihrem mobilen Endgerät in der Liste der Bluetooth-fähigen Geräte als «Hearing Aid Phone» angezeigt.

Wenn Ihr mobiles Endgerät nach einem Passwort fragt, geben Sie 0000 (vier Mal die Ziffer Null) ein und Ihr

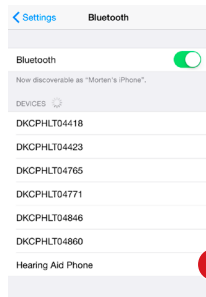

Telefonclip+ wird sich mit Ihrem mobilen Endgerät verbinden.

Wenn Ihr mobiles Endgerät fragt, welches Bluetooth-fähige Gerät Sie aktivieren möchten, wählen Sie bitte «Kopfhörer» aus.

WIE SIE IHR MOBILES ENDGERÄT MIT DEM RESOUND UNITE TELEFONCLIP+ VERBINDEN

Sobald die Koppelung hergestellt wurde, ist es möglich, dass Ihr mobiles Endgerät eine Bestätigung für die tatsächliche Koppelung mit dem Telefonclip+ anfordert.

Wenn Sie die Verbindung hingegen manuell herstellen müssen, benötigen Sie dafür die Auflistung der gekoppelten Geräte, die Sie über das Bluetooth-Menü Ihres Endgeräts aufrufen können.

Tippen Sie zuerst auf «Hearing Aid Phone» und dann auf «Verbinden».

WIE SIE DEN RESOUND UNITE TELEFONCLIP+ MIT KABELLOSEN RESOUND HÖRSYSTEMEN VERBINDEN

Sie müssen auch Ihre ReSound Hörsysteme mit Ihrem ReSound Unite Telefonclip+ verbinden.

Drücken Sie die weiße Taste unter der silbernen Kappe des Telefonclip+.

Öffnen Sie zunächst das Batteriefach an jedem Hörsystem und schließen es dann wieder innerhalb von 20 Sekunden, nachdem Sie die weiße Taste gedrückt haben.



Intelligente Kontrolle über Ihre ReSound Hörsysteme

STARTEN SIE MIT DER RESOUND CONTROL APP VON BEGINN AN RICHTIG DURCH

Nun, da Ihre Hörsysteme und Ihr ReSound Unite Telefonclip+ mit Ihrem mobile Endgerät gekoppelt sind, ist es an der Zeit, die ReSound Control App besser kennenzulernen. In den folgenden Beschreibungen lernen Sie, wie Sie Ihr mobiles Endgerät in eine Fernbedienung für Ihre kabellosen ReSound Hörsysteme verwandeln können.



Tippen Sie auf das Start-Symbol auf dem Hauptbildschirm, um die App zu aktivieren.

Wählen Sie «Verbinden», wenn die Dialogbox Sie fragt, ob Sie jetzt eine Verbindung herstellen oder weiter im Demo-Modus fortfahren möchten.

Tippen Sie auf «Akzeptieren», um den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zuzustimmen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es hilfreich sein kann, die Berührungs- und Tastentöne im Einstellungsmenü Ihres mobilen Endgeräts zu deaktivieren, um eine Beeinflussung der Nutzung Ihres Telefonclip+ oder der Control App zu vermeiden.

Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass Sie unter «Einstellungen» Lernprogramme aufrufen können, in denen Ihnen gezeigt wird, wie Sie das Beste aus Ihrer ReSound Control App herausholen können.

Die ReSound Control App im Überblick


Die App verfügt über zwei Hauptbildschirme: Lautstärkeregelung und Programmauswahl. Sie können von einem Bildschirm zum anderen wechseln, indem Sie auf die Navigationsschaltflächen tippen. Weiterhin steht eine Schaltfläche zur Anzeige des Verbindungsstatus zur Verfügung, mittels dessen Sie überprüfen können, ob Ihre Geräte weiterhin miteinander verbunden sind.



Im Startbildschirm der App wird die Lautstärkeregelung angezeigt.


Sie können die Lautstärke beider Hörsysteme gleichzeitig anpassen, indem Sie mit Ihrem Finger nach oben bzw. unten wischen.

Über die Schaltfläche unterhalb der Lautstärkeanzeige können Sie mit einem einzigen Tippen Ihre Hörgeräte stummschalten bzw. reaktivieren*.

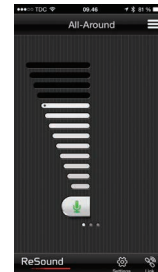

Wenn Sie mit dem Finger nach rechts wischen, wird Ihnen nur die Lautstärkeregelung für Ihr linkes Hörsystem angezeigt. Umgekehrt gilt dies auch für Ihr rechtes Hörsystem.

Somit ist es sehr einfach, die Lautstärke Ihrer Hörsysteme individuell festzulegen oder sie auch unabhängig voneinander stummzuschalten**.

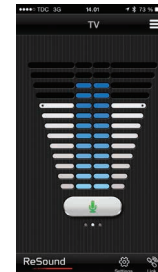


Wenn Sie Ton oder Musik über einen ReSound Unite Audio Beamer 2 oder ein ReSound Unite Mini Mikrofon oder auch Ihr Telefon streamen, werden Ihnen in der Mitte des Bildschirms zur Lautstärkeregelung zwischen den weißen Balken auch zwei blaue Balken angezeigt.

Über die blauen Balken können Sie die Lautstärke von gestreamtem Ton anpassen***.

*Die Stummschaltfunktion steht nicht bei ReSound Hörgeräten der Modellreihe Alera™ zur Verfügung. **Wenn Sie Hörsysteme verwenden, bei denen die Lautstärkesynchronisierung aktiviert ist, werden beide Geräte auf die individuelle Lautstärkeanpassung auf der rechten bzw. linken Seite reagieren. Wenden Sie sich an Ihren Akustiker, um diese Funktion zu deaktivieren. ***Der ReSound Unite Audio Beamer 2 und das ReSound Unite Mini Mikrofon sind zwei verfügbare Streaming-Geräte.


Die ReSound Control™ App im Überblick

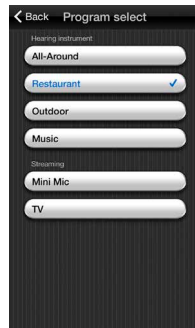

PROGRAMMAUSWAHL

Tippen Sie auf das Programmauswahl-Symbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms zur Lautstärkeregelung, um den Bildschirm zur Auswahl eines optimierten Hörprogramms für bestimmte Hörsituationen auszuwählen.


Tippen Sie auf die Schaltfläche für ein Hörprogramm oder einen Streamer, um ein normales Programm oder einen Audiostream von einem Ihrer kabellosen ReSound Unite™ Zubehörgeräte zu aktivieren.

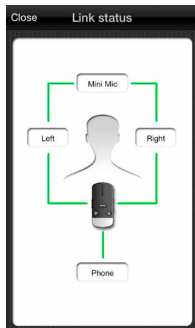

VERBINDUNGSSTATUS

Tippen Sie auf das Verbindungssymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms zur Lautstärkeregelung, um den Bildschirm zur Überprüfung des Verbindungsstatus aufzurufen.

In diesem Bildschirm wird Ihnen der Status der Verbindungen zwischen Ihrem mobilen Endgerät, Ihrem ReSound Unite Telefonclip+, Ihren Hörsystemen und dem ggf. verwendeten ReSound Unite Streaming-Zubehör angezeigt.

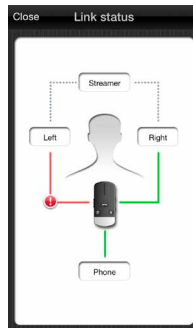

Wenn ein Verbindungsfehler vorliegt, wird die grüne Verbindungslinie rot dargestellt und ein Ausrufezeichen erscheint.

Tippen Sie auf das Ausrufezeichen, um sich Hinweise zur Fehlerbehebung anzeigen zu lassen. Diese helfen Ihnen, die Verbindung wieder korrekt herzustellen.

Tippen Sie auf «Schließen» in der oberen linken Ecke, um auf den Bildschirm zur Lautstärkeregelung zurückzukehren.



EINSTELLUNGEN

Über «Programmnamen editieren» können Sie die Bezeichnungen Ihrer Programme und des ReSound Unite Streaming-Zubehörs ändern. Tippen Sie auf «Zurücksetzen», um zu den ursprünglichen Namen Ihrer Programme und Zubehörgeräte zurückzukehren.

Im «Demomodus» betreiben Sie die ReSound Control App nur zur Ansicht und zum Demozweck ohne eine Verbindung mit dem Telefonclip+.

Im Menü «Anleitung» erfahren Sie mehr über die Funktionen von ReSound Control.


Im Menü «Paarung» wird Ihnen gezeigt, wie Sie Ihr mobiles Endgerät mit Ihrem ReSound Unite Telefonclip+ verbinden können.

Im Menü «Über ReSound Control» finden Sie weiterführende Informationen über die ReSound Control

App sowie die Kontaktdaten unseres Kundenservices.



Weitere Apps von ReSound

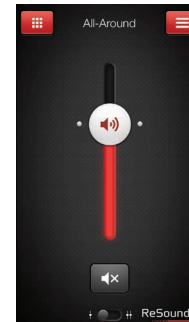


ReSound Smart™

Wenn Sie ReSound Smart Hearing Hörsysteme verwenden, vergessen Sie nicht, auch die ReSound Smart App* herunterzuladen, mit der Sie Ihr persönliches Hörerlebnis direkt und einfach individualisieren und steuern können.

resound.com/smartapp

*Abhängig von regionaler Verfügbarkeit

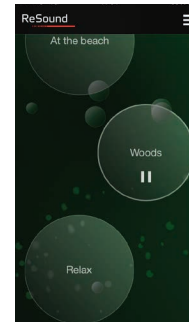

ReSound Relief™

Wenn Sie unter Tinnitus leiden, empfehlen wir Ihnen die ReSound Relief App*.

Die App vereint entspannende Klänge und unterstützt Sie so dabei, sich von den Einflüssen Ihres Tinnitus zu erholen.

resound.com/reliefapp

*Abhängig von regionaler Verfügbarkeit



ReSound® hilft Menschen mit Hörverlust, wieder besser zu hören. Wir entwickeln Hörsysteme, welche die Funktion des natürlichen Gehörs nachahmen. Damit Sie ein erfülltes und aktives Leben führen können.

Weitere Informationen finden Sie auch unter

resound.com/control

GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
48157 Münster

Tel.: +49 251 / 203 96 0
Fax: +49 251 / 203 96 250

info@gnresound.de
www.resound.com

Eigentümer und Nutzer der aufgeführten Marken sind die GN ReSound Group und ihre verbundenen Unternehmen. © 2015. Android und Google Play sind Marken der Google Inc. Der Android-Roboter wurde aus einem von Google erstellten und freigegebenen Werk wiedergegeben und wird gemäß den in der Creative Commons 3.0 Attribution License beschriebenen Bestimmungen verwendet. Bluetooth ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc.

ReSound

redDiscover hearing