

RESOUND
SMART HEARING

ReSound Smart™ App für Android



ReSound

rediscover hearing

Einführung in die ReSound Smart Hearing Hörsysteme

WELCHE RESOUND HÖRSYSTEME SIND SMART HEARING HÖRSYSTEME

Die folgenden Hörsysteme unterstützen die ReSound Smart App™, falls Sie sich dennoch unsicher sind, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Akustiker.



ReSound LiNX™



ReSound LiNX2™



ReSound ENZO™



ReSound Up Smart™

Android Geräte, die mit ReSound Smart Hearing Hörsystemen kompatibel sind

Die folgenden Telefone mit Android-Betriebssystem unterstützen ReSound Smart Hearing Hörsysteme.

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 Plus

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5 Plus


Samsung Galaxy S5 mini

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note 4

Die Liste der kompatiblen Android-Geräte wird fortlaufend ergänzt. Stets aktualisierte Informationen finden Sie auch auf resound.com/smartapp.

Achten Sie darauf, dass auf Ihrem Mobiltelefon die aktuellste Version der App installiert ist.

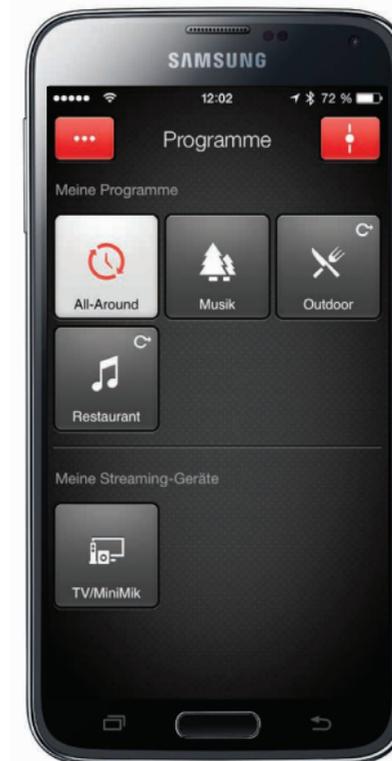



Intelligente Bedienung und Personalisierung mit der ReSound Smart™ App

Mit der ReSound Smart App gelingt Ihnen die Bedienung Ihrer Hörsysteme und die Auswahl erweiterter Funktionen so leicht wie nie zuvor: Ein einfaches Tippen mit dem Finger – und Sie haben Ihr persönliches Hörerlebnis individuell angepasst. Die ReSound Smart App ist die erste App für Hörsysteme, die eine direkte Verbindung zwischen Ihren Hörsystemen und Ihrem Android-Telefon herstellt.

WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET DIE RESOUND SMART APP?

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die ReSound Smart App zur Verfügung:

- Einstellen der Lautstärke an Ihren Hörsystemen
- Gesondertes Einstellen der Lautstärke an Ihrem ReSound Unite™ Streaming-Zubehör
- Einstellen von Sprachfokus, Hörkomfort und Komfort bei Wind mit dem Sound Enhancer*
- Ändern der Einstellungen in manuellen Programmen und Streaming-Programmen
- Bearbeiten und Personalisieren von Programmnamen
- Einstellen der Bässe und Höhen entsprechend Ihrer Vorlieben
- Speichern Ihrer Lieblingseinstellungen als Favoriten – mit oder ohne Zuweisung eines Orts
- Anzeigen von Batterie- und Verbindungsstatus
- Anzeigen der Vielzahl von Möglichkeiten und personalisierten Informationen über Ihr Hörsystem
- Auffinden verloren gegangener bzw. verlegter Hörsysteme

* Nur bei ausgewählten Programmen in ReSound LINX® 9

WO IST DIE RESOUND SMART™ APP ERHÄLTLICH?



Die ReSound Smart App steht Ihnen im Google Play Store als kostenloser Download zur Verfügung.


- Öffnen Sie auf Ihrem Android-Telefon den Play Store und suchen Sie nach „ReSound“ und „Smart“.
- Tippen Sie auf „Installieren“ und anschließend auf „Zustimmen“, damit die App auf bestimmte Funktionen Ihres Telefons – wie z. B. Bluetooth – zugreifen kann.
- Nun wird die App auf Ihr Telefon installiert.
- Tippen Sie nach erfolgter Installation auf „Öffnen“, um die ReSound Smart App zu öffnen.

Weitere Informationen finden Sie auf resound.com/smartapp

Verbindung mit einem Android-Telefon


SO VERBINDEN SIE IHR RESOUND SMART HÖRSYSTEM MIT IHREM ANDROID-TELEFON

Legen Sie eine neue Batterie in Ihr ReSound Smart Hearing Hörsystem ein.
Lassen Sie das Batteriefach geöffnet, so dass das Hörsystem noch ausgeschaltet bleibt.

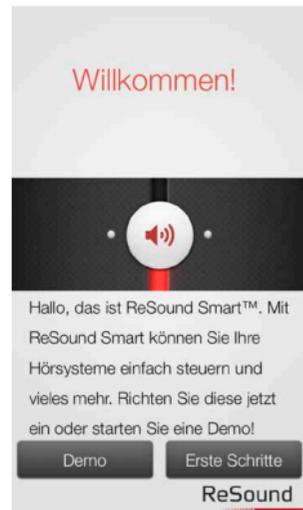

Öffnen Sie auf Ihrem Telefon die ReSound Smart App.

Der Verknüpfungsvorgang kann sofort beginnen. Über die Schaltfläche „Demo“ können Sie sich die App vorführen lassen.

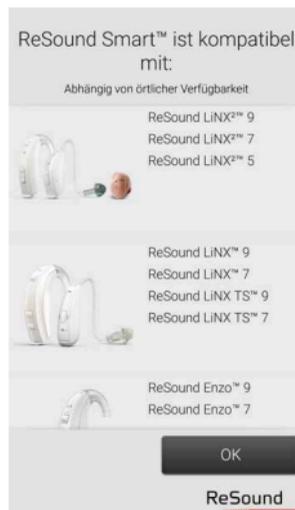


Überprüfen Sie, ob Ihr Hörsystem in der Liste der kompatiblen Produkte aufgeführt ist.


Wählen Sie „OK“.




Schließen Sie das Batteriefach des Hörsystems und wählen Sie „Paarung“.

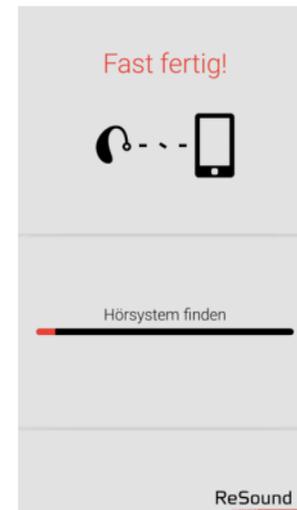

Die App sucht nun die nähere Umgebung nach Hörsystemen ab.

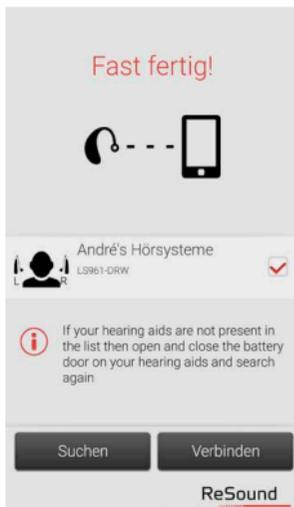

Wählen Sie Ihre Hörsysteme aus und tippen Sie anschließend auf „Verbinden“. Wurden keine Hörsysteme erkannt, können Sie die Suche über die Schaltfläche „Suchen“ wiederholen.

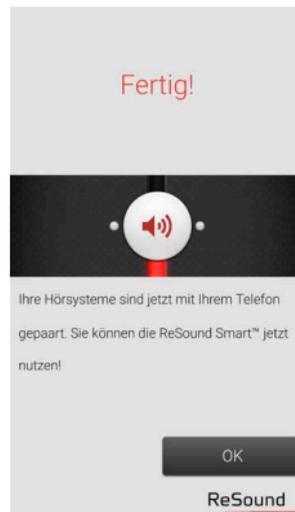

Die Verbindung zu Ihren Hörsystemen ist nun hergestellt und Sie können die App bedienen.



Trennen der Verbindung zu den Hörsystemen

Möchten Sie die Verbindung zu Ihren Hörsystemen wieder trennen, um z. B. andere ReSound Smart Hearing Systeme mit Ihrem Smartphone zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie in den App-Einstellungen den Menüpunkt „Hörsystem-Paarung aufheben“. Daraufhin erscheint eine Meldung. Wählen Sie hier «Verbindung trennen», nun sind Ihre Hörsysteme vom Smartphone getrennt.

So stellen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Hörsystem und Ihrem Android-Telefon wieder her


Wenn sich Ihre Hörsysteme nicht mehr in Reichweite befinden oder Sie die Geräte bzw. Ihr Android-Telefon abgeschaltet haben, besteht keine Verbindung mehr. Sobald die Hörsysteme wieder in Reichweite kommen oder Sie die Geräte bzw. Ihr Telefon wieder einschalten, wird die Verbindung innerhalb weniger Sekunden automatisch wiederhergestellt.

TIPP MÖCHTEN SIE NICHT VERBUNDENE HÖRSYSTEME AKTIVIEREN

Wurde ein Hörsystem vergessen, folgen Sie den auf Seite 6 beschriebenen Anweisungen, um die Verknüpfung zu Ihren Hörsystemen wiederherzustellen.

ÜBERBLICK ÜBER DIE RESOUND SMART™ APP

Die App verfügt über zwei Hauptansichten: Lautstärkeregelung und Programmauswahl. Durch Wischen oder mit Hilfe der Navigations Schaltflächen können Sie ganz leicht von einer Ansicht zur anderen wechseln. Über die Schaltfläche „Hauptmenü“ gelangen Sie zu weiteren Funktionen der App.

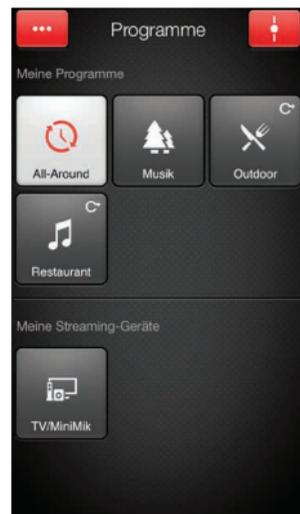

Programmauswahl



Wenn Sie sich auf der Programmseite befinden, gelangen Sie über diese Schaltfläche zurück zur Lautstärkeregelung.



Tippen Sie auf die Schaltfläche «Mehr Optionen», um zu den erweiterten Funktionen zu gelangen.




Lautstärkeregelung



Über diese Schaltfläche gelangen Sie zur Programmauswahl.



Über diese Schaltfläche gelangen Sie zum Hauptmenü, in dem Sie weitere Funktionen finden.

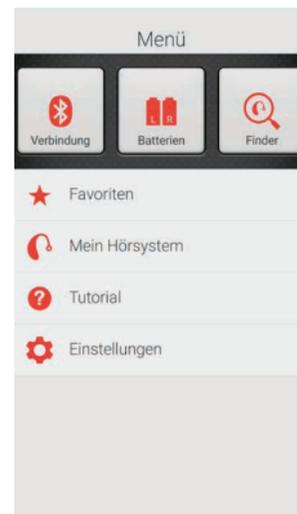


Hauptmenü mit zusätzlichen Funktionen



Zusätzliche Funktionen der App sind z. B.:

- Verbindungsstatus
- Batteriestatus
- Finder
- Favoriten
- Mein Hörsystem
- App-Tutorial
- Einstellungen

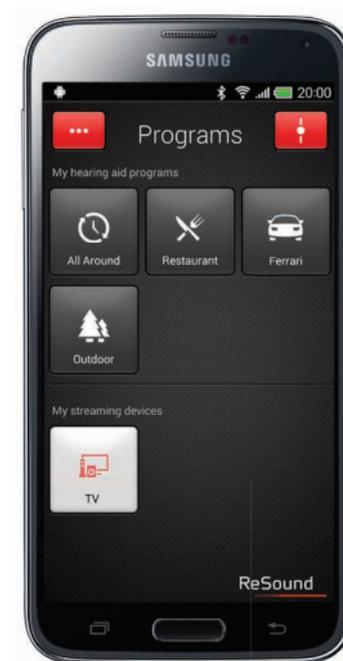

Über die Telefontaste „Zurück“ gelangen Sie zur vorherigen Ansicht zurück.

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE



Kombinierte Lautstärke- regelung



Schieben Sie den Lautstärke-
regler nach oben bzw. nach
unten, um die Lautstärke
des Hörsystems zu erhöhen
bzw. zu senken.



Tippen Sie auf die «Stumm-
Schaltfläche» unterhalb des
Lautstärkereglers, um den
Ton auszuschalten. Tippen
Sie nochmals darauf, um
den Ton wieder einzu-
schalten.



Separate Lautstärkeregelung



Nutzen Sie die Zoom-Geste
(zwei Finger auseinander-
ziehen), um zwischen der
kombinierten und separaten
Lautstärkeregelung für das
Hörsystem zu wechseln.



Alternativ können Sie auch
auf die Schaltfläche „Um-
schalten“ tippen, die sich im
unteren Teil der Bildschir-
mansicht befindet.

LAUTSTÄRKEREGELUNG FÜR STREAMER



Streamer-Lautstärke



Wurde ein Streaming-
Programm ausgewählt,
können Sie die Laut-
stärke für diesen Streamer
über den orangefarbenen
Schieberegler individuell
anpassen.

Hörsystem-Lautstärke



Sie können weiterhin die
Lautstärke der Hörsyste-
me anpassen oder diese
stummschalten, ohne dass
dies einen Einfluss auf die
Lautstärke der von Ihnen
gestreamten Audio-Dateien
hat.



Separate Lautstärke- regelung




Die Lautstärke für Ihre bei-
den Hörsysteme können
Sie unabhängig voneinan-
der einstellen. Durch Zu-
sammenführen zweier
Finger auf dem Bildschirm
können Sie zwischen der
kombinierten und der se-
paraten Lautstärkeregelung
hin- und herwechseln.
Alternativ können Sie
auch auf die Schaltfläche
„Umschalten“ tippen, die
sich im unteren Teil der
Bildschirmansicht befindet.

TIPP WIE KANN ICH DIE LAUTSTÄRKE ZURÜCK- SETZEN

Wenn Sie für die Lautstärke wieder die Standardeinstellung wählen
möchten, bringen Sie den Schieberegler auf die Höhe der weißen Punkte.

WECHSELN DES PROGRAMMS

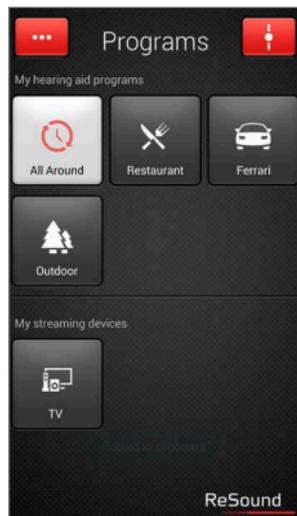

Manueller Programmwechsel



Es stehen Ihnen vier Hörprogramme zu Verfügung, die Ihr Akustiker mit Ihnen erstellt hat. Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um ein Programm auszuwählen. Zur besseren Unterscheidung ist jedes Programm mit einem eigenen Symbol versehen.




Streamer-Wechsel



Tippen Sie auf die Schaltfläche für Streaming-Geräte, um einen Stream von einem ReSound Unite™ Gerät, wie zum Beispiel dem ReSound Unite™ Audio Beamer 2, zu aktivieren.

ANPASSEN DER BÄSSE UND HÖHEN

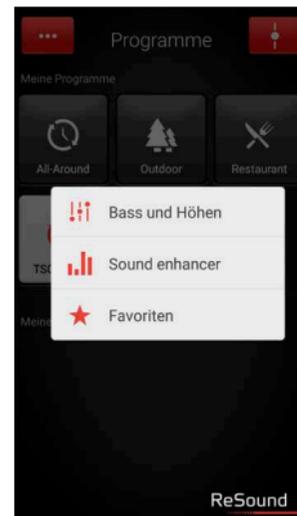

Mehr Optionen




Über die rote Schaltfläche „Mehr Optionen“ oben links in der Bildschirmansicht öffnet sich ein Pop-Up-Menü mit weiteren Optionen. Hier können Sie Ihr Hörprogramm nach Ihren Vorlieben verändern und Ihr Hörerlebnis personalisieren.

Option für Bässe und Höhen



Sie können die Bässe und Höhen für sämtliche eingehende Audiosignale ändern.

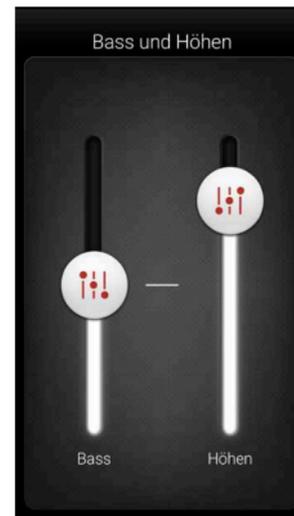

Anpassen der Bässe und Höhen




Durch Bewegen der Schieberegler nach oben bzw. nach unten können Sie für die eingehenden Töne mehr oder weniger Bass bzw. Höhen einstellen.

TIPP KANN ICH MEINE EINSTELLUNGEN SPEICHERN?

Wenn Ihnen die aktuellen Bässe und Höhen gefallen, können Sie diese Einstellung als Favoriten speichern. Mit dem ReSound LiNX®, dem ReSound ENZO und dem ReSound Up Smart bleiben Ihnen die Anpassungen bis zum nächsten Neustart Ihres Hörsystems erhalten (d. h. wenn das Batteriefach geöffnet und wieder geschlossen wird).

SOUND ENHANCER: PERSONALISIEREN SIE IHR KLANGERLEBNIS

Je nachdem, wie Ihr Hörakustiker Ihre Programme konfiguriert hat, erscheint im Pop-Up-Menü „Mehr Optionen“ der Auswahlpunkt „Sound Enhancer“. Der Sound Enhancer ist nur für ReSound LiNX² 9, ReSound ENZO 9 und ReSound Up Smart 9 verfügbar.

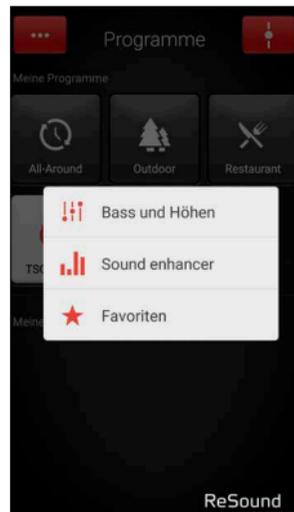


Indem Sie den Schieberegler zur gewünschten Stelle bewegen bzw. auf den Bildschirm tippen, verändern Sie Ihr Klangerlebnis.



Wenn Sie Ihre Anpassungen wieder rückgängig machen und zu den Voreinstellungen im Programm zurückkehren möchten, tippen Sie auf „Rückgängig“.

Im unteren Teil der Bildschirmansicht werden Ihnen aktive Registerkarten mit Funktionen angezeigt, die Ihnen für den Sound Enhancer zur Verfügung stehen.

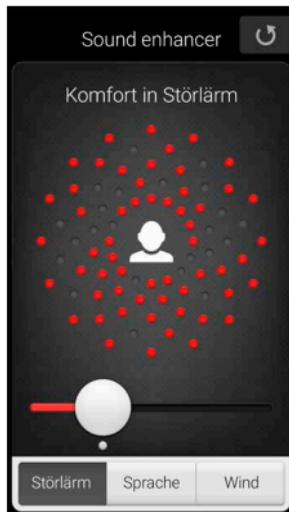

Komfort in Störlärm


Die Störgeräuschunterdrückung lässt sich für unterschiedliche Situationen einstellen. Dabei reicht die Spanne von der Wahrnehmung der gesamten Umgebung bis hin zu gezieltem Hören.



Sprachfokus

Entscheiden Sie selbst, wie stark Sie sich auf einen Sprecher fokussieren, indem Sie den Öffnungswinkel Ihrer Mikrofone einstellen.

Wurde für die Hörsysteme der automatische Fokus eingestellt, wird in die manuelle Einstellung gewechselt, sobald Sie eine Anpassung des Sprachfokusses vornehmen. Wenn Sie den automatischen Fokus wieder aktivieren möchten, drücken Sie einfach auf die Schaltfläche „Rückgängig“.

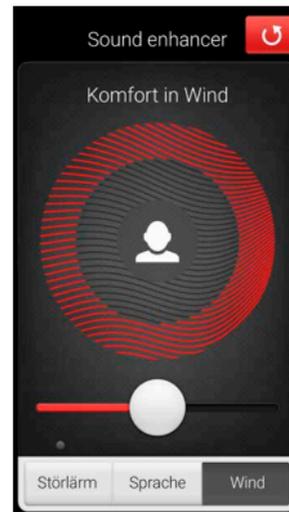

Komfort in Wind

Damit Sie auch bei stärkerem Wind einen optimalen Hörkomfort genießen, können Sie die Windgeräuschreduzierung in Ihren Hörsystemen anpassen.

TIPP SIE KÖNNEN IHRE LIEBLINGSEINSTELLUNGEN SPEICHERN

Speichern Sie Ihre Einstellungen als Favoriten. So können Sie diese Ihrem Hörakustiker bei Ihrem nächsten Besuch zeigen.


TIPP OPTIMIEREN SIE DEN SPRACHFOKUS

Beim Anpassen des Sprachfokusses sollten Sie auch versuchen, den Komfort in Störlärm zu optimieren, um so ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.

TINNITUS MANAGER

Sie können den Tinnitus-Manager in der App nur aufrufen, wenn Ihr Hörakustiker im gewählten Programm den Tinnitus Sound Generator aktiviert hat. Die Programme werden durch ein kleines Symbol auf der Schaltfläche des Programms gekennzeichnet. Über den Punkt <<Mehr Optionen>> gelangen Sie zum Tinnitus-Manager.

ZUGRIFFSMÖGLICHKEITEN IN DER APP

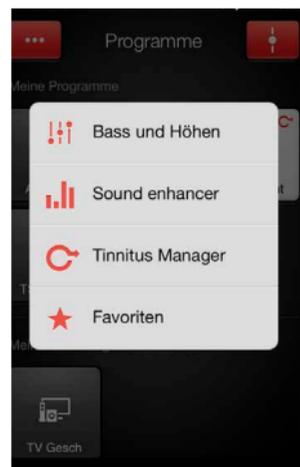

Den Tinnitus-Manager finden Sie in der Bildschirmansicht des jeweiligen Programms im Menü.



Wenn Sie Ihre Anpassungen wieder rückgängig machen und zu den Voreinstellungen im Programm zurückkehren möchten, tippen Sie auf <<Rückgängig>>.

Programm mit weißem Rauschen



Klangvarianten

Um die Toneingangsvariation für das weiße Rauschen anzupassen, wählen Sie eine von den oberen Schaltflächen aus.

Tonhöhe


Zum Anpassen der Frequenzgangkompensation (Tonhöhe) bewegen Sie die beiden Schieberegler nach links bzw. rechts.

Programm mit Nature Sounds™



Nature Sounds™

Wählen Sie einen der sechs neuen Naturklänge für Ihr Hörsystem.

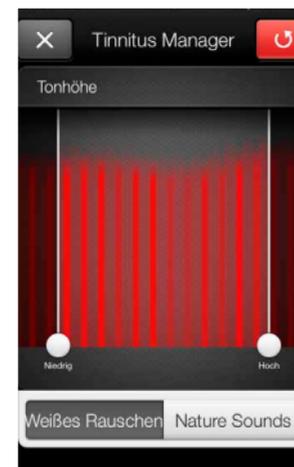


Aktivierung von weißem Rauschen

Sie haben auch die Möglichkeit, den Toneingang mit weißem Rauschen zu überlagern und die Tonhöhe anzupassen.

TIPP SPEICHERN VON LIEBLINGSEINSTELLUNGEN


Speichern Sie Ihre Einstellungen im Tinnitus-Manager als Favoriten. So können Sie diese Ihrem Hörakustiker bei Ihrem nächsten Besuch zeigen.

FAVORITEN

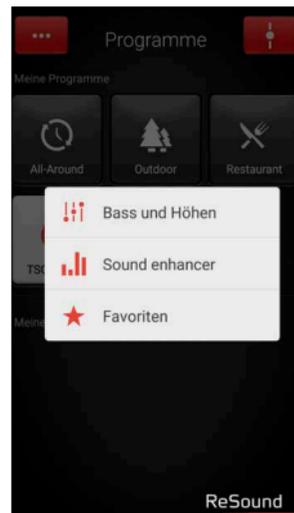


Hinzufügen eines Favoriten

Ihre Lieblingseinstellungen für Lautstärke, Bass und Höhen, Sound Enhancer und Tinnitus-Manager können Sie als Favoriten speichern. Darüber hinaus ist es möglich, einen Favoriten einem Ort zuzuweisen. Wenn Sie wieder an diesen zurückkehren, wechselt Ihr Hörsystem automatisch zu den favorisierten Einstellungen.

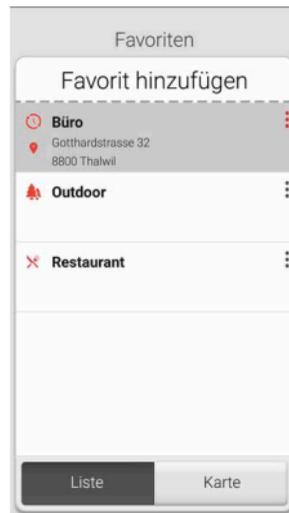

Favoriten im Überblick


Um einen neuen Favoriten in die Favoritenliste aufzunehmen, drücken Sie auf «Favorit hinzufügen» und aktivieren Sie anschließend einen vorhandenen Favoriten durch Antippen des Namens. Sie können zwischen der Listenansicht und der Kartenansicht wechseln.

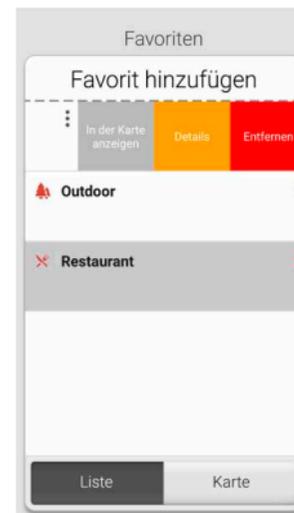

Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für Favoriten

Wenn Sie auf einem Favoriten nach links wischen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

- Kartenansicht (falls ein Standort hinzugefügt wurde)
- Details
- Entfernen

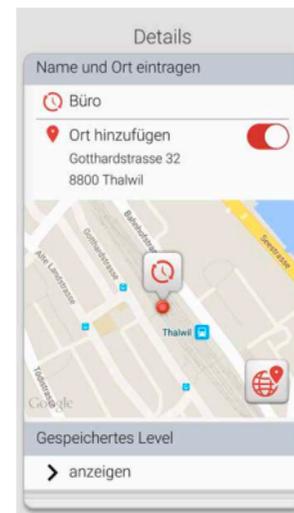

Detailsansicht für Favoriten

In der Detailsansicht können Sie den Namen des jeweiligen Favoriten ändern und einen Ort hinzufügen bzw. entfernen.


Ausserdem können Sie sich die gespeicherten Werte für Lautstärke und Bässe/Höhen, aber auch die Eigenschaften im Sound Enhancer anzeigen lassen.

TIPP DIE FAVORITENLISTE LÄSST SICH AUCH AUS DEM HAUPTMENÜ AUFRUFEN

TIPP KANN ICH MEINE FAVORITEN ÄNDERN, OHNE DASS DIE EINSTELLUNGEN VERLOREN GEHEN

Wenn Sie einen Favoriten wählen und die gespeicherten Einstellungen wie die Lautstärke oder Bässe und Höhen anpassen, können Sie diese Änderung am Profil anschließend als neuen Favoriten speichern.

SUCHASSISTENT: SUCHE NACH VERLEGTEN HÖRSYSTEMEN

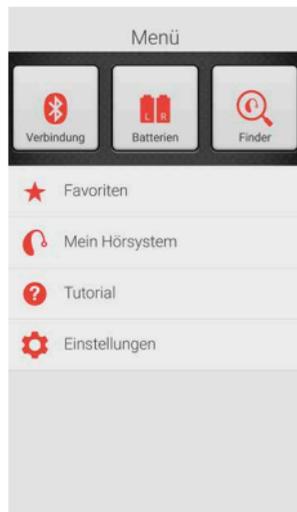



Finder

Mit dem Finder können Sie nach verlegten Hörsystemen suchen.

Suche in der näheren Umgebung

Spürt die App die Hörsysteme in Reichweite auf, wechselt sie in den Modus „Nähe“. Wenn Sie nun umherlaufen, wird Ihnen über die roten Balken angezeigt, ob Sie sich den Hörsystemen nähern oder sich weiter von ihnen entfernen.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die Hörsysteme eingeschaltet sein.

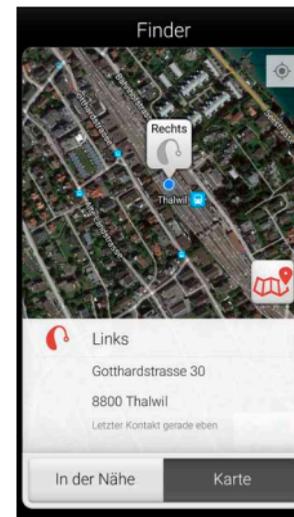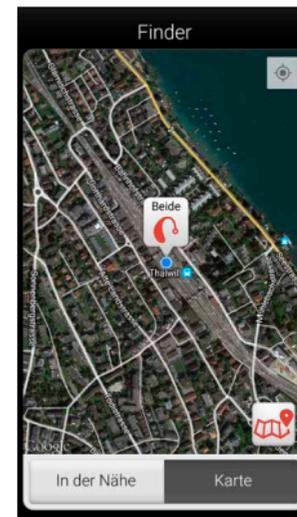

Fernsuche

Kann die App die Hörsysteme nicht in der näheren Umgebung finden, wechselt sie in die Ansicht „Karte“. Hier wird Ihnen angezeigt, wo sich die Hörsysteme befinden, als sie zuletzt mit der App verbunden waren.



Satellitenansicht

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie zur Satellitenansicht wechseln möchten. Ein erneutes Tippen auf die Schaltfläche bringt Sie zur Kartenansicht zurück.

Letzter Standort

Durch Antippen des Standortssymbols wird Ihnen der zuletzt bekannte Standort Ihrer Hörsysteme samt Uhrzeit angezeigt.


WEITERE APP-OPTIONEN

Nützliche Informationen zur Verwendung Ihrer Hörsysteme.



Mein Hörsystem

Erfahren Sie hier, wie Ihnen die smarten Hörsysteme den Alltag erleichtern.

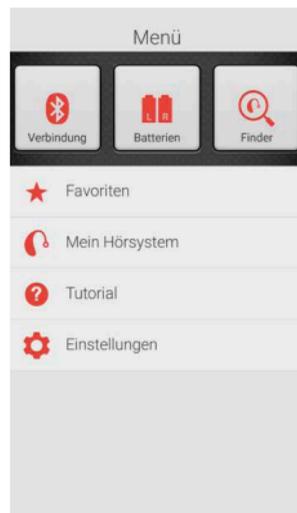

Batteriestatus





Über diese Schaltfläche wird Ihnen angezeigt, welchen Ladezustand die Batterien in Ihrem linken und rechten Hörsystem haben. Zur Kennzeichnung des Ladezustands wird das Batteriesymbol entweder als vollständig aufgeladen, als teilweise entladen oder als fast vollständig entladen abgebildet.



In diesem Beispiel bedeuten die Symbole, dass die Batterie im rechten Hörsystem vollständig aufgeladen ist, während der Ladezustand der Batterie im linken Hörsystem sehr gering ist.

VERBINDUNGSSTATUS

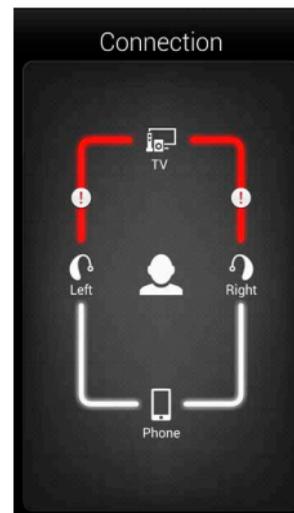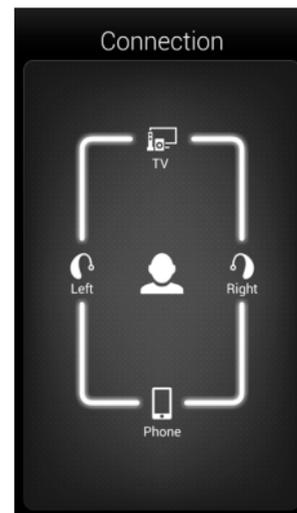

Prüfen der Verbindungen

Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen den Status der Verbindungen zwischen Ihren Hörsystemen, dem Streamer und dem Android-Gerät.

Sollte keine Verbindung bestehen oder die Verbindung unterbrochen sein, wird die zugehörige Linie rot und mit Ausrufezeichen markiert.

TIPP WAS KANN ICH TUN, WENN EINE VERBINDUNG UNTERBROCHEN IST

Wird angezeigt, dass eine Verbindung unterbrochen ist, drücken Sie auf das entsprechende Ausrufezeichen. So erhalten Sie Anweisungen dazu, wie Sie diese Verbindung wiederherstellen können. Sie sollten in jedem Fall überprüfen, ob Ihre Hörsysteme eingeschaltet und in Reichweite des Telefons sind und ob die Batterien ausreichend aufgeladen sind. Wenn die Verbindung nicht direkt wiederhergestellt wird, können Sie auch versuchen, das Batteriefach zu öffnen und wieder zu schließen.

APP-EINSTELLUNGEN

Einstellungen	
Favoriten ①	Sie können die Einstellungen als Favoriten speichern und verwalten
Programme umbenennen ②	Sie können die Namen der angepassten Programme ändern
Demomodus ③	Testen Sie die ReSound Smart™ App ohne Hörsystemverbindung
Hörsystem-Paarung aufheben ④	Sie können Ihre Hörsysteme erneut verbinden oder ein neues Paar mit Ihrem Telefon verbinden
Über die ReSound Smart™ App ⑤	Informationen über die ReSound Smart™ App
Support ⑥	Support-Material über die ReSound Smart™ App

Einstellungen

Über die App-Einstellungen können Sie Änderungen an bestimmten Funktionen der ReSound Smart™ App vornehmen.

1. Sofort alle Favoriten entfernen
2. Programme umbenennen
3. Demo-Modus
4. Trennen der Verknüpfung mit den Hörsystemen
5. Hintergrundinformationen zur ReSound Smart App
6. Orientierungshilfe für zusätzliches Material





Audio-Übertragung auf ReSound Smart™ Hörsysteme

AUDIO-ÜBERTRAGUNG VON EINEM ANDROID-TELEFON AUF RESOUND SMART™ HÖRSYSTEME MIT DEM RESOUND UNITE™ TELEFONCLIP+

Sobald Ihre smarten Hörsysteme mit dem ReSound Unite Telefonclip+ verbunden sind, können Sie von Ihrem Android-Telefon Audiosignale in Stereoqualität empfangen.

Öffnen Sie dazu einfach einen Mediaplayer auf Ihrem Telefon und starten Sie die Wiedergabe. Anschließend wechseln Ihre Hörsysteme in das Streaming-Programm, und nach wenigen Sekunden wird Ihnen das gewünschte Audiosignal direkt auf die Hörsysteme übertragen.

VERKNÜPFUNG DES RESOUND UNITE TELEFONCLIP+ MIT EINEM ANDROID-TELEFON

- Stellen Sie sicher, dass in den Telefoneinstellungen Bluetooth aktiviert ist.
- Schalten Sie den Telefonclip+ ein, entfernen Sie die silberfarbene Kappe und suchen Sie die kleine blaue Bluetooth-Verbindungstaste.
- Drücken Sie die Taste, um so den Bluetooth-Verbindungsmodus zu aktivieren. Daraufhin leuchtet die LED-Anzeige blau, und für den Telefonclip+ ist 2 Minuten lang der Paarungsmodus aktiviert.
- Nach einigen Sekunden erscheint auf Ihrem Telefon eine Liste mit verfügbaren Bluetooth-Geräten. Wählen Sie „Hearing Aid Phone“.
- Sollten Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie „0000“ (vier Nullen) ein und wählen Sie anschließend „Kopfhörer“.


VERKNÜPFUNG DES RESOUND UNITE TELEFONCLIP+ MIT DEN HÖRSYSTEMEN

- Öffnen Sie die Batteriefächer beider Hörsysteme.
- Schalten Sie den Telefonclip+ ein, entfernen Sie die silberfarbene Kappe und suchen Sie die kleine weiße Paarungstaste für Hörsysteme.
- Drücken Sie die Taste, um so den Paarungsmodus für Hörsysteme zu aktivieren. Die LED-Anzeige blinkt alle 2 Sekunden gelb auf, und für den Telefonclip+ ist 20 Sekunden lang der Paarungsmodus aktiviert.
- Schließen Sie nun die Batteriefächer Ihrer Hörsysteme. Zur Bestätigung der Paarung ertönt ein aufsteigender 4fach Ton.

Weitere Informationen zum ReSound Unite Telefonclip+ erhalten Sie in der Bedienungsanleitung, im Lehrvideo oder unter [resound.com/unite](https://www.resound.com/unite).



Weitere Apps von ReSound

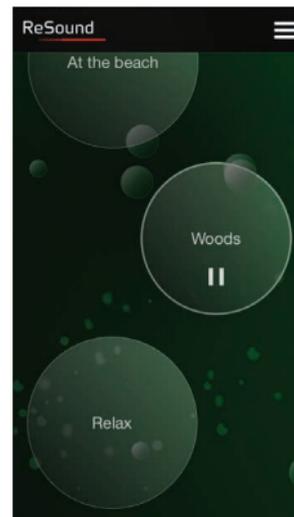

ReSound Relief™



Wenn Sie unter Tinnitus leiden, empfehlen wir Ihnen die ReSound Relief App.*

Entspannende Klänge und Übungen helfen Ihnen, sich von Ihrem Tinnitus abzulenken.

Zum Übertragen der Klänge auf Ihre Hörsysteme benötigen Sie einen ReSound Unite Telefonclip+.

resound.com/reliefapp

* Je nach Verfügbarkeit in Ihrem Land.



ReSound® hilft Menschen mit Hörverlust, wieder besser zu hören. Wir entwickeln Hörsysteme, welche die Funktion des natürlichen Gehörs nachahmen. Damit Sie ein erfülltes und aktives Leben führen können.

Weitere Informationen finden Sie auch unter
[resound.com/smartapp](https://www.resound.com/smartapp)

GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
48157 Münster

Tel.: +49 251 / 203 96 0
Fax: +49 251 / 203 96 250

info@gnresound.de
www.resound.com

Eigentümer und Nutzer der aufgeführten Marken sind die GN ReSound Group und ihre verbundenen Unternehmen.
© 2015. Android und Google Play sind Marken der Google Inc. Der Android-Roboter wurde aus einem von Google erstellten und freigegebenen Werk wiedergegeben und wird gemäß den in der Creative Commons 3.0 Attribution License beschriebenen Bestimmungen verwendet. Bluetooth ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc.

ReSound

rediscover hearing