

RESOUND
SMART HEARING

ReSound Smart™ App für iOS



ReSound

■■■■■■■■■■
rediscover hearing

Einführung in die ReSound Smart Hearing Hörsysteme

WELCHE RESOUND HÖRSYSTEME SIND SMART HEARING HÖRSYSTEME

Die folgenden Hörsysteme unterstützen die ReSound Smart App, falls Sie sich dennoch unsicher sind, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Akustiker.



ReSound LiNX™



ReSound LiNX2™



ReSound ENZO™



ReSound Up Smart™

Apple Geräte, die mit ReSound Smart Hearing Hörsystemen kompatibel sind

Die folgenden Apple Geräte unterstützen ReSound Smart Hearing Hörsysteme (Made for iPhone).

iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5

iPad Air 2
iPad Air
iPad 4. Generation
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad mini mit Retina-Display
iPad mini


iPod touch 5. Generation

UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN UND IOS UPDATES

ReSound Smart Hearing Hörsysteme benötigen mindestens die Softwareversion iOS 7.0. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie iOS 7.0 oder eine neuere Version auf Ihrem Gerät installiert haben. Wenn Sie ein iPhone 6 bzw. ein iPhone 6 Plus verwenden, empfehlen wir die Installation der neusten Version von iOS 8.

Zur Verwendung der Apple Watch™ muss auf dem iPhone mindestens die Softwareversion iOS 8.2 installiert sein.

Stets aktualisierte Informationen finden Sie auch auf resound.com/smartapp

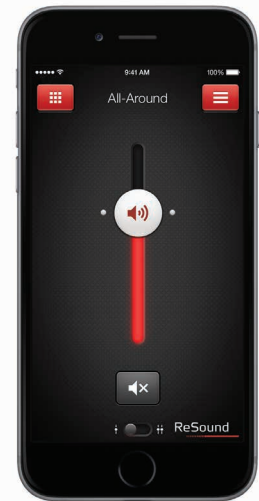

Laden im
App Store


Verbindung mit Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch

WIE SIE RESOUND SMART HEARING HÖRSYSTEME MIT IHREM IPHONE, IPAD ODER IPOD TOUCH VERBINDEN

Überprüfung der Batterie

Legen Sie eine neue Batterie in Ihr ReSound Smart Hearing Hörsystem ein.

Lassen Sie das Batteriefach geöffnet, so dass das Hörsystem noch ausgeschaltet bleibt.

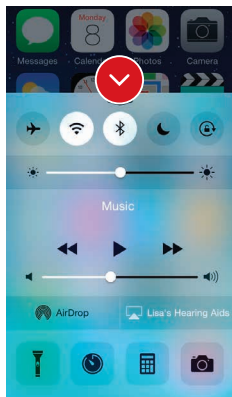

Neustart des iPhone




Schließen Sie sämtliche Applikationen. Schalten Sie das iPhone ab und starten Sie dieses neu.

Einschalten von Bluetooth



Wischen Sie vom unteren Bildschirmende nach oben, um das Kontrollzentrum aufzurufen.



Tippen Sie dann auf das Bluetooth Symbol.

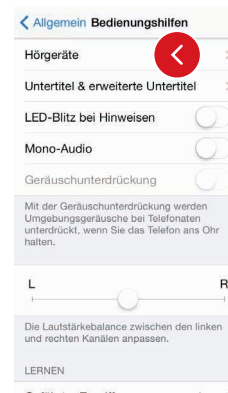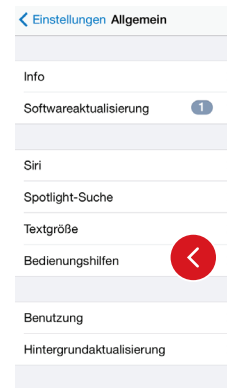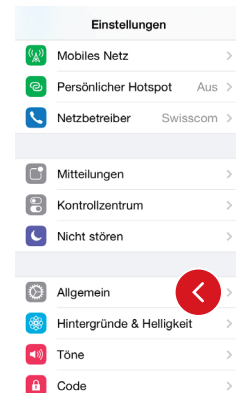

Erkennung von Hörsystemen

Nachdem Sie Bluetooth aktiviert haben, rufen Sie bitte «Einstellungen» auf und tippen dann auf «Allgemein» und danach auf «Bedienungshilfen».

Schließen Sie die Batterieklappe, um Ihr Hörsystem einzuschalten, so dass es von Ihrem iPhone, iPad, oder iPod touch erkannt werden kann. Tippen Sie dann auf «Hörgeräte».

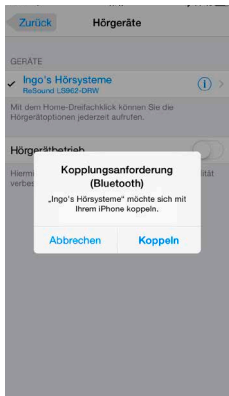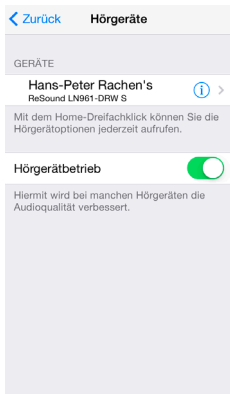

Herstellen der Verbindung

Tippen Sie auf den Namen und die Modellnummer Ihres Hörsystems, wenn es auf dem Bildschirm erscheint. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, erscheint neben dem Namen Ihres Hörsystems ein Häkchen und die Schriftfarbe ändert sich von schwarz zu blau. Legen Sie die Hörsysteme an, um ankommende Signaltöne hören zu können.

Tippen Sie im Dialogfeld auf «Koppeln». Wenn Sie zwei Hörsysteme verbinden möchten, erhalten Sie zwei separate Verbindungsanfragen. Nach dem Herstellen der ersten Verbindung kann es einige Sekunden dauern, bis die zweite Anfrage erscheint.

Wenn Sie in das Dialogfeld «Koppeln» tippen, benötigt Ihr ReSound Smart Hearing Hörsystem und Ihr Apple Gerät einige Zeit, um die Verbindung zu authentifizieren. Warten Sie auf eine Folge von 6 Pieptönen, der sich nach einer Weile eine Welle mit 4 aufsteigenden Tönen anschließt. Falls die Wellentöne absteigend klingen, ist die Batterie zu schwach und muss sofort durch eine Neue ersetzt werden, damit der Paarungsvorgang abgeschlossen werden kann. Bitte übertragen Sie bis zum Abschluss der Authentifizierung keine Audio-Dateien.

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, können Sie den Verbindungsstatus auf der Seite für Hörgeräte prüfen.


Erneute Verbindung Ihrer Hörsysteme mit Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch

Wenn Sie Ihre Hörsysteme oder Ihre Apple Geräte ausschalten, wird die Verbindung unterbrochen. Um die Verbindung erneut herzustellen, führen Sie bitte die auf den Seiten 4 und 5 beschriebenen Schritte aus.

Mit mehr als einem Apple Gerät verbinden

Sie können bis zu fünf Apple Geräte mit Ihren ReSound Smart Hearing Hörsystemen verbinden, allerdings kann nur eines dieser Apple Geräte zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv geschaltet werden.


Um von einem Apple Gerät auf ein anderes zu wechseln, wischen Sie vom unteren Ende des Bildschirms Ihres Apple Geräts nach oben und schalten Bluetooth aus. Nun können Sie Bluetooth auf dem Gerät aktivieren, mit dem Sie als nächstes die Verbindung herstellen möchten.

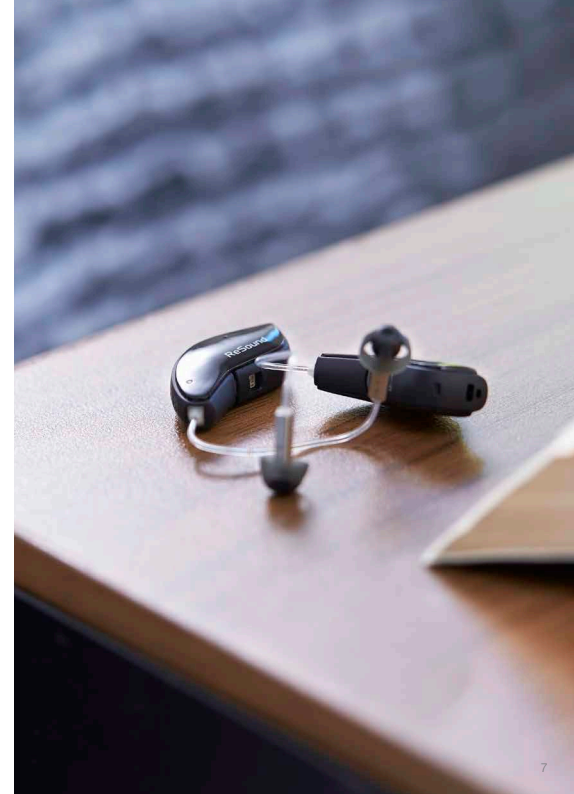

Streamen Sie Sound direkt auf Ihre ReSound Smart Hearing Hörsysteme

Sie können Audio-Dateien, wie zum Beispiel Musik, in Stereo direkt von Ihrem Apple Gerät auf Ihre Hörsysteme streamen.


KONTROLLZENTRUM

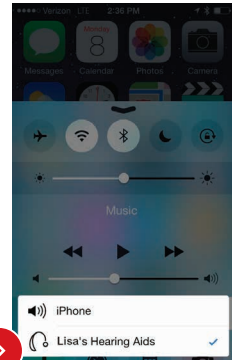

Rufen Sie das Kontrollzentrum auf, indem Sie vom unteren Ende des Bildschirms nach oben wischen. Wählen Sie das Wiedergabegerät für Audio-Dateien aus – in diesem Fall Ihre Hörsysteme.

Um das Streamen von Audio-Dateien auf Ihr Hörsystem zu beenden und zum normalen Telefonbetrieb zurückzukehren, wählen Sie «iPhone» aus. Eine andere Möglichkeit, das Streamen von Audio-Dateien zu beenden, bietet das Tippen auf den «Pausenknopf» des Mediaplayers.

WIE SIE AUDIO-DATEIEN AUS ANDEREN APPS STREAMEN

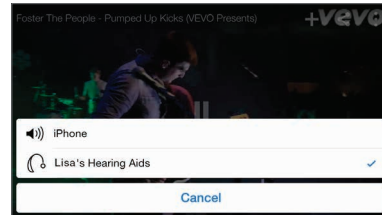

Sie können auch Audio-Dateien aus anderen Apps, wie zum Beispiel YouTube™, streamen.




Öffnen Sie dazu eine Mediaplayer-App – wie etwa YouTube™ und tippen Sie dann auf das AirPlay Symbol.

Wählen Sie die Hörsysteme zum Streaming aus und tippen dann auf «Play». Tippen Sie auf «Pause», um den Video-Stream anzuhalten. Wenn Sie zum normalen Telefonbetrieb zurückkehren möchten, tippen Sie auf das «AirPlay Symbol» und dann auf «Phone» im Dialogfeld.

TIPP WENN ICH EINEN ANRUF AUF MEINER APPLE WATCH ANNEHME, WIRD DANN DER TON AUF MEINE HÖRSYSTEME ÜBERTRAGEN

Wenn Sie einen Anruf auf Ihrer Apple Watch erhalten, tippen Sie auf dem iPhone auf «Annehmen», um den Ton in Ihrem Hörsystem zu hören. Nutzen Sie das Mikrofon Ihres iPhones, um Ihre eigene Stimme zu erfassen.

TELEFONANRUF UND ANRUF ÜBER FaceTime

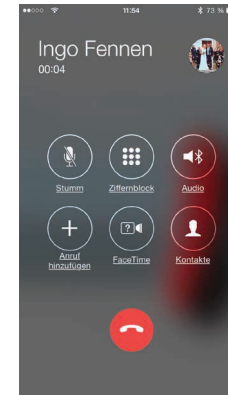

Wenn ein Anruf eingeht, während Sie Audio-Dateien von Ihrem Mediaplayer streamen, können Sie den Anruf einfach annehmen, denn das System regelt die Lautstärke der Musik automatisch herunter und wechselt auf das Gespräch.

Sobald das Gespräch beendet ist, setzt das System die Audioübertragung an der Stelle fort, an der sie für den Anruf angehalten wurde.





Intelligente Steuerung und Personalisierung mit der ReSound Smart™ App



HERUNTERLADEN UND INSTALLATION DER RESOUND SMART APP

Die ReSound Smart™ App kann wie folgt kostenlos aus dem App Store heruntergeladen werden:

1. Rufen Sie den App Store auf.
2. Suchen Sie nach «ReSound Smart».
3. Falls Sie ein iPad verwenden, ändern Sie das Suchkriterium in der linken oberen Ecke zu «Nur iPhone».
4. Tippen Sie auf «Laden» und danach auf «Installieren», um den Download der App zu starten.
5. Nun sind Sie fast fertig und können Ihr individuelles Hörerlebnis einstellen.

VERBINDUNG DER RESOUND SMART APP MIT IHREM HÖRSYSTEM


Wenn Sie das erste Mal auf das Symbol auf dem Hauptbildschirm tippen, um die ReSound Smart App zu öffnen, werden Sie durch die folgenden Schritte geleitet:

1. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie jetzt das Hörsystem starten oder im Demo-Modus fortfahren möchten, wählen Sie bitte «Jetzt starten».
2. Sie werden darauf hingewiesen, den gedruckten Leitfaden für Verwender des Hörsystems durchzulesen und die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Tippen Sie bitte auf «Annehmen», um fortzufahren.
3. Ihnen wird eine Liste mit Hörsystemen angezeigt, die mit der ReSound Smart App kompatibel sind – tippen Sie bitte auf «Ok», um fortzufahren.
4. Wenn Ihre Hörsysteme nicht mit Ihrem mobilen Endgerät verbunden sein sollten, erscheint ein Bildschirm, auf dem Ihnen erläutert wird, wie Sie die Verbindung herstellen können.
5. Wenn Sie gefragt werden, ob die App Ihren Standort verwenden darf, tippen Sie auf «Erlauben».
6. Nun können Sie die ReSound Smart App verwenden.

Die ReSound Smart™ App im Überblick

Die App verfügt über zwei Hauptansichten: Lautstärkeregelung und Programmauswahl. Durch Wischen oder mit Hilfe der Navigationsschaltflächen können Sie ganz leicht von einer Ansicht zur anderen wechseln. Über die Schaltfläche „Hauptmenü“ gelangen Sie zu weiteren Funktionen der App.

NAVIGATION ZWISCHEN HAUPTBILDSCHIRMEN

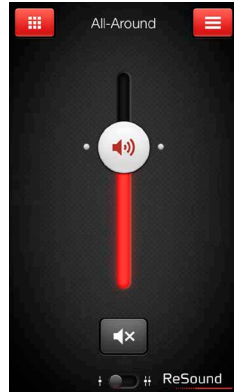


Lautstärkeregelung



Über diese Schaltfläche gelangen Sie zur Programmauswahl.



Über diese Schaltfläche gelangen Sie zum Hauptmenü, in dem Sie weitere Funktionen finden.

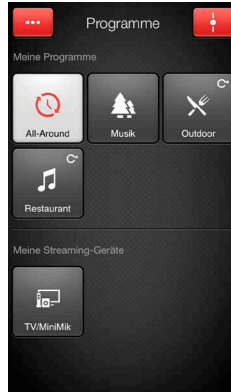


Programmauswahl



Tippen Sie auf die Schaltfläche «Mehr Optionen», um zu den erweiterten Funktionen zu gelangen.




Wenn Sie sich auf der Programmseite befinden, gelangen Sie über diese Schaltfläche zurück zur Lautstärkeregelung.

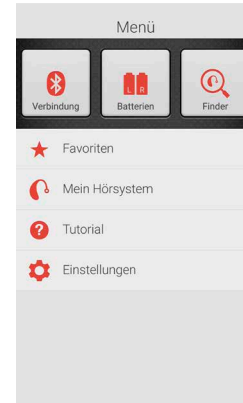

Hauptmenü für zusätzliche Funktionen



Tippen Sie auf die «Zurück-Schaltfläche», um zum Lautstärkeregelungsbildschirm zurückzukehren.

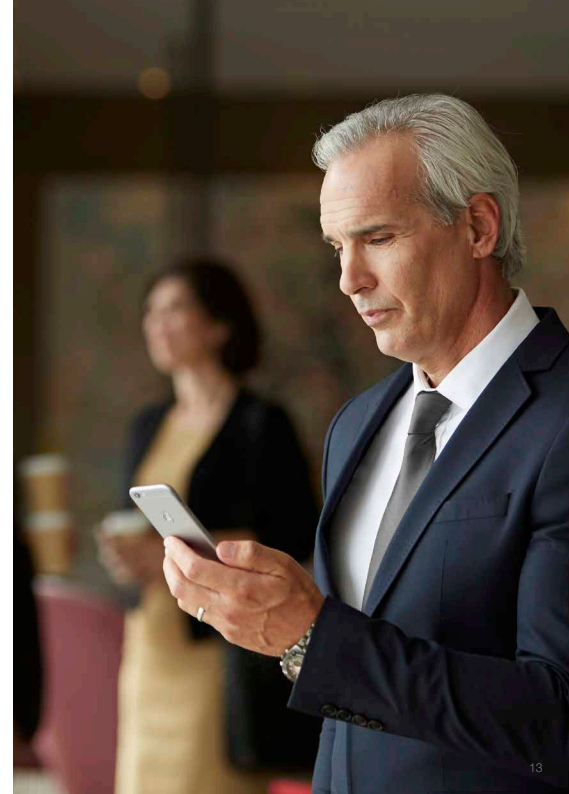

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE




Kombinierte Lautstärke- regelung



Schieben Sie den Lautstärkeregler nach oben bzw. nach unten, um die Lautstärke des Hörsystems zu erhöhen bzw. zu senken.



Tippen Sie auf die «Stumm-Schaltfläche» unterhalb des Lautstärkereglers, um den Ton auszuschalten. Tippen Sie nochmals darauf, um den Ton wieder einzuschalten.

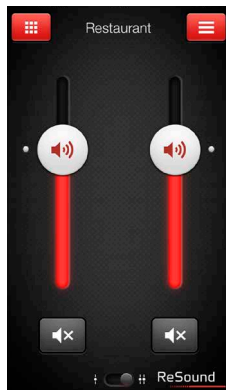

Separate Lautstärke- regelung




Nutzen Sie die Zoom-Geste (zwei Finger auseinanderziehen), um zwischen der kombinierten und unabhängigen Lautstärke-regelung für das Hörsystem zu wechseln.



Alternativ können Sie auch auf die Schaltfläche «Umschalten» tippen, die sich im unteren Teil der Bildschirmansicht befindet.

WECHSELN DES PROGRAMMS

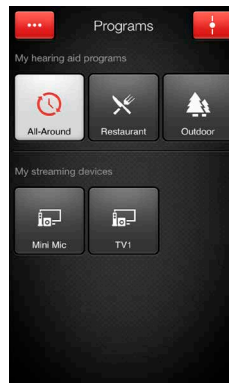

Manueller Programm- wechsel



Tippen Sie auf die Schaltflächen, um eins der bis zu vier Hörprogramme auszuwählen, die für bestimmte Hörsituationen optimiert wurden. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, ist jedes Programm mit einem eigenen Symbol gekennzeichnet.


Wechsel von Streaming-Geräten



Tippen Sie auf die Schaltfläche für Streaming-Geräte, um einen Stream von einem ReSound Unite™ Gerät, wie zum Beispiel dem ReSound Unite™ Audio Beamer 2, zu aktivieren.



LAUTSTÄRKEREGLUNG FÜR STREAMER

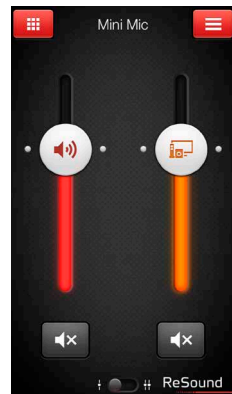

Streamer-Lautstärke




Wurde ein Streaming-Programm ausgewählt, können Sie die Lautstärke für diesen Streamer über den orangefarbenen Schieberegler individuell anpassen.

Hörsystem-Lautstärke



Sie können weiterhin die Lautstärke der Hörsysteme anpassen oder diese stummschalten, ohne dass dies einen Einfluss auf die Lautstärke der von Ihnen gestreamten Audio-Dateien hat.

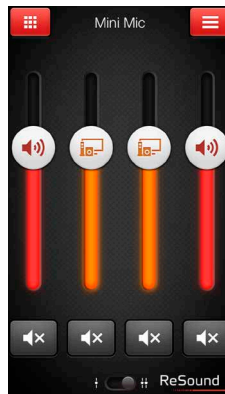

Separate Lautstärkeregelung




Die Lautstärke für Ihre beiden Hörsysteme können Sie unabhängig voneinander einstellen. Durch Zusammenführen zweier Finger auf dem Bildschirm können Sie zwischen der kombinierten und der separaten Lautstärkeregelung hin- und herwechseln. Alternativ können Sie auch auf die Schaltfläche «Umschalten» tippen, die sich im unteren Teil der Bildschirmanzeige befindet.

TIPP KANN ICH MEINE GERÄTE STUMMSCHALTEN

Sie können jedes Gerät unabhängig voneinander stummschalten. Betätigen Sie hierzu einfach die Stumm-Schaltfläche unterhalb des jeweiligen Lautstärkereglers.

ANPASSEN VON BÄSSEN UND HÖHEN

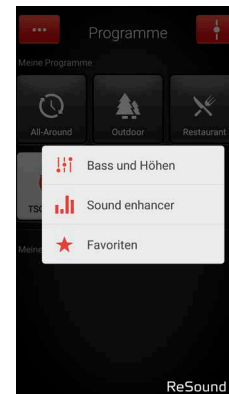

Mehr Optionen




Über die rote Schaltfläche «Mehr Optionen» oben links in der Bildschirmanzeige öffnet sich ein Pop-Up-Menü mit weiteren Optionen. Hier können Sie Ihr Hörprogramm nach Ihren Vorlieben verändern und Ihr Hörerlebnis personalisieren.

Option für Bässe und Höhen



Sie können die Bässe und Höhen für sämtliche eingehende Audiosignale ändern.

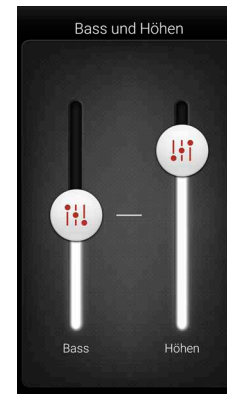

Anpassen der Bässe und Höhen




Durch Bewegen der Schieberegler nach oben bzw. nach unten können Sie für die eingehenden Töne mehr oder weniger Bass bzw. Höhen einstellen.

TIPP KANN ICH MEINE EINSTELLUNGEN SPEICHERN

Wenn Ihnen die aktuellen Bässe und Höhen gefallen, können Sie diese Einstellung als Favoriten speichern. Mit dem ReSound LiNX®, dem ReSound ENZO und dem ReSound Up Smart bleiben Ihnen die Anpassungen bis zum nächsten Neustart Ihres Hörsystems erhalten (d. h. wenn das Batteriefach geöffnet und wieder geschlossen wird).

SOUND ENHANCER: PERSONALISIEREN SIE IHR KLANGERLEBNIS

Je nachdem, wie Ihr Hörakustiker Ihre Programme konfiguriert hat, erscheint im Pop-Up-Menü «Mehr Optionen» der Auswahlpunkt «Sound Enhancer». Der Sound Enhancer ist nur für ReSound LiNX² 9, ReSound ENZO 9 und ReSound Up Smart 9 verfügbar.

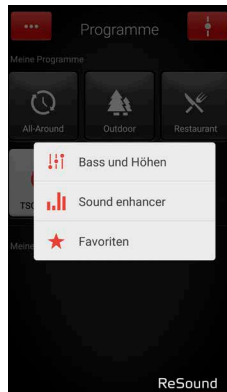


Die einzelnen Anpassungen können Sie vornehmen, indem Sie den Schieberegler zur gewünschten Stelle bewegen oder auf die Darstellung tippen.



Wenn Sie Ihre Anpassungen wieder rückgängig machen und zu den Voreinstellungen im Programm zurückkehren möchten, tippen Sie auf «Rückgängig».

Im unteren Teil der Bildschirmansicht werden Ihnen Registerkarten mit Funktionen angezeigt, die Ihnen im Sound Enhancer zur Verfügung stehen.

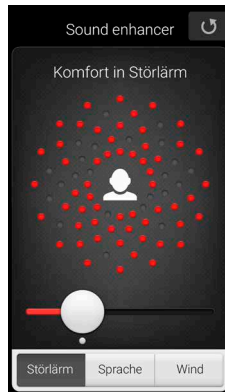

Komfort in Störlärm

Die Störgeräuschunterdrückung lässt sich für unterschiedliche Situationen einstellen. Dabei reicht die Spanne von der Wahrnehmung der gesamten Umgebung bis hin zu gezieltem Hören.

TIPP SIE KÖNNEN IHRE LIEBLINGSEINSTELLUNGEN SPEICHERN

Speichern Sie Ihre Einstellungen als Favoriten. So können Sie sie Ihrem Hörakustiker bei Ihrem nächsten Besuch zeigen.




Sprachfokus

Entscheiden Sie selbst, wie stark Sie sich auf einen Sprecher fokussieren, indem Sie den Öffnungswinkel Ihrer Mikrofone einstellen.

Wurde für die Hörsysteme der automatische Fokus eingestellt, wird in die manuelle Einstellung gewechselt, sobald Sie eine Anpassung des Sprachfokus vornehmen. Wenn Sie den automatischen Fokus wieder aktivieren möchten, drücken Sie einfach auf die Schaltfläche «Rückgängig».

TIPP OPTIMIEREN SIE DEN SPRACHFOKUS

Beim Anpassen des Sprachfokus sollten Sie auch versuchen, den Komfort in Störlärm zu optimieren, um so ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.

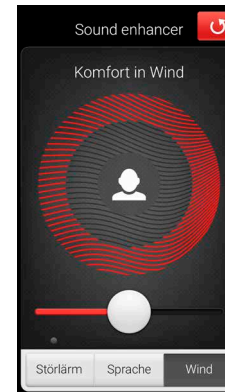


Komfort in Wind

Damit Sie auch bei stärkerem Wind einen optimalen Hörkomfort genießen, können Sie die Windgeräuschreduzierung in Ihren Hörsystemen anpassen.

TINNITUS MANAGER

Sie können den Tinnitus-Manager in der App nur aufrufen, wenn Ihr Hörakustiker im gewählten Programm den Tinnitus Sound Generator aktiviert hat. Die Programme werden durch ein kleines Symbol auf der Schaltfläche des Programms gekennzeichnet. Über den Punkt "Mehr Optionen" gelangen Sie zum Tinnitus-Manager.

ZUGRIFFSMÖGLICHKEITEN IN DER APP

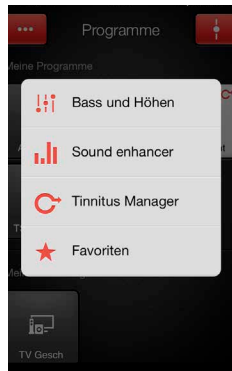

Den Tinnitus-Manager finden Sie in der Bildschirmansicht des jeweiligen Programms im Menü.



Wenn Sie Ihre Anpassungen wieder rückgängig machen und zu den Voreinstellungen im Programm zurückkehren möchten, tippen Sie auf «Rückgängig».

Programm mit weißem Rauschen




Klangvariation

Um die Toneingangs-Variation für das weiße Rauschen anzupassen, wählen Sie eine von den oberen Schaltflächen aus.

Tonhöhe


Zum Anpassen der Frequenzgangkompensation (Tonhöhe) bewegen Sie die beiden Schieberegler nach links bzw. rechts.

Programm mit Nature Sounds™

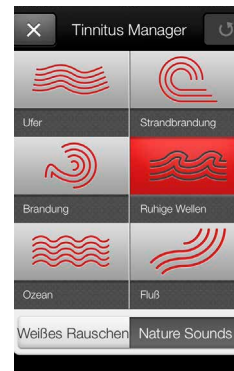

Nature Sounds

Wählen Sie einen der sechs neuen Naturklänge für Ihr Hörsystem.

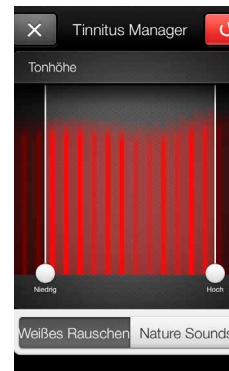


Aktivierung von weißem Rauschen

Sie haben auch die Möglichkeit, den Toneingang mit weißem Rauschen zu überlagern und die Tonhöhe anzupassen.

TIPP SPEICHERN VON LIEBLINGSEINSTELLUNGEN

Speichern Sie Ihre Einstellungen im Tinnitus-Manager als Favoriten. So können Sie sie Ihrem Hörakustiker bei Ihrem nächsten Besuch zeigen.


FAVORITEN

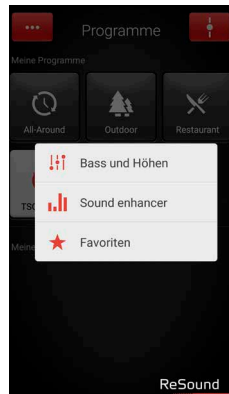

Hinzufügen eines Favoriten


Ihre Lieblingseinstellungen für Lautstärke, Bässe und Höhen, Sound Enhancer und Tinnitus-Manager können Sie als Favoriten speichern. Darüber hinaus ist es möglich, einen Favoriten einem Ort zuzuweisen. In diesem Fall wird der Favorit in Ihren Hörsystemen aktiviert, sobald Sie den Ort betreten.

TIPP DIE FAVORITENLISTE LÄSST SICH AUCH AUS DEM HAUPTMENÜ AUFRUFEN

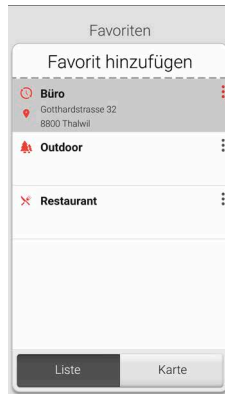

Favoriten im Überblick


Um einen neuen Favoriten in die Favoritenliste aufzunehmen, drücken Sie auf «Favorit hinzufügen» und aktivieren Sie anschließend einen vorhandenen Favoriten durch Antippen des Namens. Sie können zwischen der Listenansicht und der Kartenansicht wechseln.

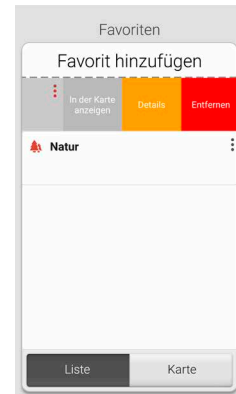

Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für Favoriten

Wenn Sie auf einem Favoriten nach links wischen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

- Kartenansicht (falls ein Standort hinzugefügt wurde)
- Details
- Entfernen

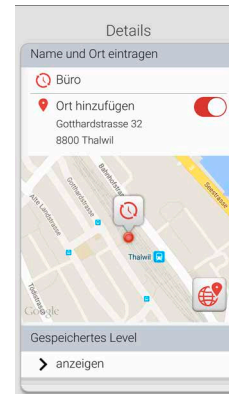

Detailansicht für Favoriten


In der Detailansicht können Sie den Namen des jeweiligen Favoriten ändern und einen Ort hinzufügen bzw. entfernen.

Ausserdem können Sie sich die gespeicherten Werte für Lautstärke und Bässe/Höhen, aber auch die Eigenschaften im Sound Enhancer anzeigen lassen.

TIPP KANN ICH MEINE FAVORITEN ÄNDERN, OHNE DASS DIE EINSTELLUNGEN VERLOREN GEHEN

Wenn Sie einen Favoriten wählen und die gespeicherten Einstellungen wie die Lautstärke oder Bässe und Höhen anpassen, können Sie diese Änderung am Profil anschließend als neuen Favoriten speichern.

SUCHASSISTENT: SUCHE NACH VERLEGTE HÖRSYSTEMEN

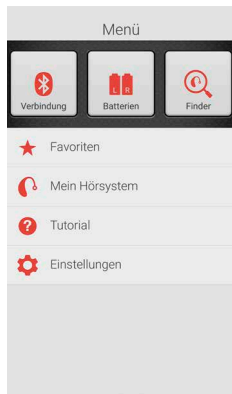



Finder

Mit dem Finder können Sie nach verlegten Hörsystemen suchen.

Suche in der näheren Umgebung

Spürt die App die Hörsysteme in Reichweite auf, wechselt sie in den Modus „Nähe“. Wenn Sie nun umherlaufen, wird Ihnen über die roten Balken angezeigt, ob Sie sich den Hörsystemen nähern oder sich weiter von ihnen entfernen.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen die Hörsysteme eingeschaltet sein.

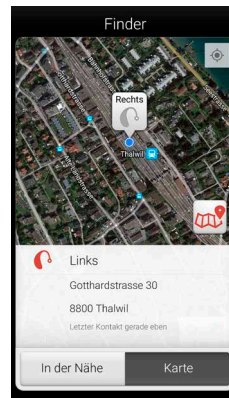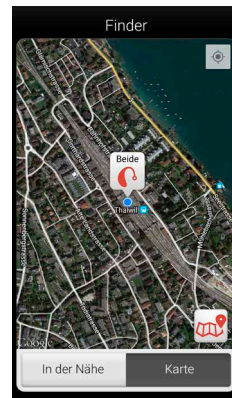

Fernsuche

Kann die App die Hörsysteme nicht in der näheren Umgebung finden, wechselt sie in die Ansicht „Karte“. Hier wird Ihnen angezeigt, wo sich die Hörsysteme befanden, als sie zuletzt mit der App verbunden waren.



Satellitenansicht

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie zur Satellitenansicht wechseln möchten. Ein erneutes Tippen auf die Schaltfläche bringt Sie zur Kartenansicht zurück.

Letzter Standort

Durch Antippen des Standortsymbols wird Ihnen der zuletzt bekannte Standort Ihrer Hörsysteme samt Uhrzeit angezeigt.


WEITERE APP-OPTIONEN

Nützliche Informationen zur Verwendung Ihrer Hörsysteme.



Mein Hörsystem

Erfahren Sie hier, wie Ihnen die smarten Hörsysteme den Alltag erleichtern.

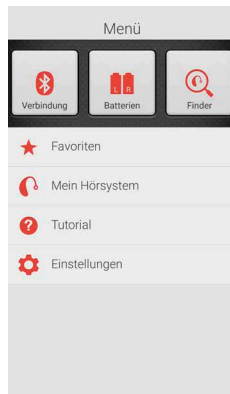

Batteriestatus





Über diese Schaltfläche wird Ihnen angezeigt, welchen Ladezustand die Batterien in Ihrem linken und rechten Hörsystem haben. Zur Kennzeichnung des Ladezustands wird das Batteriesymbol entweder als vollständig aufgeladen, als teilweise entladen oder als fast vollständig entladen abgebildet.



In diesem Beispiel bedeuten die Symbole, dass die Batterie im rechten Hörsystem vollständig aufgeladen ist, während der Ladezustand der Batterie im linken Hörsystem sehr gering ist.

VERBINDUNGSSTATUS

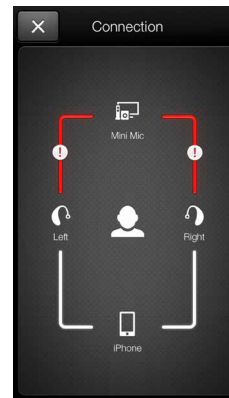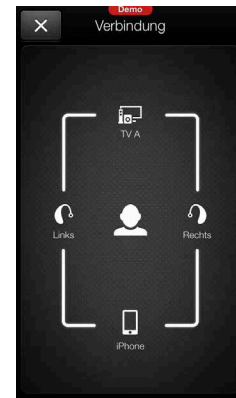

Prüfen der Verbindungen

Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen den Status der Verbindungen zwischen Ihren Hörsystemen, dem Streamer und dem Apple-Gerät.

Sollte keine Verbindung bestehen oder die Verbindung unterbrochen sein, wird die zugehörige Linie rot und mit Ausrufezeichen markiert.

TIPP WAS KANN ICH TUN, WENN EINE VERBINDUNG UNTERBROCHEN IST

Wird angezeigt, dass eine Verbindung unterbrochen ist, drücken Sie auf das entsprechende Ausrufezeichen. So erhalten Sie Anweisungen dazu, wie Sie diese Verbindung wiederherstellen können. Sie sollten in jedem Fall überprüfen, ob Ihre Hörsysteme eingeschaltet und in Reichweite des Telefons sind und ob die Batterien ausreichend aufgeladen sind. Wenn die Verbindung nicht direkt wiederhergestellt wird, können Sie auch versuchen, das Batteriefach zu öffnen und wieder zu schließen.

APP-EINSTELLUNGEN

Einstellungen	
Favoriten	➤ 1
Sie können die Einstellungen als Favoriten speichern und verwalten	
Programme umbenennen	➤ 2
Sie können die Namen der angepassten Programme ändern	
Demomodus	☐ 3
Testen Sie die ReSound Smart™ App ohne Hörsystemverbindung	
Hörsystem-Paarung aufheben	➤ 4
Sie können Ihre Hörsysteme erneut verbinden oder ein neues Paar mit Ihrem Telefon verbinden	
Über die ReSound Smart™ App	➤ 5

Einstellungen

Über die App-Einstellungen können Sie Änderungen an bestimmten Funktionen der ReSound Smart™ App vornehmen.

1. Sofort alle Favoriten entfernen
2. Programme umbenennen
3. Demo-Modus
4. Trennen der Verknüpfung mit den Hörsystemen
5. Hintergrundinformationen zur ReSound Smart App



RESOUND SMART™ APP FÜR DIE APPLE WATCH™

Mit der ReSound Smart App können Sie Ihre Smart Hearing Hörsysteme einfach von Ihrem Handgelenk bedienen.

Wie Sie die ReSound Smart App auf Ihrer Apple Watch installieren

Was Sie brauchen

Die ReSound Smart App muss auf Ihrem iPhone installiert sein und mindestens auf die Version v. 3.0.1 aktualisiert werden. Auf S. 3 finden Sie Informationen zur Kompatibilität mit Apple.

Wie Sie die Verbindung herstellen

Verbinden Sie Ihre Apple Watch mit Ihrem iPhone. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der Begleit-App für die Apple Watch auf Ihrem iPhone.



Wie Sie die App auf Ihrer Apple Watch installieren

Über die Begleit-App für die Apple Watch auf Ihrem iPhone können Sie die Apps auf Ihrer Apple Watch aktivieren bzw. deaktivieren und Einstellungen daran vornehmen, wie z. B. an der ReSound Smart App.

LAUTSTÄRKEREGLUNG



Regelung der Hörsystem-Lautstärke

Tippen Sie auf das + oder das – Symbol, um die Lautstärke des Hörsystems zu erhöhen oder zu senken.

Um das Hörsystem stummzuschalten, tippen Sie kräftig auf den Bildschirm. Um die Stummschaltung aufzuheben, tippen Sie auf die Symbole + oder –.



Lautstärkeregelung für Streaming

Wurde ein Streaming-Programm ausgewählt, können Sie die Lautstärke für dieses Streaming-Gerät über den orange-farbenen Schieberegler individuell anpassen.

Ebenso besteht die Möglichkeit, die Stummschaltung für den Streamer durch festes Drücken (Force Touch) zu aktivieren.

PROGRAMME UND FAVORITEN



Auswahl eines Programms oder eines Favoriten

Um ein Programm auszuwählen, tippen Sie das zugehörige Symbol an. Blättern Sie nach unten, wo Sie aus den Hörprogrammen, den Streamer-Programmen und Ihren eigenen Favoriten auswählen können.

Über die ReSound Smart™ App auf Ihrem iPhone können Sie neue Favoriten anlegen.

BÄSSE UND HÖHEN



Anpassen der Bässe und Höhen

Über die Symbole + und – können Sie die Bässe bzw. Höhen verstärken bzw. abschwächen.

SOUND ENHANCER

(LINX² 9, ENZO 9 UND UP SMART 9)

Anpassen des Sound Enhancers

Alle drei Eigenschaften können Sie durch Antippen der Symbole + und – anpassen. Durch festes Drücken können Sie die Voreinstellungen wiederherstellen.



Hörkomfort

Sie können die Höhe des Hörkomforts anpassen, indem Sie die Störgeräuscherdrückung verstärken oder reduzieren.



Sprachfokus

Den Sprachfokus können Sie durch Einstellen der Schallbündelbreite anpassen.



Komfort bei Wind

Bei Wind können Sie den Hörkomfort optimieren, indem Sie die Windgeräuscherdrückung verstärken oder reduzieren.

TIPP KANN ICH FÜR DIE RESOUND SMART APP AUCH APPLE WATCH GLANCES VERWENDEN

Wenn Sie auf einen Blick sehen möchten, in welchem Programm Sie sich gerade befinden, können Sie Glances verwenden. Wischen Sie dazu einfach auf dem Display der Uhr nach oben und anschließend zur Seite, bis die ReSound Smart App erscheint. Schon wird Ihnen der Name des aktuellen Programms angezeigt. Durch Berühren des Displays gelangen Sie zur App.


TIPP WIE BEWEGE ICH MICH ZWISCHEN BILDSCHIRMEN

Um von einem Bildschirm zum anderen zu wechseln, wischen Sie auf dem Display einfach seitwärts.

Steuerung Ihrer Hörsysteme mit Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch

WIE SIE AUF DIE GRUNDLEGENDE LAUTSTÄRKE-REGELUNG UND PROGRAMMSTEUERUNG ZUGREIFEN

Drücken Sie dreimal auf die Home-Taste auf Ihrem Apple Gerät, um auf die grundlegende Lautstärkeregelung und die Programmsteuerung zuzugreifen.

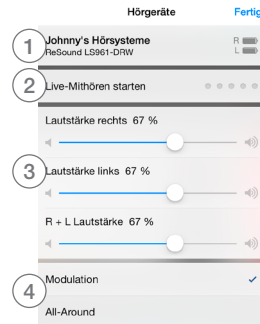


1. Der Name, das Modell und der Batteriestatus für Ihre Hörsysteme.
2. Start und Stop von Live-Mithören starten, um Ihr iPhone, iPad oder iPod touch als externes Mikrofon zu verwenden.
3. Individuelle Lautstärkeregelung für jedes Hörsystem.
4. Ansicht und Wechsel des Programms.





Weitere Apps von ReSound

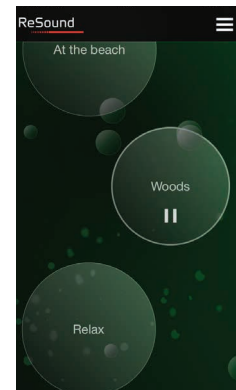

ReSound Relief™



Wenn Sie unter Tinnitus leiden, empfehlen wir Ihnen die ReSound Relief App.*

Entspannende Klänge und Übungen helfen Ihnen, sich von Ihrem Tinnitus abzulenken.

resound.com/reliefapp

* Je nach Verfügbarkeit in Ihrem Land.

1902433 Stand 122015

info@gnresound.de
www.resound.com

ReSound

