

ワイヤレス アクセサリ 簡単ガイド

ReSound GN

KTG0585 WA 13 1801C-18013K

TVユナイトII

● 使用開始

TVユナイトIIとテレビを接続後、リモコンユナイトIIのテレビボタン/補聴器本体のプログラム選択ボタン(マルチファンクションボタン)で使用開始してください。補聴器本体で操作する場合は補聴器の取扱説明書をご参照ください。




リモコンユナイトII




接続方法の説明

1 本体とACアダプタをケーブルで接続します。

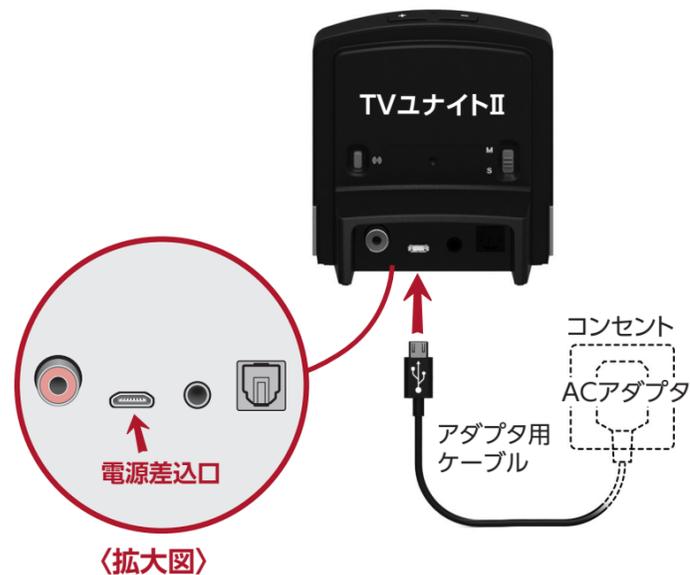

ACアダプタをコンセントに差し込み、アダプタ用ケーブルを電源差込口に差し込んでください。


2 本体とテレビを光デジタルケーブルで接続します。

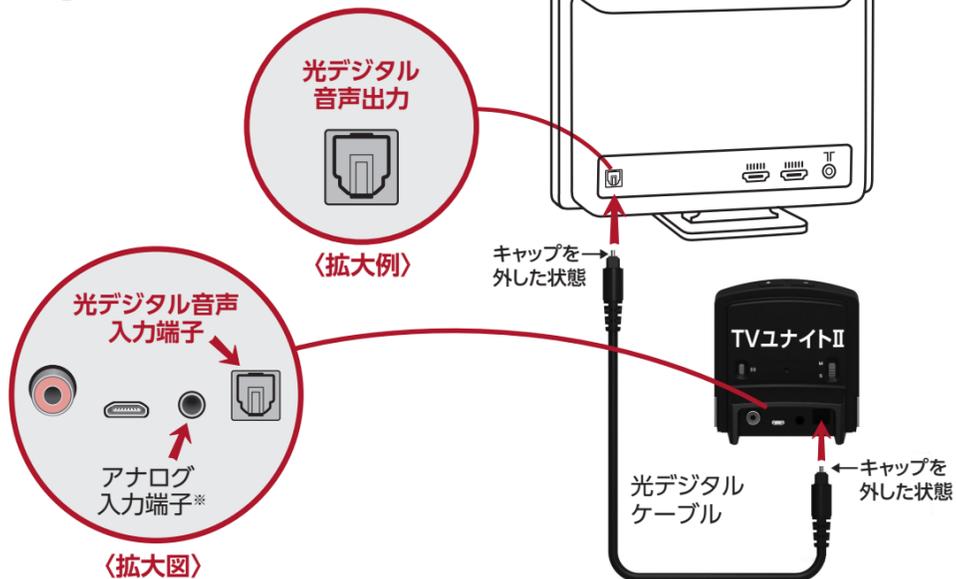

※テレビに光デジタル音声出力端子がない場合は、オーディオケーブルでアナログ音声出力端子、またはヘッドホン端子に接続してください。ヘッドホン端子を使う場合、テレビのスピーカーから音が出なくなる場合があります。テレビの取扱説明書をご参照ください。

※TVユナイトIIはAACに対応していません。光デジタルケーブルをご使用の場合は、テレビの光デジタル音声出力をPCMに設定してください。テレビの取扱説明書をご参照ください。

● 画面の見方

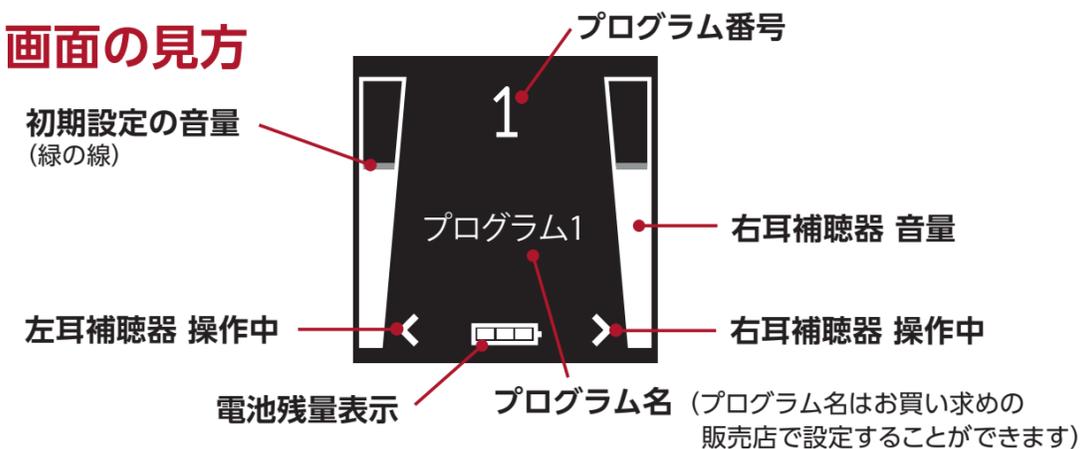

TVユナイトII付属品一覧

① 本体




② ACアダプタ (1個)



③ アダプタ用ケーブル (1本)



④ オーディオケーブル (1本)

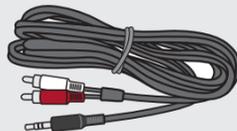

⑤ 光デジタルケーブル (1本)




注意

- 破損の原因となりますので、光デジタルケーブルを直径50mm未満で折り曲げないでください。
- ご使用前にキャップを外してください。

携帯ユナイトII、マルチマイク、マイクロマイクの使い方は裏面へ



携帯ユナイトII

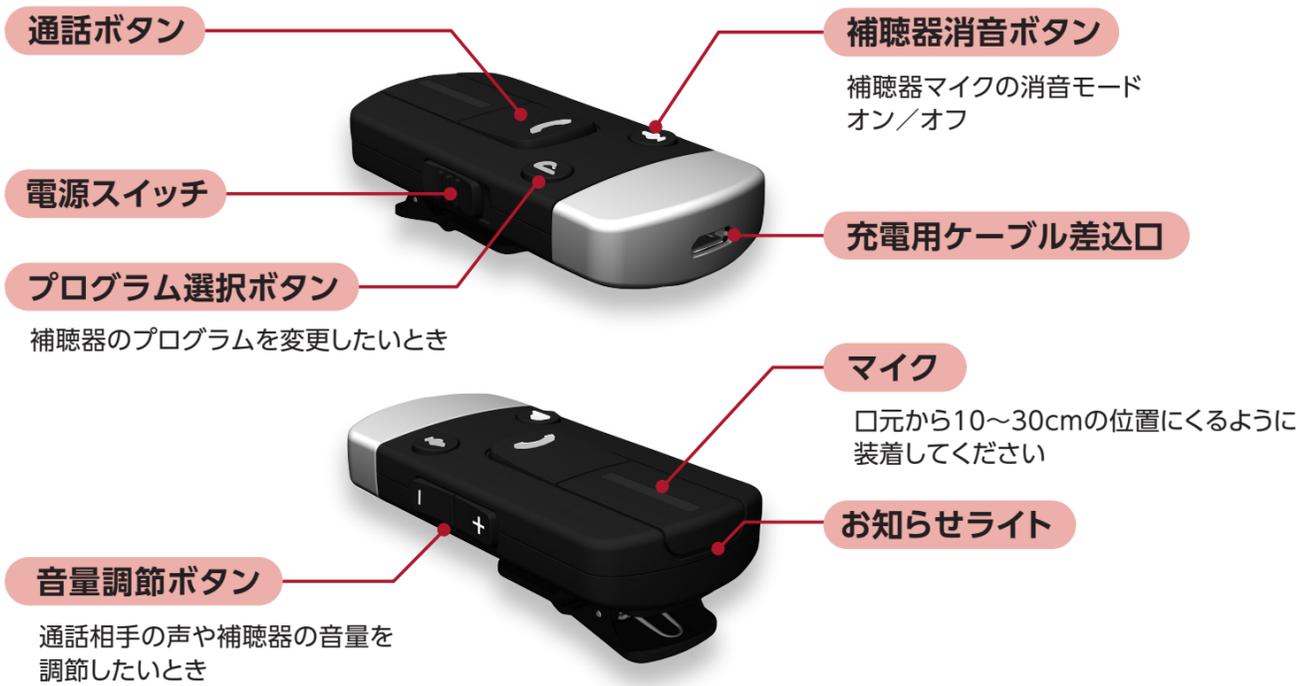

● 着信通話の方法

着信通話	操作方法
着信通話・通話終了	(通話ボタン)を1度押してください。
通話拒否	(通話ボタン)を2度押してください。
保留	(通話ボタン)を長押ししてください。
最後にかけた番号へのリダイヤル	通話中・着信中以外に、通話ボタンを2度押してください。
通話相手の声の音量調節	携帯ユナイトII右側面の (音量調節ボタン)を押してください。
通話中に周囲の環境音(補聴器マイクからの入力)の消音モードオン/オフ	携帯ユナイトII表面の (補聴器消音ボタン)を押してください。

※通話開始や終了は携帯電話でも操作できます。(携帯電話と携帯ユナイトIIがBluetooth通信中は、自動的に携帯ユナイトIIでの通話になります)
 ※発信は、通常通り携帯電話上で操作してください。

登録商標
 Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc. の商標です。その他、記載されている製品名、会社名などの固有名詞は各社の商標または登録商標である場合があります。

● お知らせライトの意味

ライトの点灯状態	携帯ユナイトIIの状態
緑色点滅	待機中
オレンジ色点滅	電池残量減少
赤色点灯	充電中
赤色と緑色が交互に点滅	充電完了

ライトの点灯状態	携帯ユナイトIIの状態
オレンジ色点滅(20秒間)	補聴器とのペアリング中
青色点灯(2分間)	携帯電話とのペアリング中
青色点滅	通話中

マルチマイク・マイクロマイク

■ マルチマイク



■ マイクロマイク



● 装着方法
 マイクを口元から10~40cm離して垂直に装着してください。

● 使用開始
 リモコンユナイトIIのテレビボタン/補聴器本体のプログラム選択ボタン(マルチファンクションボタン)で使用開始してください。補聴器本体で操作する場合は補聴器の取扱説明書をご参照ください。

● お知らせライト点灯表示早見表

色	マルチマイク/マイクロマイクの状態
■ 緑色	マルチマイク/マイクロマイクの状態
点滅	電源オン*
■ 点灯(約3秒間)	電源オンに変更*
■ オレンジ色	マルチマイク/マイクロマイクの状態
点滅	電源オン(電池残量少)*
■ 赤色	マルチマイク/マイクロマイクの状態
■ 点灯(約3秒間)	電源オフに変更
■ 点灯	充電中

*音量レベル固定中は、2回ずつ点滅します。

多色(■緑色 ■オレンジ色 ■赤色)	マルチマイク/マイクロマイクの状態
■ ■ ■ 点灯	音量レベル固定設定変更 設定 ↔ 解除
■ ■ ■ 点灯	充電中(電源オン)*
■ ■ ■ 点灯	充電完了(電源オン)*
■ ■ ■ 点灯	充電完了(電源オフ)

※TVユナイトII、リモコンユナイトII、携帯ユナイトII、マルチマイク、マイクロマイクはそれぞれ別売です。 ※登録商標：Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。