

ジーエヌリサウンドジャパン株式会社

☎ 0120-921-310

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル 8F

www.resound.com/control



品質マネジメントシステム: ISO 9001:2008とISO 13485:2003

©The GN ReSound Group 2016. Apple, Apple ロゴ, iPhone, iPad, iPod touch は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。Apple Watch は Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。Android と Google Play は Google Inc. の登録商標です。アンドロイドロボットは、クリエイティブコモンズライセンス3.0 に従って使用され、Google によって制作および共有されているものを利用または修正しています。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

※記載の性能・仕様は改良等のため予告なく変更する場合があります。

※製品の色は実物と異なる場合があります。

※この説明書の内容は、2016年4月現在のものです。



KTG0581 WA 1604A-1604500



コントロールアプリ™ 使用方法



ReSound

rediscover hearing

コントロールアプリ™対応モバイル端末



コントロールアプリ™は以下のモバイル端末に対応

- iOS7以降を搭載したiPhone、iPad および iPod touch
- バージョン2.3.5以降を搭載したAndroid™ スマートフォン

最新の対応端末についての情報はApp StoreまたはGoogle Playでご確認ください。



コントロールアプリ™の入手方法

コントロールアプリ™は無料でダウンロード可能です。ご利用のモバイル端末を使って、App StoreまたはGoogle Playにアクセスし、「**ReSound Control**」を検索してください。「**入手**」をタップし※、続いて「**インストール**」をタップし、ご利用のモバイル端末にダウンロードしてください。

※お使いの端末によって異なります。



携帯ユナイト™ II



コントロールアプリ™をご利用になるには、リサウムのスマート補聴器又はワイヤレス補聴器と携帯ユナイト™ IIが必要となります。

ペアリング方法

コントロールアプリ™をご利用いただくには、お使いの補聴器とモバイル端末のそれぞれを携帯ユナイト™ IIとペアリングする必要があります。

モバイル端末と携帯ユナイト™ IIのペアリング

携帯ユナイト™ IIが充電されていることをご確認ください。銀色のカバーを外して電源をオンにし、モバイル端末の電源もオンにしてください。

モバイル端末上のBluetooth接続画面を開いてください。例えば、モバイル端末の「設定」から入ることができます。バージョンや機種によって表示が異なる場合がありますので、各端末の取扱説明書などでご確認ください。

モバイル端末のBluetoothがオンになっていることを確認し、ペン先などを使って携帯ユナイト™ IIの背面にある青いボタンを1度押してください。携帯ユナイト™ IIは120秒間のペアリングモードに入ります。

モバイル端末側でBluetooth機器の検索を行ってください。自動で表示される場合もあります。検索されたBluetooth機器リストの中から「Hearing Aid Phone」を選択してください。

モバイル端末がパスワード入力を求める場合は「0000（ゼロ4つ）」を入力してください。

これでモバイル端末と携帯ユナイト™ IIのペアリングが完了です。



モバイル端末によっては、どのBluetooth機器を有効にしたいかを尋ねる場合があります。その場合は「ヘッドセット」を選択してください。

モバイル端末と携帯ユナイト™ IIの接続

ペアリングが完了すると、モバイル端末によっては携帯ユナイト™ IIへ接続を行うかの確認が表示される場合があります。

手動で接続する必要がある場合：
モバイル端末のBluetoothメニューにある「ペアリングした機器」リストをご確認ください。「Hearing Aid Phone」をタップし、続いて「接続」をタップしてください。

補聴器と携帯ユナイト™ IIのペアリング

最後に、リサウンドの補聴器と携帯ユナイト™ IIをペアリングします。

携帯ユナイト™ IIの銀色のカバーを外し、白いペアリングボタンを押します。

20秒以内に補聴器の電池ケースを開け、再び閉めます。ペアリングが完了すると補聴器からお知らせ音が鳴ります。



コントロールアプリ™での補聴器操作

コントロールアプリ™をご使用になられる前に

本アプリのダウンロード、およびお使いの補聴器、携帯ユナイト™ IIとモバイル端末がペアリングされていることをご確認ください。ここでは、お使いのモバイル端末をリモコンとしてご利用いただける方法をご紹介します。



ホーム画面にあるコントロールアプリ™のアイコンをタップし、アプリを起動してください。

「今すぐ接続しますか？ デモモードで実行しますか？」と表示されたら「今すぐ接続」を選択してください。

利用規約への同意確認画面が出ましたら、内容をよくお読みいただき、同意いただける場合は「同意」をタップし、次に進んでください。同意いただけない場合はご利用いただけません。

モバイル端末のロック時の音およびキーボード入力音を無効にすることをお勧めします。通常、「設定」の「サウンド」で無効にすることが可能です。これらの音が携帯ユナイト™ IIやアプリの操作に支障をきたす場合があります。

アプリの「設定」の中でも、本アプリの使用方法や、モバイル端末と携帯ユナイト™ IIとの接続方法などをご覧いただけます。

コントロールアプリ™について

本アプリには音量調節画面とプログラム選択画面という二つのメイン画面があります。画面右上のプログラム選択画面ボタンで二つの画面の行き来が可能です。画面右下のリンク確認ボタンで、接続状況確認画面を見ることができます。



音量調節画面が本アプリのスタート画面です。

画面を上下にスワイプすることによって、両方の補聴器の音量調節が可能です。

音量バーの下にあるボタンをタップすることによって消音/消音解除を行うことが可能です。



指を右にスワイプすると、左耳の補聴器のみ調節可能です。同様に、左にスワイプをすると右耳の補聴器のみの調節が可能です。

補聴器操作と気づかれずに、音量調節/消音操作を行うことができます。



TVユナイト™ IIやマルチマイク、マイクロマイク、または携帯電話からの音声をストリーミングしている場合は、二つの白い音量バーの間に青い調節バーが表示されます。

青い調節バーで、その時ストリーミングをしている機器の音量調節が可能です*。

* TVユナイト™ IIとマルチマイク、マイクロマイクは音声ストリーミングを行う機器です。


コントロールアプリ™について



プログラムの選択

右上にあるプログラム選択画面へのボタンをタップしてください。その場の音環境に合わせてお好みのプログラムの選択が可能です。


補聴器用プログラムまたはワイヤレスアクセサリ用プログラムの中から、ご利用状況に合わせてお好みのプログラムをタップすることによって選択いただけます。

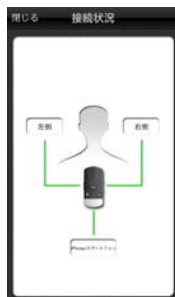

接続状況

音量調節画面右下のリンクボタンをタップし、接続状況画面へ移動します。


接続状況画面ではご利用のモバイル端末、携帯ユナイト™ II、補聴器、他のリサウンド・ワイヤレスアクセサリとの接続状況をご確認いただけます。

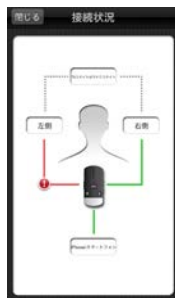

もしも接続が切れている場合は、切れている部分の線が赤色となり、「!」マークが表示されます。

「!」マークをタップすると、再接続についてのヒントが表示されます。

音量調節画面に戻るには画面左上の「閉じる」をタップします。

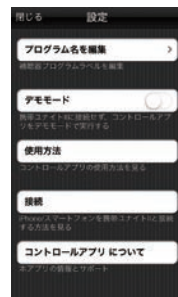

設定

「プログラム名を編集」からご利用のプログラム名およびリサウンド・ワイヤレスアクセサリの名称を変更可能です。「リセット」をタップすると既定のプログラム／ワイヤレスアクセサリ名に戻ります。

「デモモード」では携帯ユナイト™ II に接続せずに、コントロールアプリ™をデモモードでお試しいただけます。

「使用方法」からコントロールアプリ™の使用法を確認いただけます。

「接続」からモバイル端末を携帯ユナイト™ II に接続する方法をご確認いただけます。

「コントロールアプリ™について」からコントロールアプリ™のバージョン情報やサポート情報をご確認いただけます。

