

## リサウンド・エンヤ

# かけがえのない 日常のために



## ジーエヌリサウンドジャパン株式会社

**TEL 0120-921-310**

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-6-3 MM パークビル 8F

[www.resound.com/enya](http://www.resound.com/enya)



品質マネジメントシステム  
ISO 9001:2008とISO13485:2003

補聴器のご試聴・ご相談・ご用命は当店へ。  
お気軽にご来店ください。



※記載の性能・仕様は改良により予告なく変更する場合があります。  
※製品の色は実物とは異なる場合があります。



## 補聴器

## リサウンド・エンヤ 性能表

耳かけ型			62タイプ				67タイプ		77タイプ		88タイプ	
			LP	MP	HP	UP◎	オープン	クローズ	オープン	クローズ	パワー	ハイパワー
最大音響利得	1600Hz	± 5dB	49	56	61	80	52	56	53	56	66	72
90dB 最大出力 音圧レベル	ピーク	dB SPL 以下	126	129	134	140	126	135	133	137	142	142
誘導コイル入力 の最大感度	1600Hz	± 6dB SPL	81	87	92	111	79	82	82	85	95	100

耳あな型			CIC				ITC	ITC,ITE			
			LP	MP	HP	UP	LP	MP	HP	UP	
最大音響利得	1600Hz	± 5dB	43	50	59	70	43	50	59	70	
90dB 最大出力 音圧レベル	ピーク	dB SPL 以下	127	130	133	140	127	130	133	140	
誘導コイル入力 の最大感度	1600Hz	± 6dB SPL	—	—	—	—	—	81	88	99	

\*◎には有料オプションのカスタムモールドUP レシーバが必要となります。(補聴器と同時購入時(非課税):12,000円、別途購入時(課税・税込):23,760円)  
※補聴器には適切なフィッティングにより、その効果が発揮されます。しかし装着者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。  
本データは JIS C 5512:2000 の密閉形擬似耳により測定、表示しております。

## 安心の保証システム

リサウンド・エンヤ 4	<b>2年間無償保証</b> (シェルの再作含む) + <b>ほっとシステム</b>
リサウンド・エンヤ 3	
リサウンド・エンヤ 2	<b>1年間無償保証</b> + <b>ほっとシステム</b>

<b>2年間無償保証</b> (シェルの再作含む) + <b>ほっとシステム</b>	<b>1年間無償保証</b> + <b>ほっとシステム</b>
<p>お買い上げ日から2年間、無償にて修理・シェルの再作をいたします。その後、1回の修理につき3年目は20,000円、4年目は40,000円を上限とし、これを超える修理費用はご請求いたしません。</p> <p>※自然故障の場合のみ適用されます。修理費用は補聴器1台につきの金額です。</p>	<p>お買い上げ日から1年間、無償にて修理いたします。その後、2年目は1回の修理につき10,000円を上限とし、これを超える修理費用はご請求いたしません。</p> <p>※障害者総合支援法により交付を受けたものは、「ほっとシステム」の対象外となります。(1年間無償保証のみとなります) ※自然故障の場合のみ適用されます。修理費用は補聴器1台につきの金額です。</p>



このカタログは2016年1月現在のものです。

MKD0866 EY 05 1601A-160150K

## 会話の 聞き取りを重視



### かけがえのない日常のために

日々を楽しく過ごすには、例えば家族との会話や子どもたちの笑い声など、さまざまな音声をより良く聞き取ることが大切です。

一般的に加齢が進むにつれ、徐々に聴力低下が進行するため、聞こえにくくなっていることに気づきにくいのが現状です。

けれども、会話は少しずつ理解しにくくなり、さらには聞き取れないことに疲れを感じるようになり、ついには鳥のさえずりや小川のせせらぎといった、人生を豊かにするささやかな音声を忘れてしまうようになることもあります。リサウンド・エンヤは、自然に近い音質をお届けし、そうしたかけがえのない日常のひとときを、変わることなく楽しめるようにお手伝いいたします。

### 高度な音声処理技術

#### 雑音の中の会話も聞き取りやすく

- 環境適応型指向性が雑音の多い環境下においても、明確な会話の聞き取りをサポートします。



#### ハウリングをカット

- ウルトラDFS™IIがピーピー音をカット。ハウリングを気にせずお過ごしいただけます。



ハウリング防止

#### 騒音や風切り音などを抑制

- 騒音や風切り音がある環境においても、ノイズトラッカー™II雑音抑制やウインドガード™\*があればより快適に過ごすことができます。  
(※リサウンド・エンヤ2を除く)



#### 両耳のバランスを保つ連動機能

- 音量やプログラムも片方で調節したものが両耳に反映される、便利な両耳連動機能\*を備えています。  
(※リサウンド・エンヤ4  
RIE・BTE・ITE 対応)



信頼に足る  
品質と快適さ



## お届けするのは、信頼に足る品質と快適さ

1日中快適に装用できるように、リサウンド・エンヤは装用感が良く、目立ちにくく、その上洗練されたデザインを重視。さらにはさまざまな形状をご用意していますので、お好みに合わせた器種選択が可能です。

もちろん、リサウンドならではのナノテックコーティングが、汗や湿気から補聴器を守り、故障を未然に防ぎます。

しかも、初期段階の軽い難聴から重度難聴まで対応。ライフスタイルや聴力に合わせて、より良いものをお選びいただけます。

デザイン & バリエーション

### 洗練の代名詞 デンマークデザイン

- すっきりとした小型サイズに装用感にもこだわったデザインを揃えました



### 内部までしっかりナノテックコーティングだから汗や湿気に強い！

- スポーツでかく汗、日本独特の湿気、突然の雨、水に濡らした…などから補聴器を守るために、全製品内部までしっかり撥水加工を施しています。汗や湿気に強いから、故障しにくくなり、メンテナンスも簡単です。




### 選べる仕様、快適なオーダーメイド (耳あな) タイプ

- **こもり感を軽減 スラッシュベント加工**  
通気孔(ベント)の長さを約半分にカット。だから音を逃がしてこもりにくい！
- **圧迫感を軽減 デンプルシェル加工**  
皮膚との接触面積を大幅カット。だから密着しにくく快適。



皮膚と補聴器の接触面に空間を作成

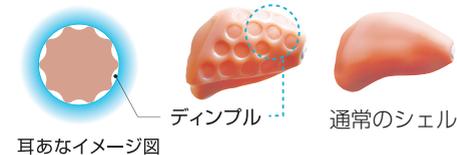

## 家族や友人との つながりを大切に



### ユナイト™ ワイヤレスシステム

用途に合わせて、補聴器をもっと便利にする4つのオプション



リモコンユナイト™ II

#### 音量やプログラムの細かい調節が手元で可能

シンプルで扱いやすいリモコンなので、補聴器の音量やプログラムを簡単に変更できます。

37,800円(税込)



TVユナイト™ II

#### テレビやオーディオをお好みの音量で

テレビやPC、音楽プレーヤーにつないでおくと、補聴器から直接聞こえるので、自分だけのお好みの音量で聞くことができます。

37,800円(税込)



マイクユナイト™

#### 会議や講演会なども聞き取りやすく

騒音の多い街中の会話や離れた人の声など、聞き取りにくい場面で、このマイクユナイト™ が効果を発揮し聞き取りを助けます。

32,400円(税込)



携帯ユナイト™ II



#### 携帯電話の音声は直接聞こえ、よりクリアに

携帯電話でもっと気楽に会話を楽しめるようにしたい。携帯ユナイト™ IIを使えば、補聴器から直接電話の声が聞こえ、快適に会話を楽しめます。同様に携帯電話からの音楽を聞くこともできます。

電話を使わないときは、音量調節やプログラム変更のリモコンとしても使えます。

37,800円(税込)



コントロールアプリ™



#### スマートフォンがリモコンに

スマートフォンアプリで補聴器の音量調節やプログラムの切り替えが可能です。App Store や Google play よりダウンロード無料です。

- ・携帯ユナイト™ IIが必要です。
- ・検索方法「リサウンド」で検索。
- ・iPhone、アンドロイド携帯の両方に対応。

アプリ使用環境：iOS7.x 以上がインストールされている iPhone、iPad、iPod touch 又は 2.3.5 以上の Android スマートフォン（全てに互換性があるわけではありません）

#### ■ アクセサリ対応表

	リモコンユナイト™ II	TV ユナイト™ II	マイクユナイト™	携帯ユナイト™ II	コントロールアプリ™
リサウンド・エンヤ4	●	●	●	●	●
リサウンド・エンヤ3	●	●	●	●	●
リサウンド・エンヤ2	●				

※CICはワイヤレス非対応

#### ■ お得なセットもご用意しています

セット内容	価格(税込)
リモコンII+テレビII+マイクセット	64,800円
リモコンII+テレビIIセット	54,000円
リモコンII+マイクセット	54,000円

\*セット価格の適用は同時購入の場合に限ります。

# 使い方に合わせて色々なタイプをご用意(耳かけ型)

	■外耳道内レシーバ耳かけ型 (RIE) 違和感が少なく、小さく目立たない		■耳かけ型 (BTE) 扱いやすく、目立ちにくいタイプ		
タイプ	62タイプ		67タイプ		
実物大写真					
装用例	 装用例		 オープン装用例		
適応聴力範囲 + 電池寿命	適応聴力範囲 <small>聴力に合わせて選択可能です</small>	電池寿命	適応聴力範囲	電池寿命	
	LP：軽度～中等度	約 125 時間	軽度～中・高度	約 135 時間	
	MP：軽度～中・高度	約 135 時間			
	HP：中等度～高度	約 130 時間			
UP：中等度～重度	約 120 時間				
電池サイズ	PR41		PR41		
ボリュームコントロール	○		—		
テレコイル	○		○		
カラー バリエーション					
	ミディアム ブロンド (MBL)	ベージュ (BE)	ダークブラウン (DB)	スターグレー (SG)	ブラック (BK)

\* 電池寿命は使用状況によって異なります。ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

	扱いやすく、電池長持ち		高出力タイプ		
タイプ	77タイプ		88タイプ		
実物大写真					
装用例	 オープン装用例		 装用例		
適応聴力範囲 + 電池寿命	適応聴力範囲	電池寿命	適応聴力範囲	電池寿命	
	軽度～中・高度	オープン： 約 240 時間	中等度～重度	パワー： 約 240 時間	
		クローズ： 約 260 時間		ハイパワー： 約 240 時間	
	電池サイズ	PR48		PR48	
ボリュームコントロール	○		○		
テレコイル	○		○		
カラー バリエーション					
	ミディアム ブロンド (MBL)	ベージュ (BE)	ダークブラウン (DB)	スターグレー (SG)	ブラック (BK)

\* 製品の色は実物と異なる場合があります。

## 使い方に合わせて色々なタイプをご用意(耳あな型)

■耳あな型		耳本来の自然な方向感を得やすい、オーダーメイドタイプ			
タイプ	CIC	ITC	ITE		
実物大 写真	V LP・MP	V T LP・MP	V T MP		
	HP	HP	PR41 MP		
	UP	UP	PR48 HP・UP		
	*ワイヤレス非対応	T: LPは非対応	PR48		
装用例					
適応聴力範囲	LP: 軽度~中等度	MP: 軽度~中・高度	HP: 中等度~高度	UP: 中等度~重度	
電池寿命	LP	約 85 時間	約 140 時間	—	—
	MP	約 85 時間	約 145 時間	約 145 時間	約 260 時間
	HP	約 75 時間	約 130 時間	約 130 時間	約 230 時間
	UP	約 85 時間	約 140 時間	約 140 時間	約 250 時間
電池サイズ	PR536	PR41	PR41	PR48	

オプション: +10,000円/片耳で追加可能 V ボリューム T テレコイル \*電池寿命は使用状況によって異なります。 \*ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

## ■クラス別比較&価格

### リサウンド・エンヤ 4 | ご自身も、ご家族とも充実した日常生活を楽しみたい方へ、この価格帯では充実の機能を搭載

- 音質の良さに加え、操作楽しく両耳連動機能搭載
- 環境に合わせて会話の聞き取りをサポート、風の多い屋外でも安心
- テレビや携帯電話も聞きやすいワイヤレス機器対応
- オシャレな耳かけ型から目立ちにくい耳あな型までの豊富なバリエーション

機 能	
音質	★★★★
便利な機能	★★★★
きめ細やかな調整	★★★★
騒音下での言葉の聞き取り	★★★★
ピーピー音を抑える	★★★★

外耳道内レシーバ 耳かけ型	62タイプ EY462-DRW		
		両耳価格: <b>¥238,000</b>	片耳価格: <b>¥140,000</b>
耳かけ型	67タイプ EY467-DW	77タイプ EY477-DW	88タイプ EY488-DW
	両耳価格: <b>¥280,000</b>		片耳価格: <b>¥140,000</b>
耳あな型 OP	CICタイプ EY4CIC	ITCタイプ EY4ITC-W/EY4ITC-DW	ITEタイプ EY4ITE-W/EY4ITE-DW
D(指向性)なし	両耳価格: <b>¥280,000</b>		片耳価格: <b>¥140,000</b>
D(指向性)付き	—	両耳価格: <b>¥300,000</b> 片耳価格: <b>¥150,000</b>	

### リサウンド・エンヤ 3 | 気軽に使えて快適に過ごしたい方へ、他にはない基本性能とコストパフォーマンス

- 環境に合わせて会話の聞き取りをサポート、風の多い屋外でも安心
- テレビや携帯電話も聞きやすいワイヤレス機器対応
- オシャレな耳かけ型から目立ちにくい耳あな型までの豊富なバリエーション

機 能	
音質	★★
便利な機能	★
きめ細やかな調整	★★
騒音下での言葉の聞き取り	★★★★
ピーピー音を抑える	★★★★

外耳道内レシーバ 耳かけ型	62タイプ EY362-DRW		
		両耳価格: <b>¥204,000</b>	片耳価格: <b>¥120,000</b>
耳かけ型	67タイプ EY367-DW	77タイプ EY377-DW	88タイプ EY388-DW
	両耳価格: <b>¥240,000</b>		片耳価格: <b>¥120,000</b>
耳あな型 OP	CICタイプ EY3CIC	ITCタイプ EY3ITC-W/EY3ITC-DW	ITEタイプ EY3ITE-W/EY3ITE-DW
D(指向性)なし	両耳価格: <b>¥240,000</b>		片耳価格: <b>¥120,000</b>
D(指向性)付き	—	両耳価格: <b>¥260,000</b> 片耳価格: <b>¥130,000</b>	

### リサウンド・エンヤ 2 | 手頃な価格で会話の聞き取りを向上したい方へ、安定した品質と音質を提供

- 変化する環境でも会話の聞き取りをサポート
- リモコン(オプション)を使えば音量調節やプログラム変更も簡単に

機 能	
音質	★
便利な機能	★
きめ細やかな調整	★
騒音下での言葉の聞き取り	★★
ピーピー音を抑える	★★★★

耳かけ型	77タイプ EY277-DW	88タイプ EY288-DW
		両耳価格: <b>¥136,000</b> 片耳価格: <b>¥68,000</b>

OP: ボリュームオプションは +10,000円(片耳) \*補聴器は非課税です。