

ReSound Unite™

HANDLEIDING

ReSound Unite™ TV 2



ReSound

rediscover hearing

Welkom

Gefeliciteerd met uw aankoop van de ReSound Unite™ TV 2.

Met de Unite TV 2 ontvangt u gestreamde audio van hoge kwaliteit van uw televisie, stereo, computer of een vergelijkbaar apparaat, rechtstreeks in uw hoortoestellen.

Lees deze handleiding aandachtig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van de Unite TV 2. Raadpleeg uw audicien bij overige vragen.

Voor meer informatie ga naar www.resound.nl.

Lees voor uw veiligheid aandachtig het hoofdstuk 'Belangrijke informatie' op pagina 27- 29 door.

Model: SAS-3

FCC ID: X26SAS-3

Verklaring:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels

Toepassing uitsluitend toegestaan als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: (1) dit apparaat mag geen storende interferentie veroorzaken en (2) elke vorm van interferentie moet worden geaccepteerd, inclusief interferentie welke leidt tot ongewenste werking.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen die aan een Klasse B digitaal apparaat worden gesteld, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze regels zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen storende interferentie wanneer het apparaat functioneert in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en werkt met radiofrequentie-energie en kan dit ook uitstralen. Als de installatie en het gebruik van het apparaat niet volgens de instructies worden uitgevoerd, kan dat leiden tot storende interferentie op radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een individuele installatie. Als dit apparaat storende interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, hetgeen te bepalen is door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te corrigeren met één van de volgende maatregelen:

De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.

De afstand tussen de ontvanger en het apparaat vergroten.

Het apparaat op een ander voedingscircuit aansluiten dan de ontvanger.

De verkoper of een ervaren radio/televisiemonteur raadplegen.

Veranderingen of modificaties kunnen het recht tot gebruik van dit apparaat ongeldig maken.

Gebruikersbestemming

De Unite TV 2 is bedoeld voor gebruikers van draadloze hoor-toestellen van ReSound. Ze kunnen hiermee beter televisie- of andere audioprogramma's volgen. De Unite TV 2 zendt geluid van de televisie of andere audioapparatuur naar de draadloze hoor-toestellen van ReSound.

Lijst van landen

Producten zijn bedoeld voor verkoop in landen binnen de Europese Economische Gemeenschap en Zwitserland.

Nationale restricties:

Noorwegen: Het is niet toegestaan dit product te gebruiken binnen 20 km van het centrum van Ny Ålesund.

Dit product is in overeenstemming met de volgende standaard reglementen:

In de EU: Het toestel voldoet aan de Essentiële Vereisten conform - Bijlage I van Richtlijn 93/42/EEC van de Raad voor medische apparatuur (MDD) en essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De conformiteitsverklaring kan worden ingezien op www.resound.com.

In de VS: FCC CFR 47 Deel 15, subonderdeel C.

In landen buiten de EU en de VS gelden andere internationale reglementaire vereisten. Zie voor desbetreffende gebieden de nationaal geldende vereisten.

Het product is ingedeeld als ontvanger categorie 2 conform EN 300 328.

Modelleren: SAS-3 IC: 6941C-SAS3

Dit digitaal apparaat in klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Toepassing uitsluitend toegestaan als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) Elke vorm van interferentie moet worden geaccepteerd, inclusief interferentie die leidt tot ongewenste werking.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

In JP:


Dit toestel heeft een toewijzing gekregen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Communicatie onder "Verordening betreffende technische regels conformiteitscertificaat, enz. van gespecialiseerde radioapparatuur (特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則) " Artikel 2-1-19: "Dit apparaat mag niet aangepast worden (anders is het toegekende bestemmingsnummer ongeldig)".

Inhoud

Beschrijving	8
Van start	10
Pairen met uw hoortoestellen	18
Streaming starten en stoppen	21
Bediening	24
Instelbare vertragingsmodus	26
Belangrijke Informatie	27
Technische specificaties	30
Garantie	30
Oplossen van problemen	32


Beschrijving

- 1 Micro-USB voedingsaansluiting
- 2 Pairingknop
- 3 Mono/stereo-schakelaar
- 4 Analoge mini-jack audio input
- 5 Optische (Toslink) audio input
- 6 Coaxiale audio input

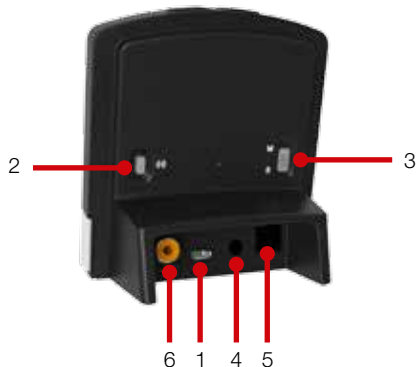

8

- 7 Volume omhoog
- 8 Volume omlaag
- 9 Voedingslampje (groen)
- 10 Statuslampje (geel)
- 11 Wandstekker
- 12 Micro USB-plug

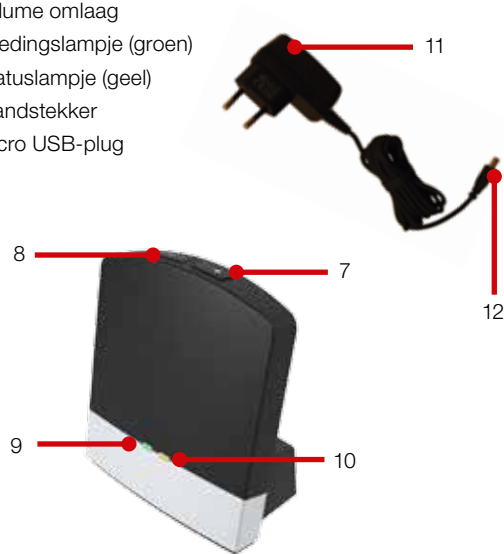

9

Van start

De Unite TV 2 installeren

De installatie van de Unite TV 2 is afhankelijk van de instellingen van uw televisie, stereo, computer en andere audioapparaten. Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden. De volgende stappen leiden u door de eenvoudige pairingsprocedure, door vrijwel iedereen gemakkelijk uit te voeren. Start met het aansluiten van de kabels tussen de Unite TV 2 en de audiobron en pair als laatste de Unite TV 2 met uw hoortoestellen.



De Unite TV 2 ondersteunt zowel analoge als digitale audio-invoer. Lees de volgende paragrafen voor informatie over ondersteunde audiocoderingen en hoe u de Unite TV 2 kunt aansluiten op audioapparaten.


De Unite TV 2 aansluiten op een analoog audioapparaat (bijv. televisie of stereoinstallatie)

1. Steek de stekker van de voeding in het stopcontact en steek de andere kant in de micro USB-ingang op de Unite TV 2
2. Steek de stereo mini-jack stekker van de audiokabel in de mini-jack input op de Unite TV 2 (4 op pagina 8)
3. Steek het andere uiteinde van de audiokabel in 'AUDIO OUT' uitgangen op het audioapparaat

4. AUDIO OUT is meestal gemarkeerd met 'L' en 'R' voor links en rechts. U vindt ze vaak aan de achterkant van het audioapparaat



Opmerking: met deze aansluiting verzenden de meeste audioapparaten gelijktijdig geluid naar zowel uw hoortoestellen als naar de luidsprekers die zijn aangesloten op het audioapparaat. Op sommige audioapparaten kunt u de balans tussen AUDIO OUT en de luidsprekers aanpassen. Raadpleeg de handleiding van uw audioapparaat voor meer informatie.

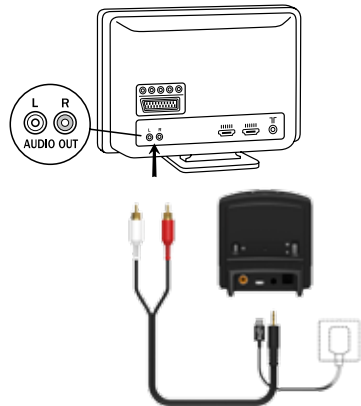

Alternatieve installatie analoge audiokabels

Als het niet mogelijk is om de Unite TV 2 aan te sluiten op AUDIO OUT met behulp van de rode en witte pluggen, probeer dan één van de volgende alternatieven:


Mini-jack adapter:

1. Steek de stekker van de voeding in het stopcontact en steek de kabel in de micro USB-ingang op de Unite TV 2
2. Steek de stereo mini-jack stekker van de audiokabel in de stereo mini-jack input op de Unite TV 2 (4 op pagina 8)
3. Sluit de adapter van de mini-jack van de stereo aan op de rode en witte pluggen aan het andere uiteinde van de audiokabel
4. Plug de adapter van de mini-jack in de uitgang HOOFDTELEFOON op de televisie, of steek hem in de audiouitgang van uw computer.



Opmerking: de uitgang HOOFDTELEFOON bevindt zich meestal op de zij- of voorkant van het audioapparaat. Als u de uitgang HOOFDTELEFOON gebruikt, kan meestal alleen de persoon die het hoortoestel draagt het geluid horen en worden de luidsprekers van het audioapparaat op stil gezet.


Als u de luidsprekers niet op stil wilt zetten, zie dan de eerste installatie of de installatie op de volgende pagina. Uw audioapparaat kan wellicht tegelijkertijd de luidsprekers en hoofdtelefoon ondersteunen. Controleer de handleiding van het apparaat voor instructies.

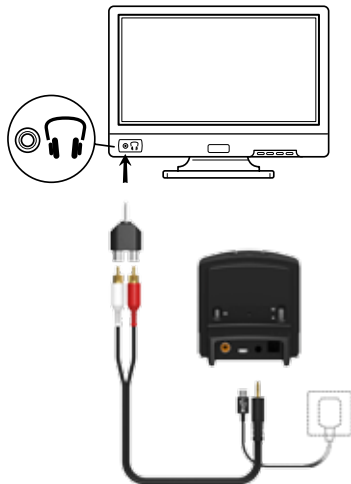

Scart-adapter:

1. Steek de voeding in het stopcontact en steek de kabel in de micro USB-ingang op de Unite TV 2
2. Steek de stereo mini-jack stekker van de audiokabel in de stereo mini-jack input op de Unite TV 2 (4 op pagina 8)
3. Sluit de scart-adapter van de stereo aan op de rode en witte pluggen en op het andere uiteinde van de audiokabel
4. Plug de scart-adapter in de scartaansluiting op het audioapparaat.

i *Opmerking: de scart-uitgang zit meestal aan de achter- of zijkant van het audioapparaat. Zie de handleiding van uw audioapparaat als extra configuratie van de scart-uitgang nodig is.*

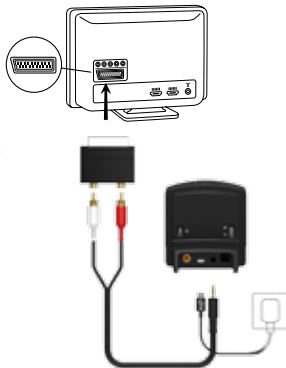

De Unite TV 2 op een digitaal audio-apparaat aansluiten (bijv. televisie of stereo-installatie)

i *De Unite TV 2 ondersteunt zowel analoge als digitale audio-invoer. Voor digitale invoer worden de volgende indelingen ondersteund:*

Stereo PCM

- Sample rate: Tot 192 kHz
- Sample resolution: Tot 32 bit

Dolby Digital

- Kanalen: Max 5.1
- Bitrate: 32 kbs tot 640 kbs
- Sample rate: 32, 44,1 en 48 kHz


Let op: Dolby Digital Plus (nodig voor een HDMI interface), Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic, Dolby Digital EX, Dolby Digital Surround EX, en AAC (Advanced Audio Codec) worden niet ondersteund.

De optische (Toslink) audio-invoer gebruiken

1. Steek de voeding in het stopcontact en steek de kabel in de micro USB-ingang op de Unite TV 2
2. Steek een van de pluggen van de optische audiokabel in de optische audio input (5 op pagina 8) op Unite TV 2


Let op: de meeste optische kabels worden geleverd met een kleine beschermkap over de bovenkant van de kabel. Verwijder deze beschermkap voordat u de kabel gebruikt

3. Steek het andere uiteinde van de optische audiokabel in de 'Digital Audio Out/Optical' aansluiting op uw audioapparaat

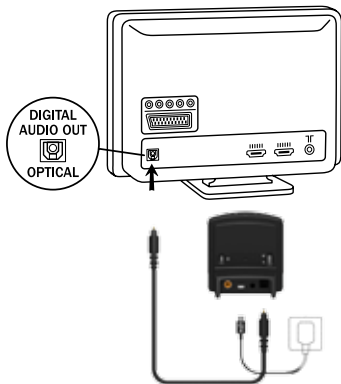

De coaxiale audio-invoer gebruiken

1. Steek de voeding in het stopcontact en steek de kabel in de micro USB-ingang op de Unite TV 2
2. Steek een van de pluggen van de coaxiale audiokabel in de coaxiale plug (6 op pagina 8) op Unite TV 2
3. Steek het andere uiteinde van de coaxiale audiokabel in de 'Digital Audio Out/Coaxial' aansluiting op uw audioapparaat

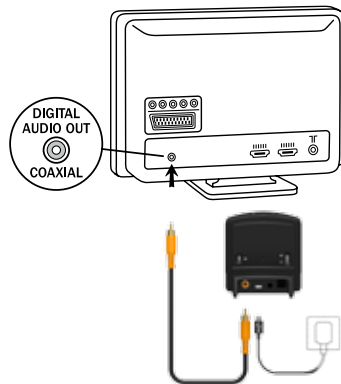

Pairen met uw hoortoestellen



Let op! De volgende informatie is voornamelijk bedoeld voor uw audicien, die meestal de handelingen uitvoert om de TV Steamer 2 te laten werken met uw hoortoestel. Het proces is echter eenvoudig en kan door bijna iedereen worden uitgevoerd.

U kunt maximaal 3 Unite streamingapparaten, bijv. één MiniMicrofoon en twee Unite TV's™ pairen met uw hoortoestellen. Daarvoor moet kanaal 1, 2 of 3 worden gekozen bij het starten van de pairingprocedure.

De Unite TV 2 in kanaal 1 pairen

1. Controleer of de voedingskabel van de Unite TV 2 in een stopcontact is gestoken en of het groene lampje op de voorkant van de Unite TV 2 (9 op pagina 9) AAN is. Uw hoortoestellen moeten uitgeschakeld zijn, open de batterijlades.
2. Druk eenmaal op de pairingknop op de Unite TV 2 (2 op pagina 8). Het gele lampje op de voorkant van de Unite TV 2 (10 op pagina 9) knippert nu iedere twee seconden om aan te geven dat de Unite TV 2 klaar is om gepaird te worden in kanaal 1. Uw Unite TV 2 blijft gedurende 20 seconden in de pairingmodus.

3. Nu de pairingmodus is geactiveerd kunt u de batterijlades van beide hoortoestellen sluiten en er zo voor zorgen dat ze AAN staan. Bij een succesvolle pairing hoort u een melodie in beide hoortoestellen. U kunt de Unite TV 2 nu gebruiken.

De Unite TV 2 in kanaal 2 pairen

1. Druk tweemaal op de pairingsknop. Het gele lampje op de voorkant van de Unite TV 2 knippert nu iedere twee seconden twee keer om aan te geven dat de Unite TV 2 klaar is om gepaird te worden in kanaal 2.
2. Sluit in de pairingmodus de batterijlades van de hoortoestellen.

De Unite TV 2 in kanaal 3 pairen

1. Druk driemaal op de pairingsknop. Het gele lampje op de voorkant van de Unite TV 2 knippert nu iedere twee seconden drie keer om aan te geven dat de Unite TV 2 klaar is om gepaird te worden in kanaal 3.
2. Sluit in de pairingmodus de batterijlades van de hoortoestellen.

Knipperpatroon tijdens paren:

Aantal keren drukken op pairingsknop	Indicatielampje				Kanaal
1	①	①	①	①	1
2	①②	①②	①②	①②	2
3	①②③	①②③	①②③	①②③	3

Streaming starten en stoppen

Schakel de televisie, stereo, computer of ander audioapparaat dat is aangesloten op de Unite TV 2 aan. Controleer of uw hoortoestel ook is ingeschakeld. U kunt het streamen op twee manieren starten.

1. Houd de drukknop op een van de hoortoestellen ongeveer drie seconden ingedrukt. Dit moet u bij beide hoortoestellen apart doen om de gestreamde audio in beide oren te horen, behalve als uw hoortoestellen zijn ingesteld met Device-to-device-synchronisatie. Zodra de ReSound Unite TV verbinding heeft, hoort u een melodietje in uw hoortoestellen, gevolgd door het gestreamde geluid.
2. Als u een ReSound Unite™ Afstandbediening (optioneel) heeft, druk dan op de streamingknop van dit apparaat. Zodra de hoortoestellen verbinding hebben met de ReSound Unite TV 2 hoort u een korte melodie in beide oren om de verbinding te bevestigen. Daarnaast verschijnt er een 'streaming'-symbool op het display. U hoort nu het gestreamde geluid in uw hoortoestellen.

Streamen op een 2e of 3e Unite TV 2

Als er meer dan één Unite TV 2-apparaat beschikbaar is, dan kunt u ook twee of drie keer op de knop op de Afstandbediening drukken, afhankelijk van welk Unite TV 2 apparaat u wilt beluisteren.



Maximaal drie streamingapparaten worden aangeduid met de letter A, B of C en een door de audicien toegekende naam. Het apparaat dat in gebruik is wordt op het display van de Afstandbediening weergegeven.

Als u geen afstandbediening heeft, houd dan de knop op het hoortoestel een tweede of derde keer ongeveer drie seconden ingedrukt om de 2e of 3e Unite TV 2 te verbinden.

Streamen uitschakelen

Druk kort de drukknop op één van de hoortoestellen in. Dit stopt het streamen naar de zijde waar de knop is ingedrukt en het toestel keert terug naar het laatst gebruikte programma.

Let op: beschikken uw hoortoestellen over Device-to-device-synchronisatie, dan keren bij het indrukken aan één zijde beide hoortoestellen terug naar het laatst gebruikte programma.

Met de ReSound Unite™ Afstandbediening (optioneel) hoeft u alleen maar op de knop 'P' midden op het toetsenblok te drukken. Hiermee keren beide hoortoestellen terug naar het laatst gekozen programma. U kunt ook op de knop 'Home' drukken om naar uw standaardinstellingen terug te keren.

Streaming met ReSound Unite™ TV 2 wordt tijdelijk uitgeschakeld als u telefoneert met de Unite Telefoonclip+ of met PhoneNow™. Als u uw telefoongesprek beëindigt, wordt het streamen weer hervat.

i *Let op! Het kan zijn dat u buiten bereik (>7m) van uw Unite TV 2 komt. Als u binnen 5 minuten weer binnen het bereik komt, maken uw hoortoestellen automatisch opnieuw contact en wordt het streamen hervat.*

Bediening

Het volume aanpassen

De Unite TV 2 biedt vanaf het moment dat hij wordt aangezet een comfortabel luisterniveau. Voor sommige apparaten of luisteromgevingen kan het echter wenselijk zijn om het volume aan te passen. Dit kan op verschillende manieren. Houd er rekening mee dat de volumewijzigingen op de Unite TV 2 meestal alleen gelden voor het geluid van het aangesloten apparaat en niet voor de normale omgevingsgeluiden.

Gebruik de '+' en '-' toets (7 en 8 op pagina 9) om het volume in te stellen op een comfortabel niveau. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen al op een comfortabel niveau zijn ingesteld voordat u het volume verandert. Meestal hoeft deze afstelling maar één keer te gebeuren. De Unite TV 2 slaat het nieuwst ingestelde volumeniveau op.

Gebruik de ReSound Unite Afstandbediening 2 (optioneel) om het streamingvolume en het volume van de microfoon in het hoortoestel* te regelen. Vraag uw audicien om meer informatie over deze accessoire.

Het volume kan soms nog verder aangepast worden bij de signaalbron zelf, bijvoorbeeld door het volume van de TV zachter

** Volume-aanpassingen van zowel de hoortoestellen als de streaming is alleen mogelijk met de ReSound Unite TM Afstandbediening 2.*

te zetten. Dit beïnvloedt dikwijls het volume van het geluid dat draadloos naar de hoortoestellen wordt gezonden. Als u het volume van de televisie aanpast, is dit ook van invloed op het volume in de kamer.

Mono/Stereobediening

U kunt een schuif met twee standen gebruiken (3 op pagina 8) om de audiostreaming in te stellen op Stereo (twee kanalen) of Mono (één kanaal). Bij binaurale aanpassingen moet de schakelaar ingesteld worden op Stereo. Voor monaurale aanpassingen moet hij ingesteld worden op Mono.

Instelbare vertragsmodus

In sommige gevallen kan er een verkeerde afstemming ontstaan tussen de gestreamde audio naar de hoortoestellen en het geluid van de televisieluidsprekers (echo) of zelfs een verkeerde afstemming tussen de gestreamde audio en het beeld op de televisie (lipsynchronisatie). Dit is duidelijker hoorbaar in meer complexe systemen waarbij de Unite TV 2 niet direct is aangesloten op de televisie (bijv. bij digitale televisie via settop-box of satelliet).

Om dergelijke verkeerde afstemmingen te voorkomen kan de streamingsvertraging van de Unite TV 2 als volgt aangepast worden:

1. Controleer of de Unite TV 2 ingeschakeld is en of uw hoortoestellen de gestreamde audio ontvangen
2. Houd de pairingknop (2 op pagina 8) 3 seconden lang ingedrukt. Nu opent de Unite TV 2 de instelbare vertragsmodus, waarbij het groene lampje op de voorkant van de Unite TV 2 iedere twee seconden knippert. Het gele lampje gaat branden als er een audiosignaal is.
3. Gebruik de knoppen '+' en '-' (7 en 8 op pagina 9) bovenop de Unite TV 2 om de vertraging in het gestreamde signaal te verhogen of te verlagen in stappen van 10 ms. Het gestreamde signaal kan vertraagd worden binnen het bereik van 0-250 ms.

4. Als er een optimale afstemming tussen de gestreamde audio naar de hoortoestellen en het geluid van de luidsprekers van de televisie is bereikt, of de afstemming tussen het gestreamde geluid en het beeld op de televisie, houd de pairingknop dan 3 seconden ingedrukt. Nu hervat de Unite TV 2 zijn normale werking, aangegeven door het groene lampje dat voortdurend brandt.

De offset-instelling in de instelbare vertragsmodus wordt opgeslagen in de Unite TV 2.

Als u de instelbare vertragsmodus niet afsluit door de pairingknop 3 seconden ingedrukt te houden, hervat de Unite TV 2 automatisch de normale werking na 30 minuten.

Om de vertraging te herstellen naar 0 ms (fabrieksinstelling), houdt u de pairingknop ingedrukt en zet u tegelijkertijd de Unite TV 2 aan.

Belangrijke informatie



Onderhoud en zorg

Reinig de Unite TV 2 met een vochtige doek. Gebruik nooit huishoudelijke reinigingsproducten (waspoeder, zeep, etc.) of alcohol om het apparaat te reinigen.

Als de Unite TV 2 een langere tijd niet gebruikt wordt, trek dan de stekker uit het stopcontact.

Algemene waarschuwingen



Houd de Unite TV 2 buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar.

De Unite TV 2 maakt gebruik van low power digitaal gecodeerde transmissie om met andere draadloze apparaten te communiceren. Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk dat elektronische apparaten in de nabije omgeving beïnvloed worden. Mocht dit gebeuren, zorg dan dat er meer afstand is tussen de Unite TV 2 en desbetreffende apparatuur.

Gebruik de Unite TV 2 alleen met de voedingseenheid die samen met het product geleverd is. Gebruik van andere opladers kan het apparaat beschadigen of vernielen en kan gevaarlijk zijn. Door het gebruik van andere voedingseenheden kan de garantie ongeldig worden.

- Als u de stroomkabel uit het stopcontact haalt, trek dan altijd aan de stekker, nooit aan de kabel.
- Gebruik nooit een beschadigd snoer.
- Probeer de voedingseenheid nooit uit elkaar te halen omdat u zich dan blootstelt aan het gevaar van een elektrische schok.
- Gebruik de voedingskabels niet buiten of in vochtige ruimtes.

Wanneer u tijdens gebruik van de Unite TV 2 last heeft van elektromagnetische storing, verwijder u dan van de bron van de storing.

Algemene voorzorgsmaatregelen



Uw hoortoestel en de Unite TV 2 hebben tijdens de aanpassing een unieke netwerkcode meegekregen. Dit zorgt ervoor dat de Unite TV 2 geen hoortoestellen van anderen kan beïnvloeden.

Hoogspanningsapparatuur, grote elektronische installaties en metalen constructies kunnen mogelijk het signaal aantasten en de reikwijdte aanzienlijk verminderen.

Gebruik alleen originele accessoires van ReSound.

Doe geen veranderingen of aanpassingen aan de Unite TV 2.

Door de Unite TV 2 te openen, kunt u er schade aan toebrengen. Als er problemen optreden die niet kunnen worden opgelost met behulp van de richtlijnen in deze handleiding, neem dan contact op met uw audicien.

De Unite TV 2 mag alleen gerepareerd worden door een bevoegd servicecenter.

Gebruik de Unite TV 2 niet in ruimtes waar RF-overdracht verboden is, bijvoorbeeld vliegtuigen, enz.

Pair de Unite TV 2 alleen met apparaten waar hij expliciet voor bedoeld is.

Technische specificaties

Operationeel bereik:	tot 7 meter
Voeding:	externe adapter
Draadloos:	2,4 GHz
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 55 ° C
Bewaartemperatuur:	-20 tot 60° C

Temperatuurtest, transport en opslaginformatie

Dit product is onderworpen aan diverse temperatuur- en vochttesten in verwarmingscycli tussen -25°C en +70° C, conform interne- en industriestandaarden.

Garantie

De Unite TV 2 heeft een beperkte fabrieksgarantie van 12 maanden vanaf de dag van aankoop. Houd er rekening mee dat er in uw land mogelijk andere garanties gelden. Neem contact op met uw audicien voor meer informatie.

Wat dekt deze garantie?

Elk elektrisch onderdeel dat door werkzaamheden, productie of ontwerp niet correct functioneert bij normaal gebruik, wordt voor

wat betreft arbeid of onderdelen gratis vervangen of gerepareerd als het geretourneerd wordt naar de winkel waar het gekocht is.

Als bepaald wordt dat reparatie niet haalbaar is, kan na wederzijdse instemming tussen de audicien en de klant, het gehele product vervangen worden door een vergelijkbaar product.

Wat is niet gedekt door de garantie?

Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onderhoud, ongelukken, reparaties door onbevoegde partijen, blootstelling aan corroderende omstandigheden of schade door vreemde objecten die in het apparaat gestopt zijn, worden NIET gedekt door de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. Bovenstaande garantie heeft geen invloed op alle juridische rechten die u zou kunnen hebben onder de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentenproducten. Uw audicien kan een garantie afgegeven hebben die verder gaat dan de clausules in deze beperkte garantie. Neem contact op met uw audicien voor meer informatie.

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>Het indrukken van de streamingknop op de afstandbediening heeft geen effect</i>	De Unite TV 2 en hoortoestellen zijn niet gepaird	Voer de pairingprocedure uit
	De afstandbediening en de hoortoestellen zijn niet binnen hun draadloos bereik	Verzeker u ervan dat de afstandbediening en de hoortoestellen binnen hun draadloos bereik zijn, en activeer de streamer opnieuw
<i>De programmaknop op het hoortoestel is langer dan 3 seconden ingedrukt, zonder resultaat</i>	De Unite TV 2 en hoortoestellen zijn niet gepaird	Voer de pairingprocedure uit
<i>De pairingknop op de Unite TV 2 is ingedrukt, maar er klinkt geen melodie in het hoortoestel</i>	De Unite TV 2 en de hoortoestellen zijn niet binnen hun draadloos bereik	Verzeker u ervan dat de Unite TV 2 en de hoortoestellen zich binnen hun draadloos bereik bevinden en herhaal het pairingproces.
	De Unite TV 2 en hoortoestellen staan niet gelijktijdig in pairingmodus	Herhaal het pairingproces en verzekert u ervan dat de batterijlades van beide hoortoestellen gesloten worden binnen 20 seconden nadat de pairingknop op de Unite TV 2 ingedrukt is.

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>De streamingknop op de Afstandbediening is ingedrukt, maar er wordt geen signaal gevonden als er gezocht wordt (dit wordt weergegeven middels een 'X' symbool op het display)</i>	De Unite TV 2 en de hoortoestellen zijn niet binnen hun draadloos bereik	Controleer of de Unite TV 2 en de hoortoestellen binnen hun draadloos bereik zijn, en activeer de streamer opnieuw
	De kabel van de Unite TV 2 is niet correct in de televisie geplaatst	Sluit de kabel correct aan op de Unite TV 2 en de televisie en activeer het streamen opnieuw
	De Unite TV 2 is uitgeschakeld of het geluid van de televisie staat op stil	Zet de Unite TV 2 opnieuw aan of zet het geluid aan; activeer het streamen opnieuw
<i>Er is geen geluid in de hoortoestellen, maar de audio-streaming is wel actief</i>	De Unite TV 2 en de hoortoestellen zijn niet binnen hun draadloos bereik	Controleer of de Unite TV 2 en de hoortoestellen zich binnen hun draadloos bereik bevinden
	De televisie is uitgeschakeld of het geluid staat op stil	Zet de televisie of het geluid weer aan
<i>Het geluid van de Unite TV 2 is vervormd</i>	Het audioniveau van de TV staat te hard	Pas het volume aan met de toets op de Unite TV 2 tot het geluid niet meer vervormd is

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>Het volume van de Unite TV 2 staat heel zacht</i>	Het audioniveau van de TV staat te zacht	Pas het volume aan met de toets '+' en '-' op de Unite TV 2 tot het geluid goed hoorbaar is
<i>Het geluid van de Unite TV 2 is vervormd of het valt regelmatig weg</i>	De Unite TV 2 en de hoortoestellen bevinden zich op de grens van elkaars draadloos bereik	Ga een beetje dichterbij de Unite TV 2 zitten
	De Unite TV 2 en de hoortoestellen zijn niet voldoende binnen het "gezichtsveld"	Zorg dat de Unite TV 2 zich op een juiste positie bevindt, en dat u binnen normaal bereik bent, zonder obstakels voor de streaming
<i>Het geluid van de Unite TV 2 loopt niet synchroon met het beeld op de televisie</i>	Uw televisie is niet in staat het geluid van de gekozen audio uitgangen te synchroniseren met het beeld	<p>Probeer een andere audio-uitgang op uw televisie. Is die er niet, volg dan de instructies in de paragraaf "Afstelbare vertragsmodus" van deze handleiding. Als dit niet helpt, neem dan contact op met uw televisiedealer.</p> <p>De audiostreaming van de Unite TV 2 heeft bijna geen latentie en kan geen synchronisatiefouten veroorzaken.</p>

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>Het geluid van de Unite TV 2 loopt niet synchroon met het geluid uit de luidsprekers van de televisie</i>	Uw televisie is niet in staat het geluid van de gekozen audio uitgangen te synchroniseren met het geluid van de luidsprekers van uw televisie	<p>Probeer een andere audioingang van uw televisie. Is die er niet, volg dan de instructies in de paragraaf 'Afstelbare vertragingmodus' van deze handleiding. Als dit niet helpt, neem dan contact op met uw televisiedealer.</p> <p>De audiostreaming van de Unite TV 2 heeft bijna geen latentie en kan geen echo-effecten veroorzaken.</p>
<i>Het geluid van het hoortoestel is te hard of te zacht</i>	Het audio inputniveau is niet geschikt om naar te luisteren	<p>Pas het volume aan met de toets '+' en '-' op de Unite TV 2 tot het geluid goed hoorbaar is</p> <p>U kunt als alternatief ook de toetsen '+' en '-' op de afstandsbediening (optioneel) gebruiken</p>
<i>De streaming naar een hoortoestel valt onverwacht weg</i>	<p>De Unite TV 2 en de hoortoestellen zijn meer dan 5 minuten buiten het draadloze bereik geweest</p> <p>De accuspanning in het hoortoestel kan dusdanig laag zijn dat het de digitale streaming niet meer ondersteunt</p>	<p>Verzekert u ervan dat de Unite TV 2 en de hoortoestellen binnen hun draadloos bereik zijn, en activeer de streamer opnieuw</p> <p>Vervang de batterij in het hoortoestel.</p>

Notities:

Notities:

Lees informatie met een waarschuwingssymbool zorgvuldig door



WAARSCHUWING wijst op een situatie die kan leiden tot ernstige verwondingen.

VOORZORGSMAATREGEL wijst op een situatie die kan leiden tot kleine verwondingen



Advies en tips over hoe beter om te gaan met uw ReSound Unite accessoire.




Apparatuur maakt gebruik van RF-overdracht



Dit product valt onder Type B contactonderdelen



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

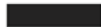

Vraag uw audicien naar het afvoeren van uw ReSound Unite accessoire



Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische Apparatuur 93/42/EEC en Richtlijn R&TTE 1999/5/EEC dienen gericht te worden aan GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750, Ballerup, Denemarken

Internationaal hoofdkantoor

ReSound A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup

Tel.: +45 45 75 11 11

Fax: +45 45 75 11 19

www.resound.com

GN Hearing Benelux B.V.

ReSound

Postbus 85

6930 AB Westervoort

Nederland

Tel.: +31 (0)26 319 5000

Fax: +31 (0)26 319 5001

info@gnresound.nl

www.resound.nl

Contactgegevens België

Tel.: +32 (0)2 513 55 91

Fax: +32 (0)2 502 04 09

info@gnresound.be

ReSound



red|discover hearing