


## Installatiehandleiding



Om de ReSound Control met uw ReSound draadloos hoorsysteem te gebruiken heeft u de ReSound Unite™ Telefoonclip+ nodig.

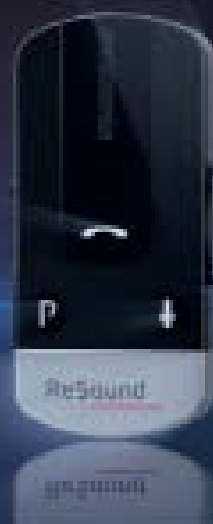

# ReSound

redcover hearing

## Hoe komt u in bezit van de ReSound Control app?

De ReSound Control app kunt u gratis downloaden. Dit kan met uw mobiele telefoon op twee manieren:

1. Ga naar de App Store of Google Play en zoek naar 'ReSound Control',
2. Scan de QR-code (Quick Response code)\* hier rechts. U komt terecht op [www.resound.com/control](http://www.resound.com/control), waar u links vindt naar de downloads in de App Store en Google Play.

Voor PC/laptop:

- Verbind uw telefoon via een kabel met uw computer.
- Ga naar de App Store of Google Play en zoek naar 'ReSound Control'.
- Download de app rechtstreeks naar uw telefoon.

Heeft u geen account voor de App Store / iTunes of Google Play? Volg dan de instructies van Apple of Android over hoe u een account aanmaakt bij de App Store of Google Play op uw telefoon.



[resound.nl/control](http://resound.nl/control)

*\*Als u geen QR-codescanner op uw telefoon heeft, ga dan naar de App Store of Google Play en zoek naar 'QR code scanner'. U kunt hier verschillende gratis apps downloaden, waaronder Scanlife.*

## DE RESOUND CONTROL APP PAIREN MET HET RESOUND HOORSYSTEEM

### Stap 1a: Telefoon pairen met de ReSound Unite™ Telefoonclip+:

(Pairing instructies ook beschikbaar op [www.resound.com/pairphone](http://www.resound.com/pairphone))

1. Zorg dat uw Telefoonclip+ opgeladen is. Zet hem AAN en verwijder het zilveren kapje. Leg uw telefoon naast de Telefoonclip+ en zorg dat hij AAN is.
2. Ga naar de verbindingsopties op uw telefoon. Zoek naar de Bluetooth-optie in het hoofdmenu of een submenu dat zoiets als 'Draadloos' of 'Netwerk' heet.
3. Zorg dat Bluetooth AAN is op uw telefoon.
4. Met de punt van bijvoorbeeld een pen drukt u één keer op de kleine blauwe Bluetooth pairingknop op de achterkant van uw Telefoonclip+. De TelefoonClip+ blijft nu 2 minuten in de Bluetooth pairingmodus staan.
5. Zoek in uw telefoon naar Bluetooth-apparaten.
6. Als het goed is krijgt u nu een lijst te zien met gevonden Bluetooth-apparaten. Kies 'Hearing Aid Phone' in deze lijst.
7. Soms vraagt uw telefoon om een cijfercode. Voer dan "0000" (vier nullen) in.
8. Uw Telefoonclip+ is nu gepaard met uw telefoon. Sommige mobiele telefoons vragen welke Bluetoothservice u wilt activeren. Kies dan 'Headset'.

### Stap 1b: Telefoon verbinden met de ReSound Unite Telefoonclip+

- Na een succesvolle pairing kan uw telefoon vragen of u echt wilt verbinden met de Telefoonclip+.
- Als u handmatig moet verbinden: zoek de lijst met 'Gepairde/verbonden apparaten' in het Bluetooth-menu van uw telefoon. Selecteer uit deze lijst 'Hearing Aid Phone' en kies 'Verbinden'.
- De Telefoonclip+ is nu klaar voor gebruik.
- Op sommige telefoons kunt u 'Automatisch opnieuw verbinden' instellen. Kijk in de handleiding van uw telefoon hoe u dit kunt doen.

### Stap 2: De ReSound Unite Telefoonclip+ pairen met ReSound draadloze hoortoestellen.

De hoortoestellen moeten met de ReSound Unite Telefoonclip+ gepaard worden om een privéverbinding voor verdere communicatie te maken.

Er zijn 2 manieren om te pairen:


- Het pairingproces in Aventa 3 afronden (dit doet de audicien voor u), of
- Pairen met de ReSound Unite Telefoonclip+ buiten Aventa om:
  1. Zet de Unite Telefoonclip+ aan en druk op de witte pairingknop achter het zilveren kapje.
  2. Open en sluit de batterijlades van de hoortoestellen binnen 20 seconden.



## Slimme controle

### Wat u allemaal in één handbeweging kunt doen

Verander een iPhone of Android smartphone in een uitgebreide afstandbediening voor uw hoortoestellen

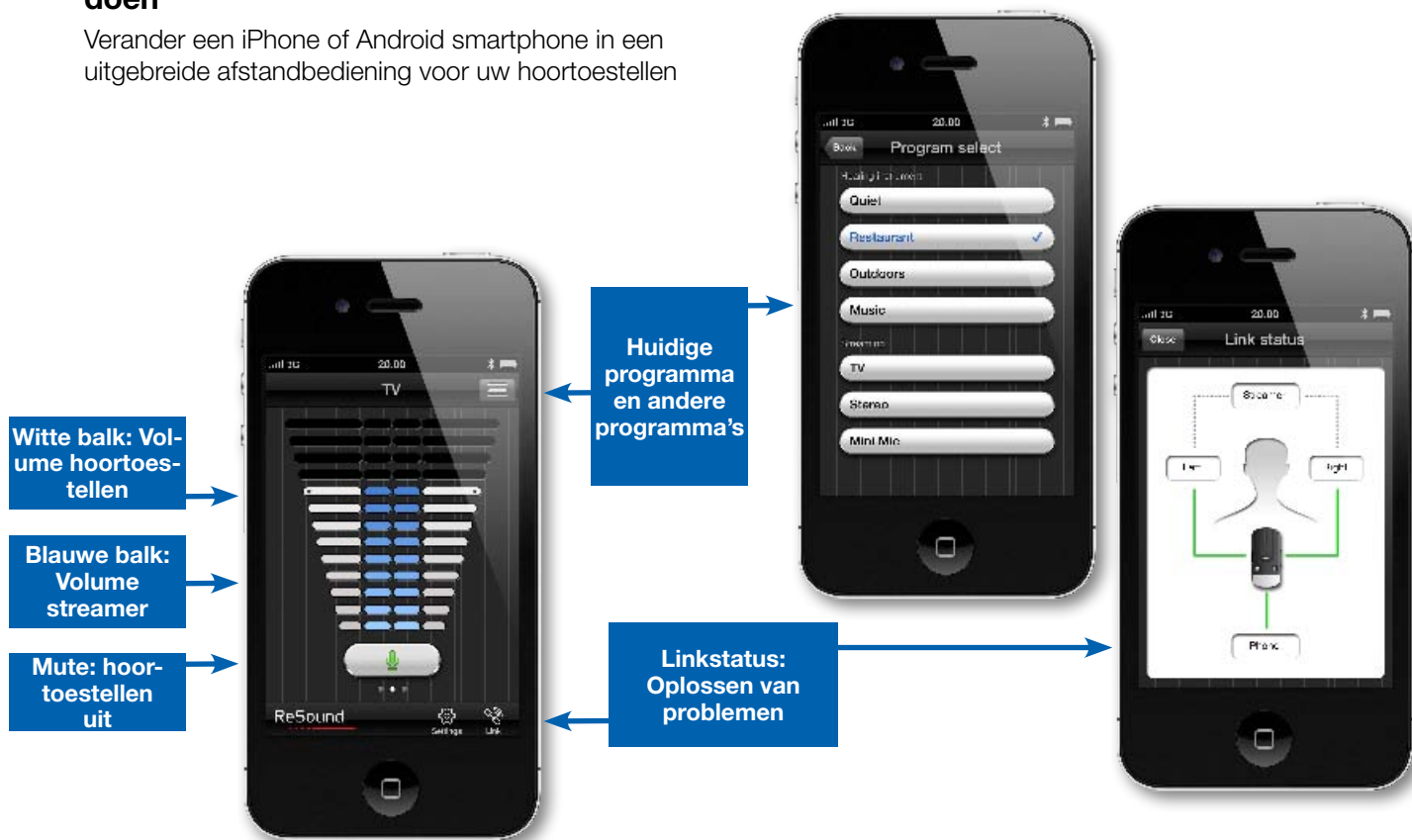

In het voorbeeld ziet u ReSound Control op een iPhone 4S. De Android™-versie toont misschien iets anders, maar werkt hetzelfde.

## Hoe gebruikt u de ReSound Control app?

Na het downloaden van de app en het pairen met uw hoorsysteem, drukt u op het ReSound Control-icoontje op het hoofdscherm van uw telefoon. De app start automatisch op en u krijgt de eerste keer de vraag:

1. Wilt u nu verbinding maken of de demo starten? Kies voor nu verbinden.
2. Gebruiksvoorwaarden: Wij vertellen u dat u vertrouwd raakt met de app door de geprinte handleiding van de Telefoonclip+ te lezen. U moet de gebruiksvoorwaarden accepteren voordat u verder kunt.
3. We raden u aan om het toetsenbordgeluid en andere geluiden uit te zetten op uw telefoon. Dit kan normaliter bij Instellingen en Geluiden. Deze geluiden kunnen anders storend werken als u de Telefoonclip+ en de app gebruikt.
4. We informeren u dat u bij 'Settings' meer kunt lezen over de functionaliteiten en over hoe u uw telefoon pairt met uw Telefoonclip+.

***U kunt nu van start met ReSound Control!***

<b>Apparateurvereisten</b>	
Hoorsysteem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ReSound draadloze hoortoestellen: ReSound Verso™ of ReSound Alera™.</li> <li>- ReSound telefoonaccessoire: ReSound Unite Telefoonclip+ (gelanceerd april 2013).</li> </ul>
Mobiel apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- iPhone (iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS) of iPad/iPod touch met iOS 5 of hoger.</li> <li>- Android smartphone, versie 2.3 of hoger.</li> </ul>
<b>Let op</b>	
ReSound Verso	Als volumesynchronisatie is geactiveerd bij device-to-device communicatie in Aventa®, dan worden monaurale volume-instellingen van de app door de hoortoestellen binauraal toegepast.
ReSound Alera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mute-functie (hoortoestelmicrofoon uit) niet beschikbaar.</li> <li>- Om de app te gebruiken bij ReSound Alera moet u eerst de Afstandbedieningsfunctie van de Telefoonclip+ activeren in de hoortoestellen. Hiervoor moet u deze pairen met een ReSound Unite™ Afstandbediening (van uzelf of van de audicien).</li> <li>- De Alera hoortoestellen moeten geupdate zijn met de firmware van Aventa 3.2 of hoger.</li> </ul>

### Meer informatie over de ReSound Control app

De ReSound Control app is Engelstalig. Ga naar [www.resound.nl/control](http://www.resound.nl/control) voor meer voor informatie en voor veelgestelde vragen over de ReSound Control.

### Voor professionals: demonstreer ReSound Control App bij uw klanten

U kunt de app op verschillende manieren demonstreren:

- iPhone of Android smartphone. U kunt de app in de demo-modus zetten onder 'Settings', zodat u hem kunt demonstreren zonder dat er een hoorsysteem verbonden is.
- iPad of iPod touch – ook demo-modus beschikbaar.
- Animatie beschikbaar gesteld door ReSound. **Zie [www.resound.com/control](http://www.resound.com/control)**

De handelsmerken zijn eigendom van, en worden gebruikt door de GN ReSound Group en haar dochterondernemingen. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn geregistreerde handelsmerken van Apple, Inc. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Android en Google Play™ zijn handelsmerken van Google Inc. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

**Internationaal hoofdkantoor**  
 ReSound A/S  
 Lautrupbjerg 7  
 DK-2750 Ballerup  
 Denemarken  
 Tel.: +45 45 75 11 11  
 Fax: +45 45 75 11 19  
[www.resound.com](http://www.resound.com)

  
**ReSound**  
