
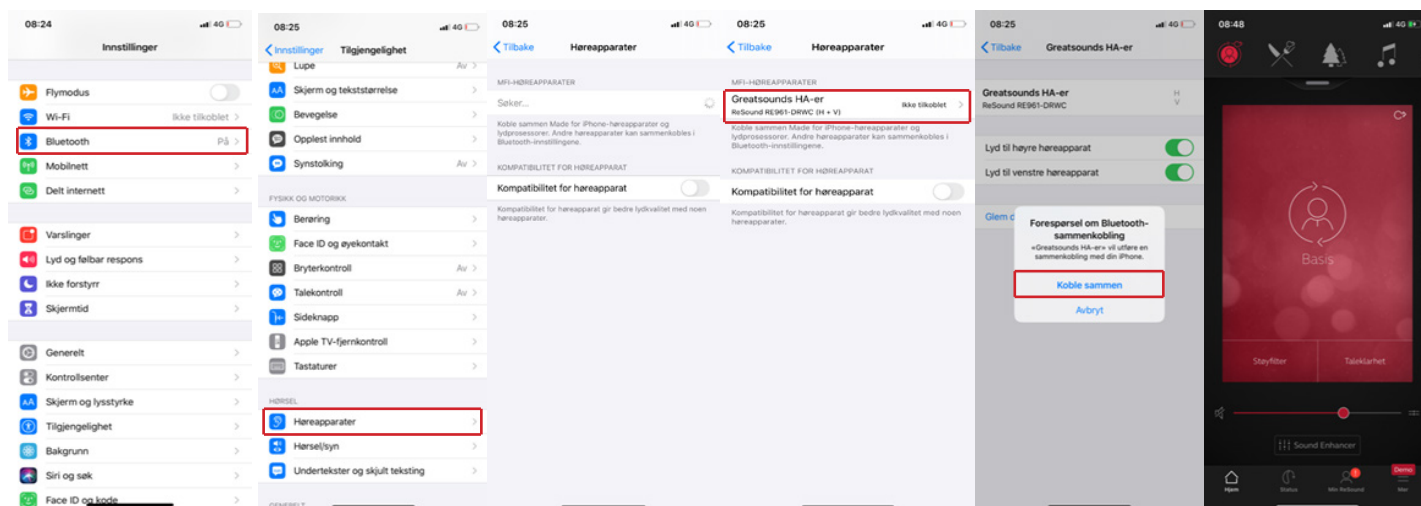


Slik parer du et Apple-produkt med ditt Høreapparat

1. **Slå av** dine høreapparater eller plasser de i laderen
2. Lukk alle apper og start telefonen din på nytt
3. Gå til **Innstillinger** på din telefon og **slå på Bluetooth**
4. Gå tilbake til **Innstillinger** og velg deretter **Tilgjengelighet**
5. Rull ned til **Høreapparater** og trykk der
6. **Slå på** dine Høreapparater- Nå vil høreapparatene være i paremodus
7. Hvis du har to høreapparater forsikre deg at det står (H+V) under navnet ditt
8. Trykk på **Koble sammen** (To ganger hvis du har to høreapparat)
9. Dine Høreapparater er nå koblet sammen med din Apple-enhet

For å bruke høreapparatene sammen med Smart 3D App gjør følgende:

1. Gå til App store 
2. Søk etter ReSound Smart 3D
3. Last ned appen- åpne den og trykk kom i gang
4. Følg instruksjonene på skjermen- Husk å tillate bruk av Bluetooth samt aktivering av stedstjenester («Alltid»)
5. Du er nå klar for å bruke Smart 3D



Feilsøking - Mistet kontakt med et eller begge apparater:

1. Lukk alle bakgrunns apper og Restart telefonen.
- Hvis ikke dette hjelper kan du gjøre følgende:
1. Slå av apparatene - Gå til Innstillinger - Tilgjengelighet - Høreapparater - Glem dette høreapparatet.
 2. Slå deretter av og på din telefon, og gjennomfør ny paring (se guide ovenfor).

Se ellers mange nyttige tips på vår Nettside: <https://www.resound.com/nb-no/help/apps/smart-3d>

Hvilken App skal jeg bruke?

Smart 3D: Linx 3D, Enzo 3D, Linx Quattro, Enzo Q. Denne appen er tilgjengelig til de fleste nyere smarttelefoner

Smart App: Linx 1-2, samt Enzo 1-2, UP Smart) Høreapparater fra 2014-2017. Tilgjengelig til iPhone og utvalgte Samsung telefoner.

Se komplett liste her: <https://www.resound.com/nb-no/help/compatibility>