

ReSound Up Smart™

ReSound Unite™ Mini-Mikrofon

Paarung der Geräte - Hinweise für Lehrer



PEDIATRICS

ReSound

ReSound Up Smart™

VERWENDUNGSZWECK

Das ReSound Unite™ Mini Mikrofon ermöglicht es einem Kind, das ReSound Wireless Hörsysteme trägt, die Sprache in vielen Hörsituationen klarer zu hören. Die Kommunikationsfähigkeiten werden maximiert, weil das ReSound Unite™ Mini Mikrofon die Signale direkt in die Hörsysteme des Schülers sendet.




PAARUNG DES MINI MIKROFONS IM KANAL 1

Hinweis: Vor der Paarung müssen Sie das Mini Mikrofon zuerst mindestens drei Stunden aufladen.

1. Achten Sie darauf, dass das ReSound Unite™ Mini Mikrofon auf EIN geschaltet ist, indem Sie den EIN-/AUS-Schalter auf der Seite auf die Position „EIN“ nach unten schieben. Die Hörsysteme des Kindes müssen AUS sein (d.h. das Batteriefach ist offen). Wenn Sie mehrere Schüler in der Klasse haben, die ReSound Wireless Hörsysteme tragen, sollten Sie jedes Gerät vor der Paarung auf OFF schalten.
2. Entfernen Sie die silberne Kappe vom Mini Mikrofon. Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die kleine Paarungstaste vorne auf dem ReSound Unite™ Mini

Mikrofon einmal (siehe Abbildung). Die LED blinkt jetzt alle zwei Sekunden gelb, um anzuzeigen, dass es bereit für die Paarung auf Kanal 1 ist. Das ReSound Unite™ Mini Mikrofon bleibt für 20 Sekunden im Paarungsmodus.

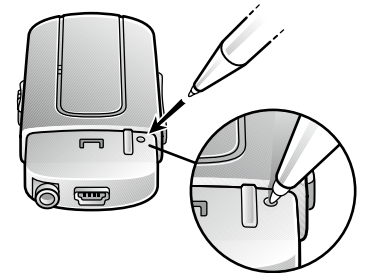

3. Im aktivierten Paarungsmodus bitten Sie das Kind das Batteriefach an beiden Hörsystemen zu schließen, so dass die Geräte auf EIN geschaltet sind. Bei einer erfolgreichen Paarung ist in beiden Hörsystemen eine Melodie hörbar. Sie und der Schüler sind jetzt bereit das ReSound Unite™ Mini Mikrofon zu nutzen.



STELLEN SIE DIE VERBINDUNG MIT DEM MINI MIKROFON HER

Um das Streaming Programm für die Verwendung mit dem Mini Mikrofon zu starten, drücken Sie die Tasten am Hörsystem wie folgt:

- Einmal lange drücken (ca. 3 Sekunden), wenn die Paarung auf Kanal 1 vorgenommen wurde.
- Zweimal lange drücken, wenn die Paarung auf Kanal 2 vorgenommen wurde.
- Dreimal lange drücken, wenn die Paarung auf Kanal 3 vorgenommen wurde.

Bei einer erfolgreichen Verbindung ist in beiden Hörsystemen eine Melodie hörbar. Um beste Ergebnisse zu erhalten achten Sie darauf, dass das Mini Mikrofon 10 bis 20 cm vom Mund des Sprechers entfernt befestigt wird.

PAARUNG DES MINI MIKROFONS IN KANAL 2 ODER 3

Einige Schüler haben evtl. andere Wireless Zubehörgeräte, die bereits mit dem Hörsystem auf Kanal 1 gepaart sind. Um ein Überschreiben der Paarung anderer Zubehörgeräte zu vermeiden, kann das Mini Mikrofon auf Kanal 2 oder 3 gepaart werden.

Zum Paaren des Mini Mikrofons auf Kanal 2 oder 3, drücken Sie die Paarungstaste zwei- oder dreimal. Die LED blinkt entsprechend um anzuzeigen, dass es bereit für die Paarung ist. Schließen Sie die Batteriefächer der Hörsysteme.

Paarungstaste drücken	LED Blinkmuster				Kanal
1	1	1	1	1	1
2	1 2	1 2	1 2	1 2	2
3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	3