



ReSound GN  
.....

# Connectez-vous

Les applications ReSound Smart 3D™ et ReSound Smart™

GN Making Life Sound Better  
FOR 150 YEARS

# Introduction

Merci d'avoir choisi nos produits. Nous avons créé cette application pour qu'il soit facile et agréable pour vous d'utiliser et de contrôler vos appareils auditifs depuis votre smartphone ou appareil mobile.

Pour savoir sur quels smartphones et appareils mobiles sont compatibles avec l'application, visitez : [resound.com/compatibility](https://resound.com/compatibility)

Avant de pouvoir commencer à utiliser l'application, vous devez jumeler votre smartphone ou votre appareil mobile avec vos appareils auditifs. Ceci est facile à faire - il suffit de suivre les instructions ci-dessous.

## Comment jumeler vos appareils auditifs avec votre appareil iOS

1. Éteignez vos aides auditives.
2. Allumez **Bluetooth**® en allant dans le menu **Réglages** de votre appareil iOS. Le témoin devient vert lorsque vous activez Bluetooth.




## Comment coupler vos aides auditives avec votre appareil Android™

1. Allez sur **Google Play**. Dans le champ **Rechercher** haut, entrez le nom de l'application et téléchargez l'application.
2. Une fois téléchargé, ouvrez l'application et appuyez sur **Démarrer**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter. Vous êtes maintenant prêt à commencer.


**REMARQUE:** Si vous avez déjà appairé des appareils auditifs, vous devez les désappairer dans le menu Bluetooth de votre smartphone avant de pouvoir les appairer à nouveau.

## Si vous avez besoin de recoupler votre appareil iOS

1. Commencez par supprimer l'ancien jumelage en allant dans le menu **Réglages**.
2. Faites défiler vers le bas et sélectionnez **Accessibilité**.
3. Sélectionnez **Appareils auditifs**.
4. Tapez sur vos appareils auditifs, faites défiler vers le bas et tapez sur **Oublier cet appareil**.
5. Eteignez et rallumez votre appareil iOS et jumelez les appareils auditifs sur l'appareil. Si vous avez besoin de plus amples informations, contactez votre audioprothésiste.

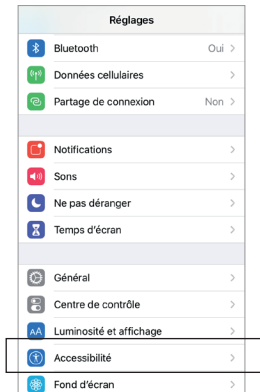

3

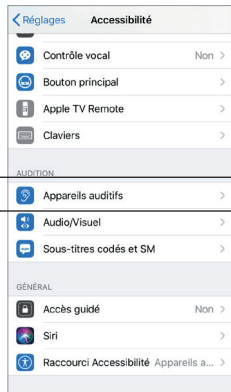

4

**NOTE:** A partir de l'iOS 13 et plus récent

3. Retournez au menu principal **Réglages** , puis tapez sur **Accessibilité**.
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à **Appareils auditifs**.
5. Allumez vos appareils auditifs. Désormais, votre appareil iOS pourra détecter vos appareils auditifs.



6. Tapez sur **Jumeler**.
7. Allez dans **App Store**, et dans le champ **Rechercher** en haut entrez le nom de l'application.
8. Téléchargez l'application, ouvrez-la et appuyez sur **Démarrer**.
9. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à l'application. Vous êtes maintenant prêt à commencer.

**Siège mondial**

GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup, Denmark  
Tel.: +45 4575 1111  
resound.com

**Schweiz**

GN Hearing Switzerland AG  
Schützenstrasse 1  
CH-8800 Thalwil  
Tel.: +41 44 722 91 11  
Fax: +41 44 726 91 82  
info@gnresound.ch  
resound.ch

**France**

GN Hearing  
Zone Silic - Bâtiment Liège  
1, place des États-Unis  
FR-94150 Rungis  
Tel.: +33 (0) 1 75 37 70 00  
resound.com

© 2019 GN Hearing A/S. Tous droits réservés. ReSound est une marque déposée de GN Hearing A/S. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC. La marque verbale et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.