



ReSound LiNX 3D™

Une nouvelle ère
Smart Hearing





L'audition du futur

Nos aides auditives
Smart Hearing s'adaptent
intelligemment à votre
audition. Vous entendez tout
clairement et sans effort.

Profitez à chaque instant d'un son naturel et de toujours
être proche de votre environnement.

ReSound LiNX 3D™ délivre une expérience auditive
unique qui dépassera vos attentes. Ces aides auditives se
transforment en écouteurs audio stéréo et offrent un niveau
de contrôle encore jamais atteint et ce, peu importe l'endroit
où vous vous trouvez.

Cette aide auditive est résistante, confortable et
extrêmement discrète.

ReSound / hear more, do more, be more

ReSound LiNX 3D est la nouvelle aide auditive
Smart Hearing, héritière de la première aide
auditive au monde conçue pour iPhone que nous
lancions il y a trois ans.

En savoir plus sur ReSound LiNX 3D et Smart Hearing : [resound.com](https://www.resound.com)

Tout entendre naturellement

Imaginez une discussion en cuisine alors qu'un hachoir tourne, que des couteaux éminent et que de l'eau bout dans une casserole. Le bruit de fond est alors très élevé.

Avec ReSound LiNX 3D, cette situation est plus simple qu'elle n'y paraît.

Ces aides auditives sont les meilleures pour reconnaître les voix et les retranscrire fidèlement grâce à leur technologie révolutionnaire. Vous entendrez les conversations de toutes les directions même si le bruit de fond change souvent.





Parce que
ReSound LiNX 3D est

50%

plus performante pour
identifier la parole dans
des environnements
variés*

vous entendez

80%

de sons en plus
autour de vous**

Peu importe où vous vous
trouvez, vous comprendrez tout
ce qui se passe.

et comprenez

40%

de parole en
plus dans le
bruit**

Même dans les environnements
difficiles vous entendez votre
entourage parfaitement

*Comparé avec des aides auditives haut de
gamme de marques concurrentes.*

*Sources: *Groth (2016),
**Jespersen et al. (2016)*



 Connectivité

Entendez tout ce que vous désirez

Nous voulons entendre toutes les conversations, et nous voulons également écouter la radio, regarder nos séries préférées et discuter au téléphone. Tout ceci est possible grâce à ReSound LiNX 3D car vous pouvez recevoir tous les sons directement dans vos aides auditives.

ReSound LiNX 3D est une aide auditive Made for iPhone, elle se transforme en écouteur stéréo sans fil pour recevoir en direct le son de votre iPhone, iPad ou iPod touch.

Les accessoires sans fil améliorent votre audition dans toutes les situations, face à la télévision, lors d'une réunion ou en voiture. (Voir page 13)



Le monde fourmille de sons intéressants, les voix, la musique, le rebond d'une balle, les sonneries, etc... Votre cerveau traduit naturellement le sens des sons et utilise différentes tactiques en fonction des niveaux sonores. Nos technologies innovantes reproduisent ce fonctionnement naturel pour vous aider à entendre et à vous focaliser sur ce qui vous intéresse.

Avec la technologie Spatial Sense vous entendez clairement et naturellement les sons environnants même dans les situations difficiles. Grâce à la technologie Binaural Directionality III vous vous focalisez uniquement sur ce que vous désirez sans être coupé de votre environnement.



Le saviez-vous?

La préoccupation principale d'un utilisateur d'aide auditive est d'évoluer facilement dans n'importe quel environnement sonore.

Des technologies intelligentes

Vous marchez dans la rue avec un de vos proches et votre téléphone sonne. Vous répondez, le Micro Mic se coupe jusqu'à ce que votre conversation soit terminée.

Tout un monde d'applications utiles



Vous visitez une ville pour la première fois ?
Recevez les indications de votre gps directement dans vos aides auditives.



Vous voyagez dans un pays étranger ?
Avec l'application Google Translate vous recevez dans vos aides auditives la traduction du serveur au restaurant.




Application

ReSound Smart 3D™

Optimisez votre expérience auditive

ReSound LiNX 3D s'adapte automatiquement à votre environnement sonore. Cependant, vous pouvez personnaliser et ajuster votre audition quand vous en ressentez le besoin grâce à la nouvelle application ReSound Smart 3D.

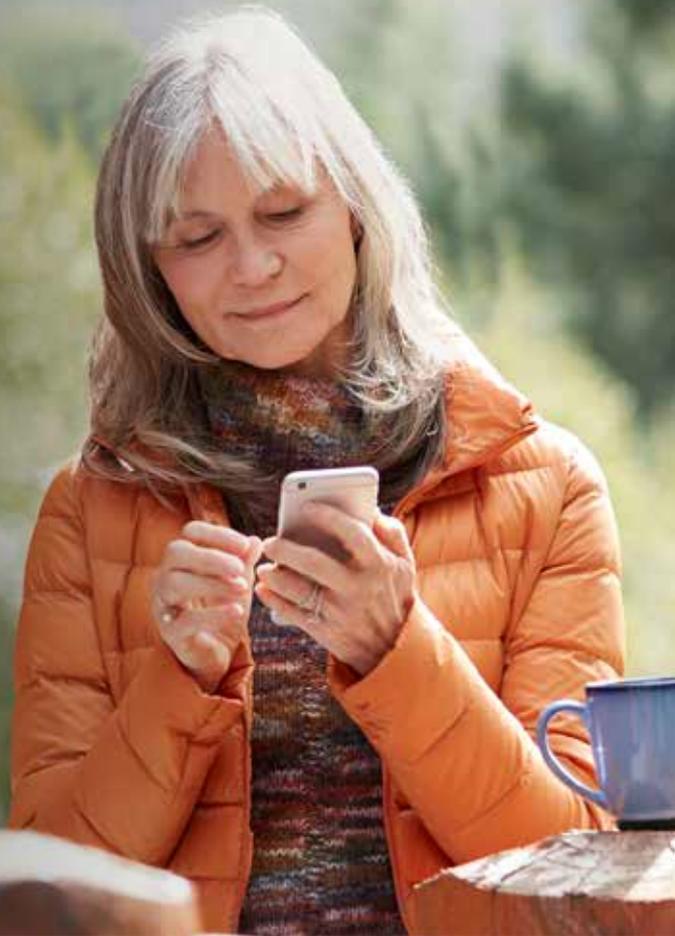

Barre des programmes

Visualisez les programmes d'un simple geste

Programme actif

Boutons d'accès rapide

Optimisation d'un simple clic

Volume et mode sourdine

Sound Enhancer

Accès rapide à toutes les options de réglages



C'est facile

D'un simple geste sur l'écran principal vous disposez de tout ce dont vous avez besoin. Ainsi vous avez toujours confiance dans vos aides auditives et profitez de ce qui se passe autour de vous.


Ajustez le son depuis l'Apple Watch



Vos paramètres

Sound Enhancer


Certaines situations sonores difficiles peuvent nécessiter d'affiner son audition. Allez dans "Sound Enhancer" pour obtenir plus de fonctionnalités que celles proposées par les boutons d'accès rapides.

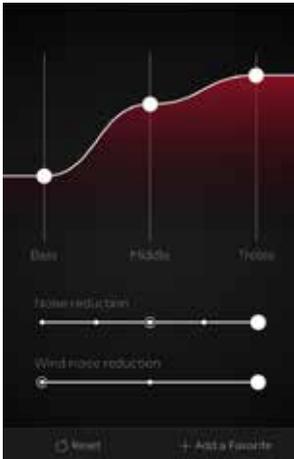

Réglage des graves/
médiants/aigus



Réglage du réducteur
de bruit

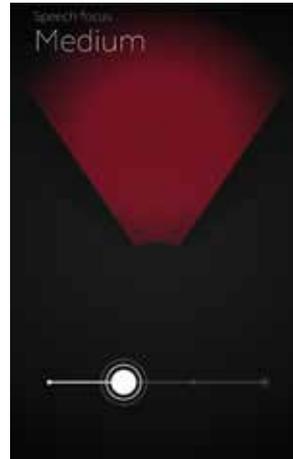

Réglage de la
directivité



Réglage de l'anti-bruit
de vent



Favoris

Sauvegardez vos réglages en programmes favoris et géo localisez-les. Ils s'activeront automatiquement dès lors que vous arriverez dans les lieux sélectionnés.

Vos aides auditives

Vous avez besoin d'aide? Cliquez sur le bouton My ReSound.



Trouver mes aides auditives

Si vous égarez vos appareils, l'application vous montrera sur une carte le dernier emplacement connu des aides auditives.



Astuces

Vous aide à utiliser vos aides auditives en fonction de votre audition et de vos préférences.

Découvrir la liste complète des appareils compatibles : resound.com/compatibility

Votre audioprothésiste est toujours proche de vous

Il peut arriver que les réglages de vos appareils nécessitent des petits ajustements dans certaines situations du quotidien. Si vous rencontrez des soucis récurrents que vous n'arrivez pas à compenser par l'application ReSound Smart 3D, vous pouvez activer ReSound Assist.

Cette fonctionnalité est disponible dans votre application et vous permet d'être connecté à votre audioprothésiste. Vous pouvez l'utiliser quand vous rencontrez une difficulté, vous n'avez donc plus besoin de vous rappeler de la situation lors de votre prochain rendez-vous. C'est simple et pratique pour obtenir un réglage optimisé.



ReSound Assist vous permet d'être toujours en contact avec votre audioprothésiste et de recevoir des modifications de réglages par le cloud.

Une connexion efficace et fiable

ReSound Assist est conçu sur une des plateformes cloud les plus fiables. Vos informations personnelles restent privées et sécurisées.

Demandez de l'assistance à distance

Décrire un son est compliqué. Lors d'une demande de modification, nous vous aidons à donner une information précise à votre audioprothésiste afin qu'il effectue les réglages appropriés.

Les informations consistent en :


- un diagnostic d'évaluation
- votre description du problème
- l'enregistrement automatique de vos réglages d'appareils au moment de la demande




Dans My ReSound, cliquez sur demande d'assistance



Répondez à une série de questions rapides

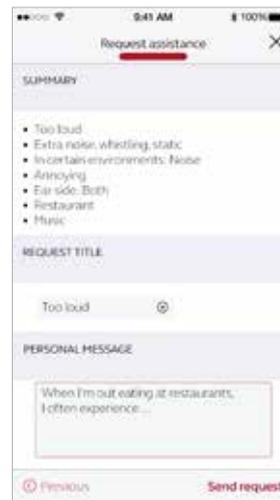

Ecrivez un message et envoyez votre demande

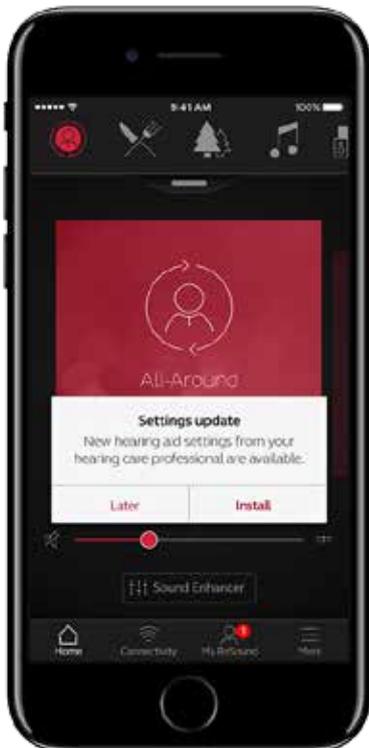

Recevoir des nouveaux réglages

En fonction de votre demande, votre audioprothésiste affinera les réglages de vos aides auditives et vous enverra vos nouveaux réglages via l'application ReSound Smart 3D. A la réception de ceux-ci, placez vos aides auditives près de votre smartphone et cliquez sur «Installer».

Vous pouvez à tout moment décider de garder les nouveaux réglages ou de récupérer les anciens si vous préférez.



Gamme RITE et BTE



RIE 61 (312)

RIE 62 (13)

BTE 67 (312)

BTE 77 (13)

BTE 88 (13)

Coloris RITE et BTE



Argent

Anthracite

Noir

Beige

Blond clair

Blond moyen

Marron

Blanc

Métal

Anthracite brillant

Noir brillant

Blond moyen brillant

Rouge

Bleu

Gamme Intra-auriculaires



IIC (10A)

CIC (10A)

ITC (312)

ITE (312/13)

Coloris intra-auriculaires



Clair

Beige

Marron moyen

Foncé

Marron

Discrètes

Les aides auditives ReSound LiNX 3D sont extrêmement discrètes, personne ne les verra. Ergonomiques et confortables à porter au quotidien, vous oublierez que vous les portez.



Fiabiles

Ces aides auditives sont très résistantes, vous pourrez compter sur elles*. Chaque composant intérieur et extérieur est protégé par la technologie iSolate nanotech, contre l'humidité, le cérumen et la poussière.

**Hearing Tracker: Most important hearing aid features (2016)*



Connectées

ReSound vous donne accès à la gamme d'accessoires sans fil la plus complète du marché et la plus performante. Vous avez ainsi la meilleure expérience auditive dans toutes les situations même difficiles. Vous pouvez recevoir le son de toute source sonore directement dans vos aides auditives. Ces accessoires communiquent ensemble intelligemment, par exemple le volume de la TV s'arrête dès lors que vous recevez un appel téléphonique.



ReSound Multi Mic

Posé sur une table ou accroché au vêtement d'une personne cet accessoire transmet le son de vos interlocuteurs directement dans vos aides auditives. Il améliore le rapport signal/bruit à distance et dans le bruit.



ReSound Phone Clip+

Vous offre liberté, confort et contrôle précis lors d'appels téléphoniques et quand vous écoutez de la musique depuis votre téléphone Bluetooth.



ReSound TV Streamer 2

Transmet le son en stéréo dans vos aides auditives. Vous disposez de votre propre volume sonore et les personnes autour de vous du leur.

Découvrir les accessoires sans fil ReSound : [resound.com](https://www.resound.com)



ReSound Smart Hearing reconnu dans le monde entier

Nos aides auditives Smart Hearing sont reconnues dans le monde entier pour garantir la meilleure audition pour tous les malentendants.

ReSound LiNX 3D est la dernière génération d'aides auditives Smart Hearing maintes fois récompensées dans le monde entier. Ces aides auditives intelligentes et connectées ne limitent plus le malentendant mais lui offrent la possibilité de tout entendre à chaque instant.

ReSound Smart Hearing à été récompensé d'une multitude de prix dont les suivants :



CES Innovation Award 2017

Lauréat de la meilleure innovation dans les technologies d'accessibilité, récompensé par le Consumer Electronic Show aux Etats-Unis



Die Goldene Concha 2016

Meilleure gamme d'aides auditives récompensée par les Audioprothésistes Indépendants Allemands



Golden Lobe Award 2016

Meilleure solution auditive puissante et meilleure application mobile. Récompensés par l'Association Anglaise des Professionnels de l'Audition Indépendants.

Technologies et fonctionnalités

Découvrez toutes les fonctionnalités uniques et les technologies innovantes de ReSound LiNX 3D.
ReSound / Hear more, do more, be more

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	ReSound LiNX3D 9	ReSound LiNX3D 7	ReSound LiNX3D 5
Nombre maximum de programmes	4	4	4
Changement de programmes*	■	■	■
Contrôle du volume*	■	■	■
Mise en marche différée "Smart Start"	■	■	■
Commutation téléphone automatique "Phone Now"	■	■	■
Gestion asymétrique du téléphone "Comfort Phone"	■	■	■
Communication inter-appareils	■	■	■
Connexion audio directe MFI (Made for iPhone)	■	■	■
ReSound Micro Mic, Multi Mic, TV Streamer 2, Phone Clip+ et Remote Control 2	■	■	■
Application ReSound Smart 3D	■	■	■
Application ReSound Smart 3D – Sound Enhancer	■		
Application ReSound Smart 3D– ReSound Assist	■	■	■
Application ReSound Control (pour Phone Clip+)	■	■	■
CARACTÉRISTIQUES AUDIOLOGIQUES			
Compression WARP – nombre de canaux	17	14	12
Directivité "Binaural Directionality III"	■		
Mode omni "Spatial Sense"	■		
Directivité "Binaural Directionality"		■	
Directivité "Natural Directionality II"	■	■	■
Point de flexion fréquentiel personnalisé	■	■	■
Point de flexion fréquentiel modifiable	■		
Directivité "Synchronized SoftSwitching"	■	■	
Directivité "Softswitching"			■
Directivité à faisceau directionnel automatique "Autoscope"	■		
Directivité à faisceau directionnel réglable "Multiscope"		■	
Directivité "Adaptive Directionality"			■
Binaural Environmental Optimizer II	■		
Environmental Optimizer		■	
Réducteur de bruit "Noise Tracker II"	■	▣	□
Réducteur de bruit faible "Expansion"	■	▣	□
Réducteur de bruit de vent "Wind Guard"	■	▣	□
Anti-Larsen DFS Ultra II	■	■	■
Anti-Larsen avec "Music Mode"	■	■	■
Anti-Larsen précalibré "Auto DFS"	■	■	■
Adaptation progressive des gains "Acceptance Manager"	■	■	■
Générateur de son TSG avec sons naturels	■	■	■

■ Top ▣ Plus □ Basic

* Certains modèles seulement

Voir la fiche technique pour plus d'informations.

