

ReSound LiNX Quattro laddare



Enkelt handhavande, liten & smidig, räcker länge

Batteristatus hörapparater:


När man sätter i eller tar ur hörapparaterna kommer **batteristatus för hörapparaterna** att visas i 10 sek.

- ● ● ● ● 0 – 20% laddad
- ● ● ● ● 20 – 40% laddad
- ● ● ● ● 40 – 60% laddad
- ● ● ● ● 60 – 80% laddad
- ● ● ● ● 80 – 100% laddad



Batteristatus laddare:

- 66 – 100% laddad
- 33 – 66% laddad
- 10 – 33% laddad
- <10% laddad

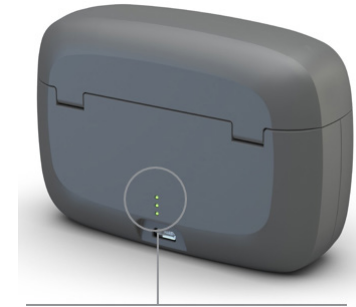

När man sätter i eller tar ur hörapparaterna/ eller strömkabeln kommer **batteristatus för laddaren** att visas i 10 sek.

LADDNINGSTID (TIMMAR)	BATTERITID (TIMMAR)
3	= 30 24 med 50% streaming
1	= 16
1/2	= 8

BATTERILIVSTID 4+ ÅR

Så här sätter du på och stänger av ReSound LiNX Quattro 61

- Tryck 5 sekunder på omk för att **stänga av** hörapparaten = ledlampan blinkar 3 gånger
- Tryck 5 sekunder för att starta hörapparaten igen = ledlampan visar 1 blinkning
- Eller genom att placera hörapparaterna i laddaren en kort stund och sedan ta upp dem igen



RE61 – Omkopplare	
Aktivitet	Tryckknapp
Stänga av	Tryck 5 sekunder
Starta	Tryck 5 sekunder
Aktivera flygplansläge	Stäng av Tryck 9 sekunder
Byta program	Kort tryckning
Streaming (Starta och växla)	Tryck 1 sekund

RE61 – LED	
Aktivitet	Lysdiod
Stänga av	1 blinkning
Starta	3 blinkningar
Aktivera flygplansläge	Dubbelblinkning 4 gånger
Placera i laddaren	Pulserande blinkningar
Anslut hörapparat i SmartFit	6 blinkningar
Hörapparat fulladdad	Fast grönt sken (24 timmar)